

TRIOS 3- und TRIOS 3 Basic-Aufsätze warten und reinigen

Die TRIOS-Aufsätze müssen vor dem ersten Gebrauch, zwischen Patienten sowie vor der Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften sterilisiert werden. TRIOS-Aufsätze können bis zu 150 Mal autoklaviert oder mit einem hochwirksamen Desinfektionsmittel desinfiziert werden. Beschädigte TRIOS-Aufsätze müssen ersetzt werden. Das Sicherheits- und Bedienungshandbuch enthält vollständige und aktuelle Informationen. Nachfolgend finden Sie einige der Hauptpunkte:

Sterilisation im Autoklaven

Schritt 1. TRIOS 3- und TRIOS 3 Basic-Aufsätze müssen sofort nach Gebrauch gereinigt und sterilisiert werden.

Hinweis: Neue Aufsätze müssen vor dem ersten Gebrauch sterilisiert oder hochwirksam desinfiziert werden.

Schritt 2. Reinigen Sie die Aufsätze von Hand mit Seifenwasser und einer weichen Bürste. Dazu wird ein mildes Spülmittel oder ein ähnliches Reinigungsmittel empfohlen. Wenn der Spiegel immer noch fleckig oder verschmiert ist oder einen milchigen Dunst aufweist, wiederholen Sie die Reinigung, bevor Sie mit Wasser nachspülen.

HINWEIS: Trocknen Sie den Spiegel vorsichtig mit einem Papiertuch ab.



Schritt 3. Geben Sie den Aufsatz in einen Sterilisationsbeutel und verschließen Sie ihn. Sie können entweder einen selbstklebenden oder einen wärmeversiegelten Beutel verwenden.

Hinweis: Verschließen Sie die Aufsätze immer, bevor Sie sie in einem Autoklaven sterilisieren.

Schritt 4.

Geben Sie die Aufsätze in den Autoklaven und verwenden Sie eines der folgenden zwei Programme:

- 134 Grad für mindestens 4 Minuten
- 121 Grad für mindestens 45 Minuten

Hinweis: Verwenden Sie ein Autoklavenprogramm, bei dem der eingewickelte Aufsatz vor dem Öffnen des Autoklavs getrocknet wird.

Hinweis: Autoklavierzeiten und -temperaturen variieren je nach Autoklaventyp und -hersteller. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Autoklavenherstellers nach, um sicherzustellen, dass die Mindestparameter des Autoklavs eingehalten werden.

Verwendung eines hochwirksamen Desinfektionsmittels:

Schritt 1. Reinigen Sie den Aufsatz von Hand mit Seifenwasser und einer weichen Bürste. Dazu wird ein mildes Spülmittel oder ein ähnliches Reinigungsmittel empfohlen. Wenn der Spiegel immer noch fleckig oder verschmiert ist oder einen milchigen Dunst aufweist, wiederholen Sie die Reinigung, bevor Sie mit Wasser nachspülen.



Schritt 2. Trocknen Sie den Spiegel vorsichtig mit einem Papiertuch ab.

Schritt 3. Desinfizieren Sie den Aufsatz mit Wavicide-01 Lösung, indem Sie ihn gemäß den Anweisungen der Wavicide-01 Lösung 45–60 Minuten in die Lösung einlegen.

Schritt 4. Spülen Sie den Aufsatz gemäß den Anweisungen der Wavicide-01 Lösung nach.

Schritt 5 Trocknen Sie den Aufsatz und den Spiegel mit einem abriebfesten Handtuch oder Tuch ab.

Hinweis: Die hochwirksame Desinfektion mit der Wavicide-01 Lösung wurde von 3Shape validiert. Die Wavicide-01 Lösung ist jedoch nicht weltweit als Desinfektionsmittel für Medizinprodukte zugelassen und/oder anerkannt. Befolgen Sie immer die für Ihre Praxis oder Einrichtung festgelegten Verfahren sowie die nationalen Richtlinien.