


# Orthocryl<sup>®</sup> LC



**delight**fully different!

El acrílico fotopolimerizable para la ortodoncia



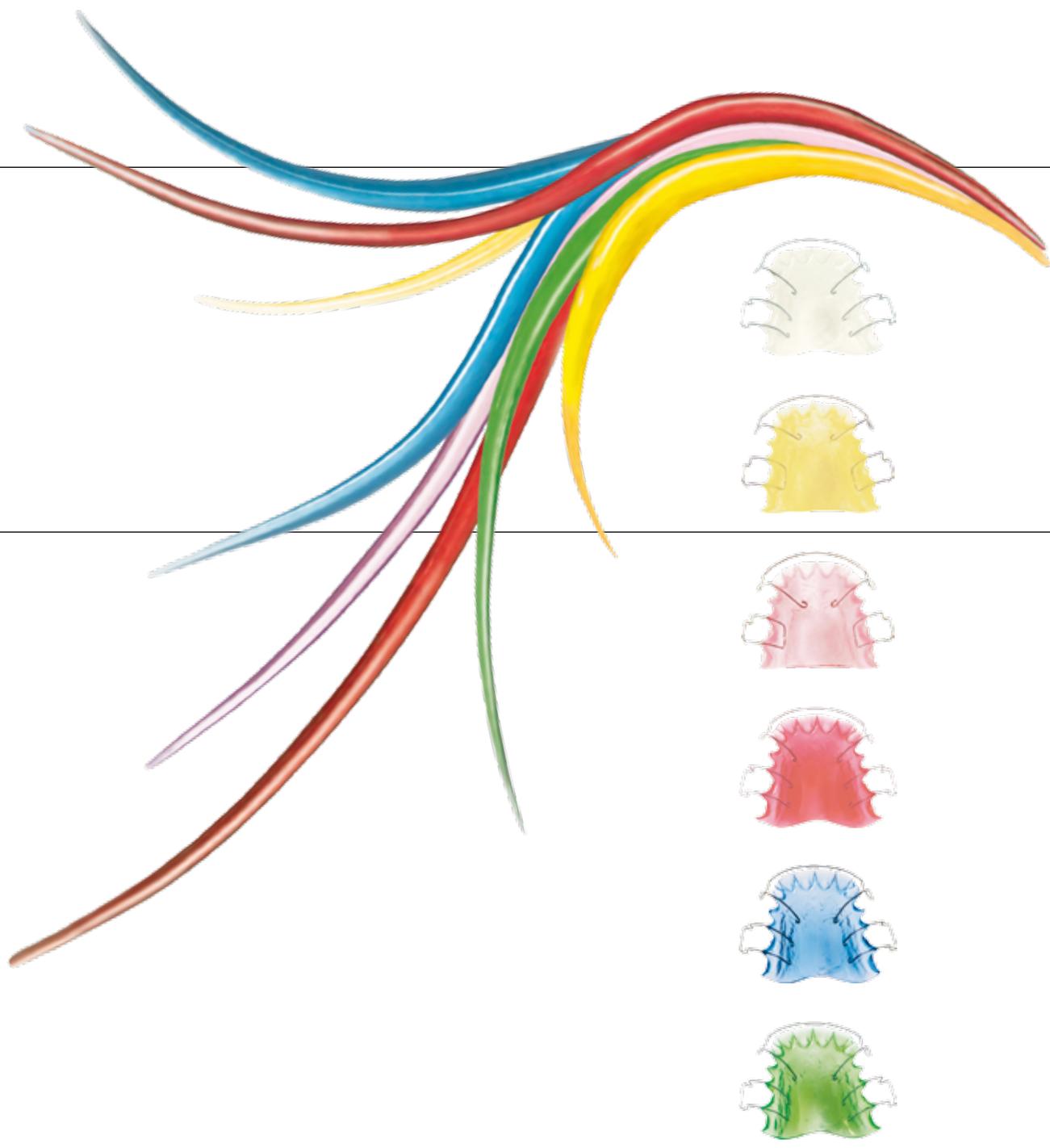

---

# TODO MENOS CORRIENTE

---

*Orthocryl*<sup>®</sup> LC



El acrílico ortodóntico **Orthocryl**<sup>®</sup> LC impresiona con nuevas ventajas: es fotopolimerizable, ahorra tiempo y es especialmente fácil de manipular. Orthocryl<sup>®</sup> LC fue diseñado especialmente para cumplir con las exigencias de la fabricación de aparatos ortodónticos. Pero se presta también para fabricar férulas de fresado, placas de mordida y aparatos antironquido en sólo unos minutos y con poco esfuerzo. El material es completamente biocompatible e inodoro ya que es libre de las sustancias nocivas tales como metacrilato de metilo (MMA) y peróxido de dibenzoyl.

Orthocryl<sup>®</sup> LC es exclusivo, nada corriente y por su novedad es diferente a todo lo que podrá encontrar en el mercado. Un producto de calidad...porque más es más.



# Orthocryl® LC


¡Trabajar de forma económica es más importante que nunca para tener éxito! Orthocryl® LC le permite ahorrar tiempo y material. El acrílico cumple los requisitos, cada vez mayores de biocompatibilidad y calidad. Descubra las ventajas de este material extraordinario.

## FÁCIL DE MANIPULAR

Aplicar el material listo para su empleo en el modelo, colocar 6 minutos en la unidad de fotopolimerización, acabar y ¡listo!

## BIOCOMPATIBLE

Orthocryl® LC no contiene las sustancias nocivas tales como metacrilato de metilo (MMA) y peróxido de dibenzoyl. Una ventaja decisiva para su salud y la de sus pacientes.

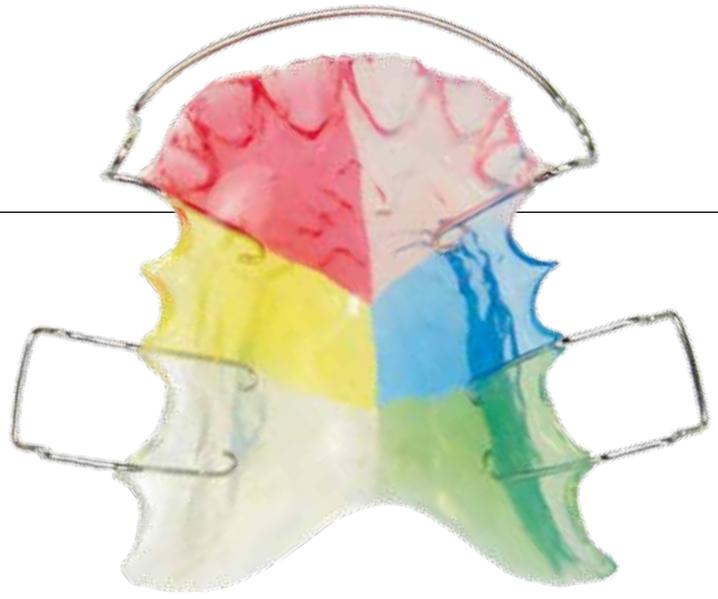


Ya no es necesario el  
mezclado o rociado, ni  
largos periodos de polimeriz-  
ación en la olla a presión.  
¡Orthocryl® LC ahorra tiempo!

**ABSOLUTAMENTE  
RÁPIDO**

Ya sea para aparatos  
ortodónticos, placas de  
mordida o aparatos antironquido:  
Orthocryl® LC es estable, ahorra  
material y presenta un ajuste óptimo.

**APLICACIÓN  
VERSÁTIL**

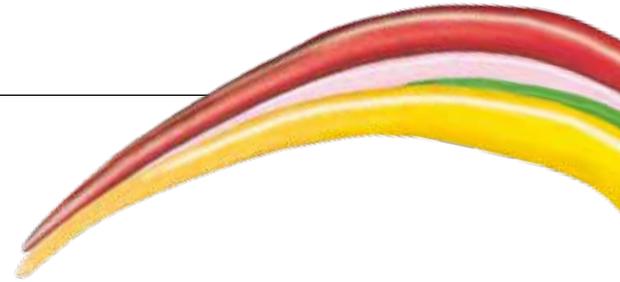

## Fácil de usar y flexible.


La aplicación de Orthocryl® LC es extremadamente fácil. El producto se suministra listo para su uso, en cartuchos negros y opacos. La preparación laboriosa ya no es necesaria, el acrílico ya no tiene que ser mezclado y rociado.

El material se aplica directamente del cartucho al modelo preparado anteriormente. El inyector correspondiente permite una dosificación precisa. Esta sencilla manipulación no sólo ahorra tiempo en la fabricación y el acabado sino también en material.

El laboratorio permanece limpio, el polvo de polímero ya no ensucia el suelo y el lugar de trabajo como solía ser al utilizar material polimerizable en frío. Además es libre de las sustancias nocivas, metacrilato de metilo y peróxido de dibenzoyl y por ello es muy fácil de procesar. Orthocryl® LC es especialmente apto para técnicos y pacientes con alergias contra estas sustancias. El procesamiento no produce vapores de monómero.

Por la fluidez perfectamente balanceada el material puede adaptarse de forma eficiente al modelo. Tornillos y alambres en los aparatos ortodónticos quedan completamente cubiertos e incorporados en el material. A la vez el material es suficientemente estable para que no se escape. No hay presión de tiempo. La polimerización se inicia en la unidad de polimerización y no antes.

Después de la aplicación, el modelo se coloca en la unidad de polimerización y listo. Un par de minutos alcanzan para la polimerización completa. Con Orthocryl® LC se puede ahorrar un 50% del tiempo de fabricación en comparación con el proceso de fabricación usual con material polimerizable en frío. Por la polimerización directa en la unidad de polimerización, los períodos largos en la olla a presión ya no son necesarios. Para la polimerización se prestan todas aquellas unidades de polimerización que se utilizan para polimerizar plásticos de recubrimiento. Es necesaria una longitud de onda de 400-550 nm.

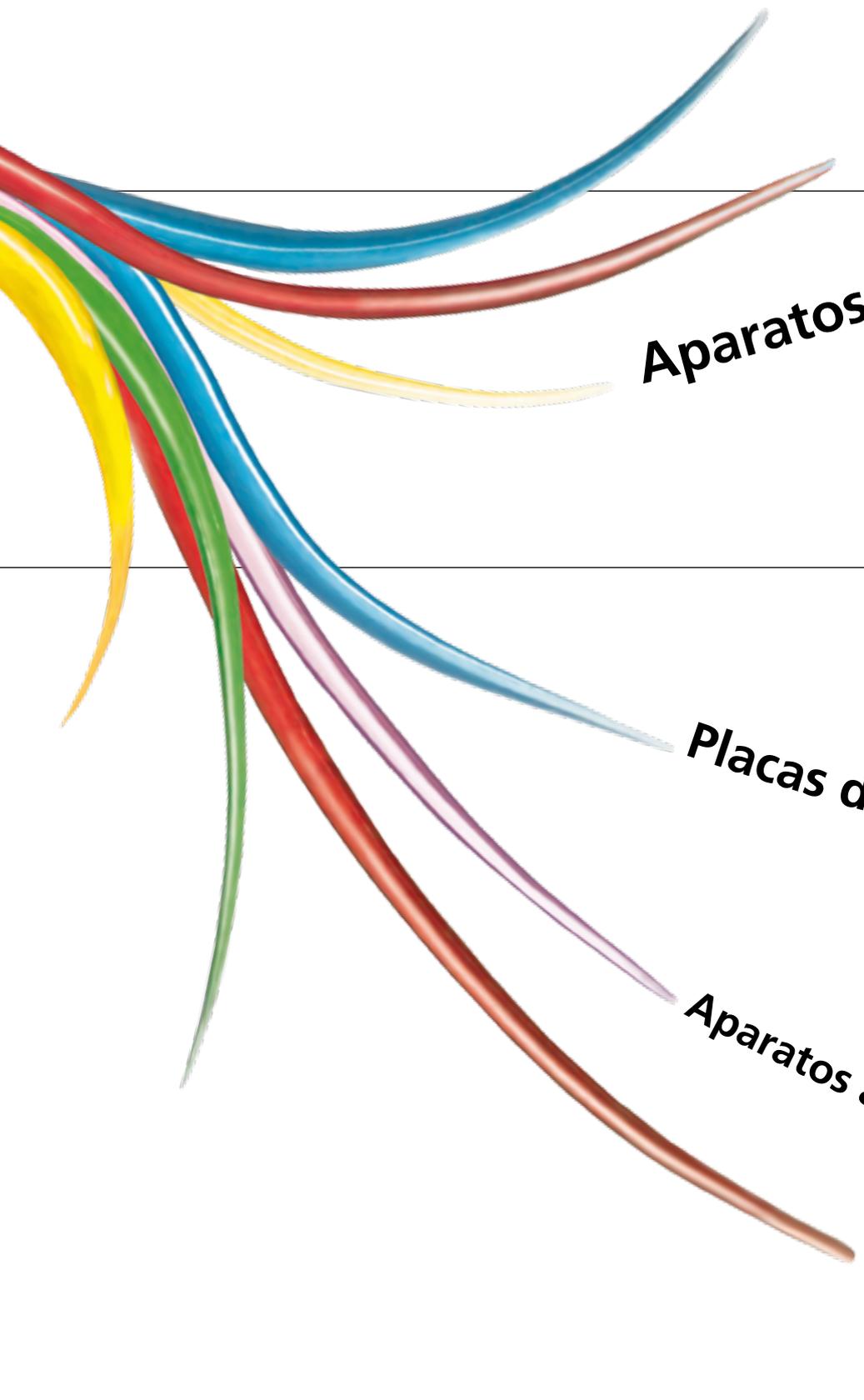

**Aparatos ortodónticos**

**Placas de mordida**

**Aparatos antironquido**

**Férulas de fresado**



## Orthocryl® LC – ¡porque más es más!

Orthocryl® LC está disponible en seis colores vivos. Con los diferentes efectos mica disco y las diversas figuras de la gama de Orthocryl® cada aparato deja adaptarse individualmente a los deseos de los niños o del técnico en cuestión de segundos. Así cada aparato se convierte en una pieza única.





### Orthocryl® LC kit de inicio

**REF 160-400-10**

Contiene 6 cartuchos de Orthocryl® LC (30 g – incoloro, rosa-transparente, rojo, azul, amarillo, verde), 1 inyector, 50 puntas de cartucho y un modo de empleo step by step

### Orthocryl® LC cartuchos singulares y accesorio

Incluido en el kit de inicio

Designación	Color	Cantidad			
Orthocryl® LC, incoloro		30 g	REF 160-401-00		•
Orthocryl® LC, rosa transparente		30 g	REF 160-402-00		•
Orthocryl® LC, rojo		30 g	REF 160-403-00		•
Orthocryl® LC, azul		30 g	REF 160-404-00		•
Orthocryl® LC, amarillo		30 g	REF 160-405-00		•
Orthocryl® LC, verde		30 g	REF 160-406-00		•
Orthocryl® LC pasta de mordida, transparente		50 g	REF 160-410-00		
Orthocryl® LC inyector		1	REF 160-420-00		•
Orthocryl® LC puntas de cartucho		50	REF 160-421-00		•
Barniz aislante		1000 ml	REF 162-800-00		
Orthocryl® LC líquido de limpieza en pulverizador		100 ml	REF 160-430-00		
Orthocryl® LC líquido de limpieza en botella		1000 ml	REF 160-431-00		




# Orthocryl®

El versátil sistema de acrílicos.

## Orthocryl®

La paleta de colores de los acrílicos Orthocryl® abarca desde los colores clásicos hasta los más actuales, como los llamativos colores neón. Además con las diferentes micas disco se consiguen fantásticos efectos, completando el conjunto con los atractivos motivos de figuras. Su creatividad no conoce límites y cada paciente puede experimentar orgulloso un aparato único y exclusivo.

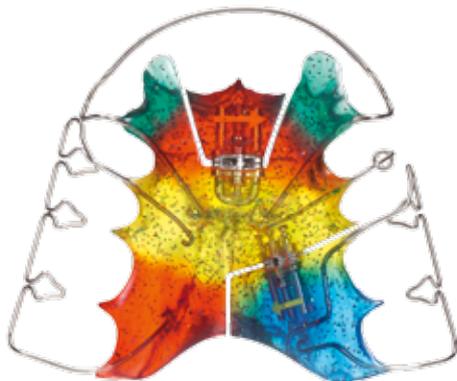

## Orthocryl® black&white

Descubra el mundo de los contrastes con Orthocryl® black & white. El nuevo polvo en blanco y negro Orthocryl® le abre un amplio nuevo campo de posibilidades creativas. La técnica de blanco y negro ofrece un mundo de nuevas ideas para sus placas ortodónticas aún más espectacular que el de color.




El versátil sistema de acrílicos Orthocryl® ha sido un éxito en laboratorios ortodónticos desde hace más de 50 años. Durante varias generaciones se han combinado las excelentes características técnicas con una manipulación extremadamente fácil.

Al trabajar con el sistema acrílico Orthocryl® su creatividad no conoce límites. Ya sea negro, blanco o de color, el sistema de acrílicos Orthocryl® ofrece un extenso programa único y muchos colores vivos.

## Orthocryl® EQ

Las propiedades físicas del componente de polvo Orthocryl® EQ garantizan una fluidez excepcionalmente buena. Por ello, Orthocryl® EQ es especialmente indicado para la técnica de mezcla polvo y líquido. Pero Orthocryl® EQ también se presta para el uso con la técnica de rociado.

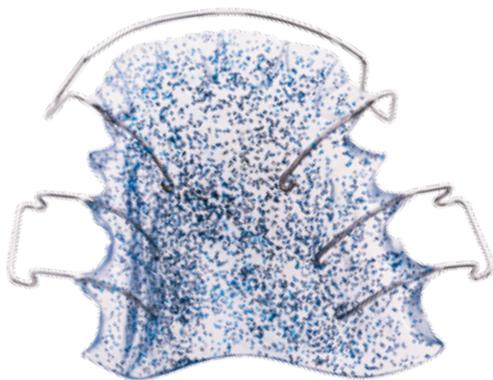

## Orthocryl® LC

Orthocryl® LC está disponible en seis colores vivos. Con los diferentes efectos mica disco y las diversas figuras de la gama de Orthocryl® cada aparato puede adaptarse individualmente a los deseos de los niños o del técnico, en cuestión de segundos. Así cada aparato se convierte en una pieza única.



# Grupo Dentaurem

Alemania | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
y en más de 130 países a nivel mundial.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE

➔ Descubra nuestros productos y servicios en [www.dentaurum.de](http://www.dentaurum.de)

Fecha de la información: 10/14

Reservado el derecho de modificación



[www.dentaurum.de](http://www.dentaurum.de)

**D**  
DENTAURUM

Turnstraße 31 | 75228 Ispringen | Alemania | Teléfono +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295  
[www.dentaurum.de](http://www.dentaurum.de) | [info@dentaurum.de](mailto:info@dentaurum.de)