

tomas[®]-drill 1.0



REF 302-003-10

Gebrauchsinformation

Der **tomas[®]-drill 1.0** darf nur für Pilotbohrungen im Oberkiefer eingesetzt werden. Die Pilotbohrung sollte bei 800 Umin⁻¹ (max. 1500 Umin⁻¹) und mit gekühlter physiologischer Kochsalzlösung erfolgen.

Instructions for use

The **tomas[®]-drill 1.0** is indicated for preparing maxillary pilot sites only. The pilot site should be prepared at 800 Umin⁻¹ (max. 1500 Umin⁻¹) and chilled with physiological saline solution.

Informations d'utilisation

Le **tomas[®]-drill 1.0** ne doit être utilisé que pour un premier forage au niveau de la mâchoire supérieure. Le forage doit être effectué à une vitesse de 800 Umin⁻¹ (1500 Umin⁻¹ max.) et en utilisant un sérum physiologique à base d'une solution de chlorure de sodium frais.

Información para el uso

La fresa **tomas[®]-drill 1.0** debe ser utilizada solamente para perforaciones piloto en el maxilar. La perforación piloto debe realizarse a 800 Umin⁻¹ (máx. 1500 Umin⁻¹) y con una solución fisiológica refrigerada de sal común.

Informazioni d'uso

La **tomas[®]-drill 1.0** deve essere impiegata esclusivamente per creare il foro pilota nel mascellare superiore. Il foro pilota deve essere eseguito a 800 Umin⁻¹ (max. 1500 Umin⁻¹) e con soluzione fisiologica salina raffreddata.

D
DENTAURUM