

hyrax<sup>®</sup>hyrax<sup>®</sup>  clickhyrax<sup>®</sup>  neo

Des écarteurs pour tous les cas.

Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes IIa. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.


Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

  
DENTAURUM

## Les vis **hyrax®** et **hyrax® neo**

(Hygienic Rapid Expansion Screw) sont des écarteurs spéciaux pour la disjonction rapide de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

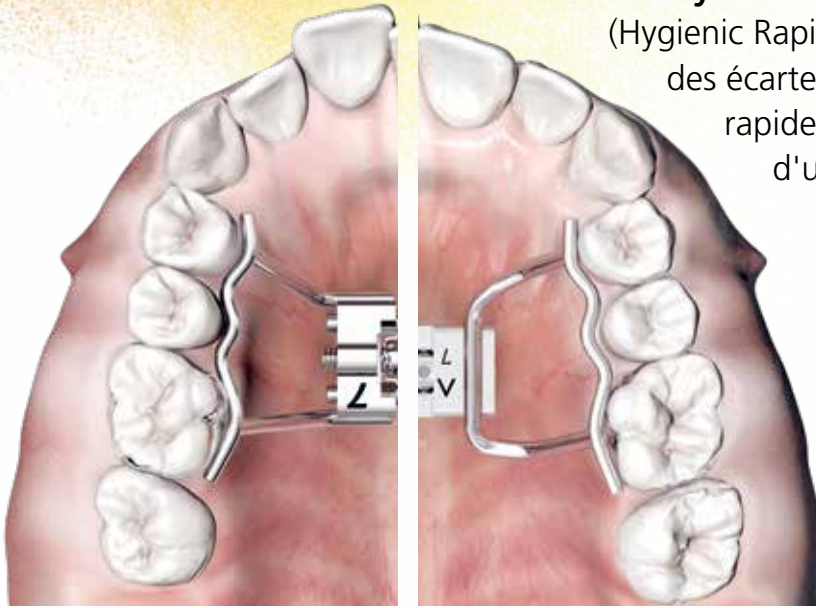



**hyrax®**  
**hyrax® click**



**hyrax® neo**



Les vis **hyrax®** doivent « flotter » env. 1 à 2 mm au-dessus de la voûte palatine. Bien veiller au parallélisme de l'appareil par rapport au plan d'occlusion, afin de prévenir tout effet de levier.

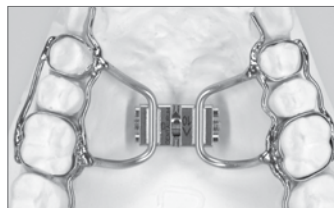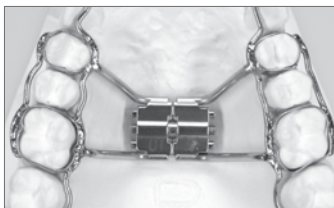

Les vis sont soudées ou brasées au moyen de leurs bras de rétention sur des bagues préformées. Pour un cintrage plus facile des bras de rétention, nous recommandons la clé de cintrage universelle (REF 611-122-00), sans l'usage de pinces supplémentaires.

### Clé de cintrage universelle

REF 611-122-00

Pour un cintrage facile et non agressif des bras de rétention




### Clé de sûreté

REF 611-120-01

Pour toutes les vis Dentaurum **hyrax®**.  
Pour activer facilement les écarteurs chez les porteurs d'appareils fixes.

# Vous avez le choix !

Trouvez le disjoncteur palatin qui convient à votre façon de travailler !

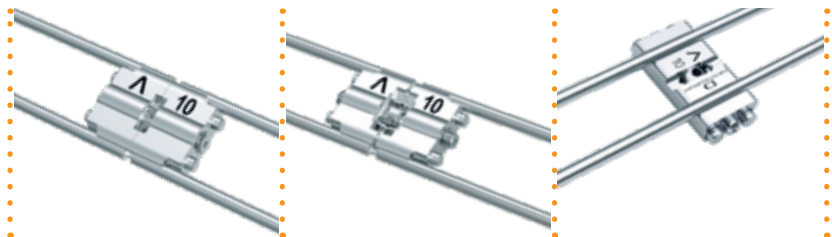

hyrax®

hyrax® **click**

hyrax® **neo**

## Corps solide

Grande stabilité même lorsque l'activation est complète.

•

•

•

## Guidage stable

Conception optimale des tiges de guidage.

•

•

•

## Cintrage facile

Bras de rétention solides, cintrage peu encombrant des bras grâce à un corps d'écarteur étagé.

•

•

•

## Blocage par butée

Empêche la dislocation de la vis.

•

•

•

## Design TAD optimisé

Alignement parallèle des bras de rétention par rapport à la suture palatine.

•

## Système anti-retour click breveté

Le frein de vis idéal pendant la phase active de traitement. Enclenchement audible et perceptible à chaque 1/4 de tour.

•

## Haut degré de sécurité.

Tant pour le praticien que pour le patient.

•

•

•

## Marquage laser

Flèche indiquant le sens de rotation et expansion maximale.

•

•

•

## Variantes disponibles

Sans bras

•

•

•

Avec bras droits

•

•

•

Avec bras recourbés

•

•

•

# Gamme disponible

## hyrax®

Produit	sans bras	bras droits	bras recourbés	Quantité
hyrax® Mini – 7 (expansion 7 mm)	602-800-12	602-800-10	602-801-10	1
	602-800-32	602-800-30	602-801-30	10
	–	602-800-50	602-801-50	50
hyrax® Medium – 10 (expansion 10 mm)	602-808-12	602-808-10	602-840-10	1
	602-808-32	602-808-30	602-840-30	10
	–	602-808-50	602-840-50	50
hyrax® Maxi – 12 (expansion 12 mm)	602-811-12	602-811-10	602-812-10	1
	602-811-32	602-811-30	602-812-30	10
	–	602-811-50	602-812-50	50

## hyrax® click

Produit	sans bras	bras droits	bras recourbés	Quantité
hyrax® click Mini – 7 (expansion 7 mm)	602-830-12	602-830-10	602-831-10	1
	602-830-32	602-830-30	602-831-30	10
	–	602-830-50	602-831-50	50
hyrax® click Medium – 10 (expansion 10 mm)	602-832-12	602-832-10	602-833-10	1
	602-832-32	602-832-30	602-833-30	10
	–	602-832-50	602-833-50	50
hyrax® click Maxi – 12 (expansion 12 mm)	602-834-12	602-834-10	602-835-10	1
	602-834-32	602-834-30	602-835-30	10
	–	602-834-50	602-835-50	50

## hyrax® neo

Produit	sans bras	bras droits	Quantité
hyrax® neo Mini – 7 (expansion 7 mm)	602-845-12	602-845-10	1
	602-845-32	602-845-30	10
	–	602-845-50	50
hyrax® neo Medium – 10 (expansion 10 mm)	602-846-12	602-846-10	1
	602-846-32	602-846-30	10
	–	602-846-50	50
hyrax® neo Maxi – 12 (expansion 12 mm)	602-847-12	602-847-10	1
	602-847-32	602-847-30	10
	–	602-847-50	50

## Titan hyrax®

Produit	sans bras	bras droits	Quantité
Titan hyrax® Maxi – 12 (expansion 12 mm)	602-810-12	602-810-10	1
	602-810-32	602-810-30	10

Sachet (1 pièce / 50 pièces) avec 1 clé de sûreté / sachets (10 pièces) avec 10 clés de sûreté

Produit	REF	Quantité
Clé de sûreté	611-120-01	10 pièces
Clé de cintrage universelle	611-122-00	1 pièce

Mise à jour : 08/21

Sous réserve de modifications

**D**  
DENTAURUM