

Instructions d'utilisation: Nacera® Classic Liquid

Colorer la zircone préfrittée

Note générale

Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser Nacera® Classic Liquid. Elles comportent des renseignements importants pour un traitement conforme et pour assurer la sécurité du patient et de l'utilisateur. Nacera® Classic Liquids sont produits et testés selon les normes de qualité les plus élevées. Pour assurer ce même niveau de qualité supérieure dans vos restaurations finales, les instructions d'utilisation doivent être strictement respectées.

Consignes de sécurité

Un équipement de sécurité personnel, en particulier des lunettes et des gants de sécurité, doit être porté pendant la manipulation du Nacera® Classic Liquid. **Risque pour la santé!** Nocif si ingéré. Provoque des brûlures cutanées et des lésions oculaires graves. Peut provoquer une irritation respiratoire. Évitez de respirer la poussière / les fumées / les gaz / les fines gouttelettes / les vapeurs / les pulvérisations. EN CAS DE PROJECTION DANS LES YEUX : rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer le cas échéant les lentilles de contact si cela est facile. Continuer à rincer. Le liquide est impropre à la consommation. Il ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères ou dans les égouts. Vous trouverez des informations concernant la sécurité sur la fiche de données de sécurité.

Stockage et durée de conservation

La date de péremption et le numéro de lot sont visibles sur la bouteille / l'emballage d'origine. Nacera® Classic Liquid doit être stocké dans un endroit frais dans son emballage d'origine. La plage de températures de stockage idéale s'étend de 5 °C à 30 °C. Le liquide doit être protégé du rayonnement solaire direct.

Nacera® Classic Liquid a une durée de conservation de 24 mois dans son flacon «non ouvert». Le liquide doit être utilisé dans les 12 mois suivant l'ouverture. Toujours bien agiter avant chaque utilisation!

Indications et utilisation prévue

Nacera® Classic Liquid est une solution de coloration pour l'oxyde de zirconium blanc préfritté, spécialement pour Nacera® Pearl 1. De plus, vous pouvez créer des détails plus fins et des nuances sur la zircone préteintée, comme Nacera® Multi-Shade ou Nacera® Pearl Shaded. Gardez à l'esprit que vous pouvez ajouter seulement des nuances plus foncées que le chroma préteinté.

Application

Avant de colorer avec le Nacera® Classic Liquid, utiliser une brosse et de l'air comprimé pour retirer toute la poussière de zircone des éléments. Assurez-vous qu'il n'y a pas de traces de particules métalliques sur la zircone à colorer. Utilisez uniquement des brucelles en plastique pour l'immersion.

Pour éviter une contamination, utilisez Nacera® Classic Liquid, avec des pinces sans métal.

Toujours bien agiter les flacons avant utilisation!

Pré-séchage

Après la coloration avec Nacera® Classic Liquid, la zircone préfrittée doit être pré-séchée avant le frittage pour éviter la formation de points (homogénéisation) et réduire le risque de fissures sur les grandes infrastructures (une masse plus importante retient davantage de liquide qui prendra plus de temps à sécher avant le frittage.) Équipement adapté pour le pré-séchage : déshydrateur, mini-four.

 Éviter les lampes à infra-rouges. Généralement, les lampes à infra-rouges n'atteignent pas la température de séchage recommandée. C'est pourquoi, quand on utilise des lampes à infra-rouges, le temps de séchage doit être rallongé en conséquence.

Frittage

Quand vous utilisez Nacera® Classic Liquid, frittez toujours les couronnes en zircone selon les cycles de frittage mentionnés dans les instructions pour le Nacera® Pearl.

Veuillez noter

Pour éviter de perdre en translucidité, évitez de friter des infrastructures en oxyde de zirconium 3Y-TZP-A opaques et 3Y-TZP et 5Y-TZP/6Y-TZP (cubique) très translucides ensemble sur un même support! Le support de frittage avec les billes de frittage doivent être utilisés seulement pour la zircone très translucide, pas pour l'oxyde de zirconium opaque. Les 3Y-TZP-A et 3Y-TZP peuvent être frittés ensemble en une seule opération de frittage sur des supports de frittage séparés et empilés.

Autres symboles sur le produit

Symbole	Signification
	Référence du catalogue
	Numéro de lot
	Fabricant
	Consulter les instructions d'utilisation
	Date de fabrication
	Risque pour la santé / pour la couche d'ozone
Rx Only	Usage réservé aux professionnels.

Instructions d'utilisation: Nacera® Classic Liquid

Colorer la zircone préfrittée

Technique d'application au pinceau, restaurations antérieures

IMPORTANT : UTILISEZ UNIQUEMENT UN PINCEAU SANS MÉTAL	1				
	2				
	3				
	4		ou		
	5				
	6		si nécessaire		
	7	Séchage	15 - 45 Min.		
	Si vous utilisez une teinte différente, lavez les pinceaux à l'eau distillée et séchez-les avec un tissu doux.				



Vous préférez un didacticiel vidéo ? Rendez-vous sur notre chaîne YouTube ! www.youtube.com - Chercher «Nacera Inside» ou scannez le code QR.



Si vous préférez une autre langue, veuillez scanner le code QR ci-dessous ou rendez-vous sur doceram-medical.com/en/downloads/

Instructions d'utilisation: Nacera® Classic Liquid

Colorer la zircone préfrittée

Technique d'application au pinceau, restaurations postérieures

IMPORTANT : UTILISEZ UNIQUEMENT UN PINCEAU SANS MÉTAL	1				
	2				
	3				
	4		ou		
	5				
	6		si nécessaire		
	7	Séchage	15 - 45 Min.		
	Si vous utilisez une teinte différente, lavez les pinceaux à l'eau distillée et séchez-les avec un tissu doux.				



Vous préférez un didacticiel vidéo ? Rendez-vous sur notre chaîne YouTube ! www.youtube.com - Chercher «Nacera Inside» ou scannez le code QR.




Si vous préférez une autre langue, veuillez scanner le code QR ci-dessous ou rendez-vous sur doceram-medical.com/en/downloads/

Instructions d'utilisation: Nacera® Classic Liquid

Colorer la zircone préfrittée

Technique de trempage

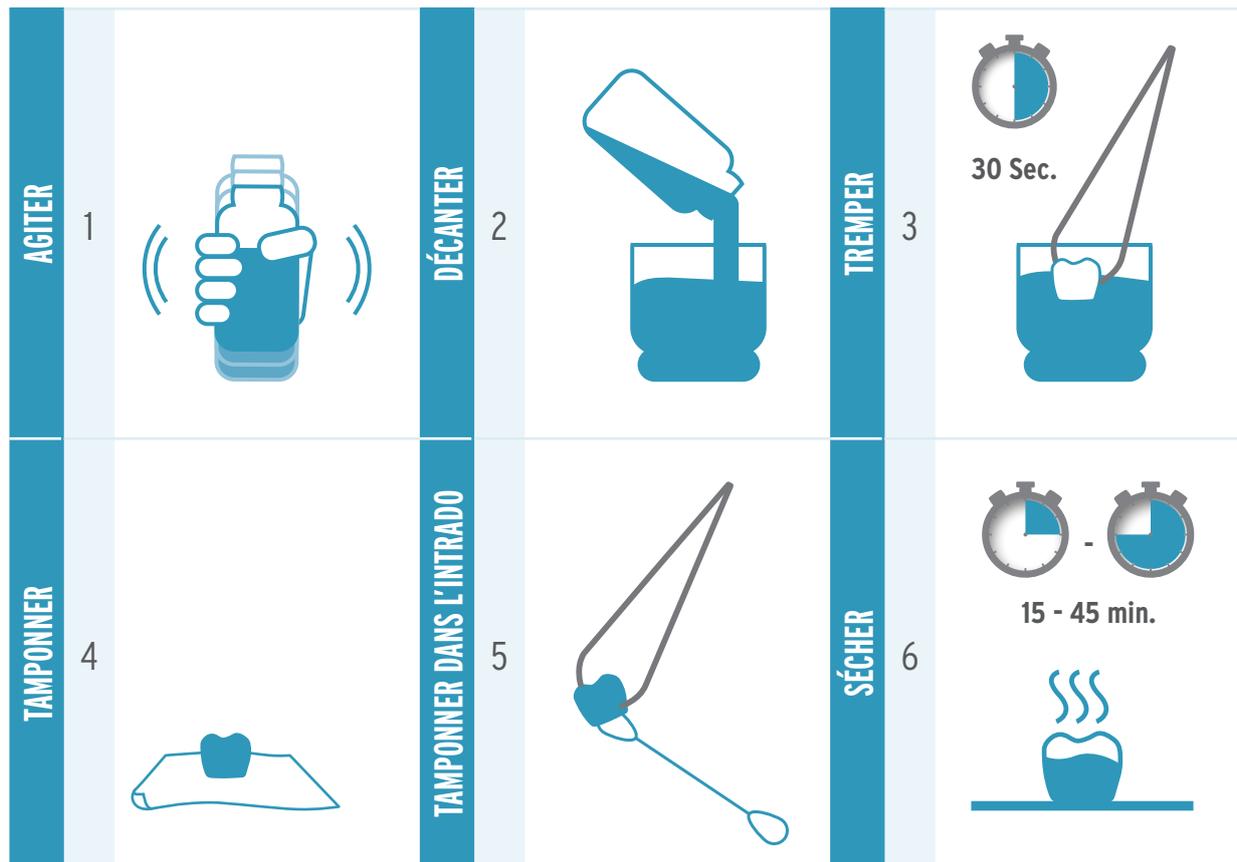

Pontiques

Si vous utilisez la technique de trempage, les pontiques et les autres zones de masse importante de zircone auront un chroma intensifié. Appliquez **Nacera® Classic Liquid Balancer** une seule fois légèrement au pinceau avant de tremper dans le **Nacera® Classic Liquid Body**. Pourquoi ? Pendant le trempage, les bridges et les masses importantes de zircone absorberont davantage de pigments de coloration.

Nacera® Classic Liquid Balancer va pré-saturer ces zones pour créer un équilibre du chroma entre les pontiques et les piliers.



Zones incisales et occlusales

Appliquez **Nacera® Classic Liquid Enamel** sur les zones incisales et de crêtes avant le trempage dans **Nacera® Classic Liquid Body**. Utilisez la technique d'application au pinceau pour appliquer **Nacera® Classic Liquid Enamel** 1 à 2 fois sur le 1/3 incisal ou trempez seulement la zone incisale ou occlusale de la restauration dans du **Nacera® Classic Liquid Enamel** pendant 10 secondes.



Utilisation de Enamel II et Enamel I

Utilisez **Nacera® Classic Liquid Enamel II** pour Vita Shade A4, C4 et D4. Pour toutes les autres Vita Shades, utilisez **Nacera® Classic Liquid Enamel I**.



Vous préférez un didacticiel vidéo ? Rendez-vous sur notre chaîne YouTube ! www.youtube.com - Chercher «Nacera Inside» ou scannez le code QR.



Si vous préférez une autre langue, veuillez scanner le code QR ci-dessous ou rendez-vous sur doceram-medical.com/en/downloads/