


Protocollo chirurgico

CITO mini®

Protocollo chirurgico per impianti CITO mini® con strumenti dedicati in funzioni delle diverse qualità d'osso.

Da adattare in funzione delle indicazioni e della iniziale situazione presentata dal paziente.
L'inserzione degli impianti CITO mini® in osso morbido non è indicata.

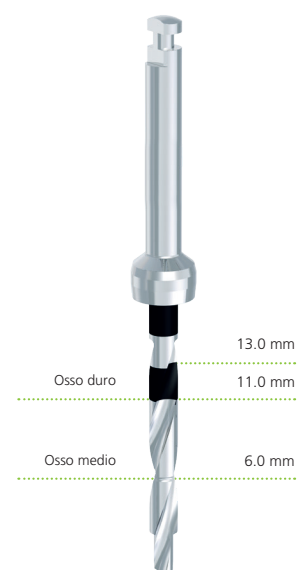

		Osso morbido	Osso medio	Osso duro
		 $\varnothing 1.8^3$	 $\varnothing 2.2$	 $\varnothing 2.5$
Fresa per marcare ²		X	X	X
Fresa pilota per $\varnothing 1.8$ mm ¹			almeno 6.0 mm	X
Fresa pilota per $\varnothing 2.2$ mm ¹			almeno 6.0 mm	X
Fresa pilota per $\varnothing 2.5$ mm ¹			almeno 6.0 mm	X

L'inserzione degli impianti CITO mini® in osso morbido non è indicata.

¹ La profondità d'inserzione / lunghezza della fresa pilota deve essere regolata in funzione della stabilità primaria che si intende raggiungere rispetto alla qualità ossea. Le tacche di profondità sono utili anche per evitare lesioni delle adiacenti strutture (ad esempio nervose) causate da perforazioni troppo profonde.

² Impiego facoltativo.

³ Non previsto per riabilitazioni nell'arcata superiore.

⁴ Facoltativamente, in presenza di osso molto duro, può essere necessario l'uso della fresa pilota di diametro maggiore per la perforazione della corticale.