

## Smart Features

**Bond**<sup>®</sup>

Instruction Booklet

- ◆ härtet unter Feuchtigkeitseinfluss  
*moisture activated*
- ◆ kann in Verbindung mit Metall-, Kunststoff- oder Keramikbrackets verwendet werden  
*can be used with metal, plastic and ceramic brackets*
- ◆ haftet auf Komposit- und Keramikmaterialien  
*bonds to composite and porcelain materials*
- ◆ kein unangenehmer Geruch oder Geschmack für den Patienten  
*no bad taste or smell for the patient*
- ◆ farbstabil  
*no discoloration throughout treatment*

REF 163-506-00

**SmartBond<sup>®</sup> Mini-Kit**  
Einkomponenten-Bracketadhäsiv in Spritzen

### Sortiments-Inhalt

1 x Adhäsiv in Spritze, 3 g  
1 x Ätzelgel in Spritze, 6 g  
25 x Pinsel  
20 x Kanülen (Luer-lock tips)  
1 x Mischblock  
1 x Gebrauchsanweisung

### WARNHINWEIS:

Verklebt die Haut in Sekunden.  
Zusatz:  
Nicht in die Augen bringen. Bei  
Verklebung der Haut oder Augen-  
kontakt sofort den Arzt aufsuchen.

Manufactured by:  
Gestenco International AB  
P O Box 24067, SE-40022 Gothenburg, Sweden  
Phone +46 31 81 00 35, Fax +46 31 81 46 55  
info@gestenco.com, www.gestenco.com

**SmartBond<sup>®</sup> Mini kit**  
One component bracket adhesive

### Kit contents:

1 x adhesive in syringe, 3 g  
1 x etching gel in syringe, 6 g  
25 x brushes  
20 x luer-lock tips  
1 x mixing pad  
1 x instruction for use booklet

### WARNING:

Bonds skin in seconds.  
Avoid contact with eyes.  
In case of bonding skin or  
contact with eyes immediately  
get medical attention.

Distributed by:  
**D**  
**DENTAURUM**  
Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany  
Telefon +49 72 31/803-550 | Fax +49 72 31/803-295  
www.dentaurum.de | info@dentaurum.de

CE  
0470

989-528-60 Printed by Dentaurum Germany 06/15/BR1-4

**SmartBond<sup>®</sup>**  
Gebrauchsanweisung Instruction Booklet


## Smart Bond -

- ◆ eine völlig neue Methode, um Brackets zu kleben  
*a completely new approach to bonding*
- ◆ biokompatibel  
*biocompatible*
- ◆ allergiegetestet  
*allergy-tested*
- ◆ Kleben in einem Schritt, ohne Licht, ohne Primer  
*true "one-step", no light, no primers*
- ◆ wet bonding: haftet auf feuchten Oberflächen  
*wet bonding: bonds to wet surface*

**Smart**


Gebrauchsanweisung

## Klebeanweisung Bonding Instructions

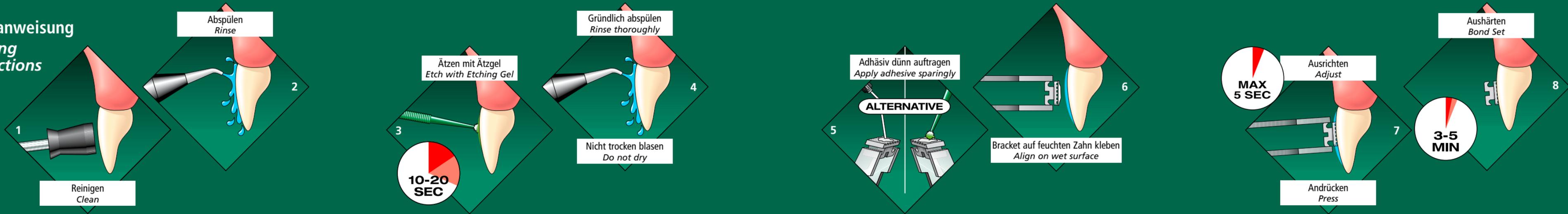


## Material- handhabung Dispensing Instructions

1 Kolben drehen  
Twist handle

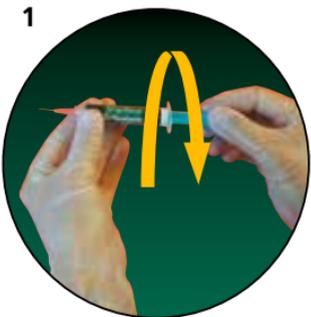

2 Kolben vorsichtig drücken, um Adhäsiv zu entnehmen  
Push handle gently to dispense adhesive

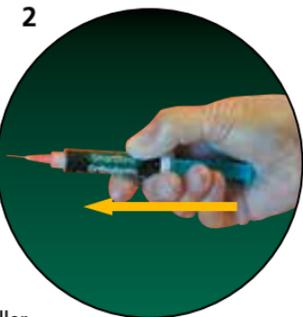


Mit dem Handteller ...  
With your palm ...



... oder mit dem Daumen  
... or with your thumb

3 Kolben zurückziehen, um Nachfließen zu vermeiden. Dabei keine Luft in die Spritze ziehen  
Pull back handle to stop afterflow. Avoid air into the syringe

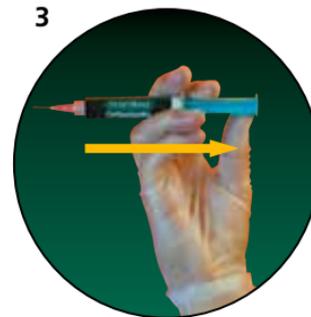

Luftblase ?  
Air pocket ?



4 Falls Luftblase vorhanden, diese vorsichtig durch Drücken des Kolbens entfernen  
If air pocket - carefully push out air with handle

