



# Quick Guide Speed Sintern

Nacera® Pearl / Pearl Shaded / Pearl Multi-Shade

**in 90 min!**

*Vollanatomische Einzelkrone*



WANDSTÄRKE KRONE

AUFHEIZ-/ ABKÜHL-RATE

HALTEZEIT

0.50 mm - 2.00 mm

60/40 °C/ min.

30 min.



- Die Biegefestigkeit von Kronen nach dem Speed Sintern entspricht der Biegefestigkeit von Kronen, die standardmäßig gesintert werden.
- Nur eine Sinterschale pro Speed Sinter Zyklus verwenden.
- Für bis zu 7 Kronen bei Ø 65 mm und bis zu 16 Kronen bei Ø 100 mm.
- Evaluiert auf DEKEMA 674i.
- Auch mit **Nacera® Blue X** anwendbar.

