

Für Ihre Fragen zur Verarbeitung unserer Produkte steht Ihnen unser Customer Support gerne zur Verfügung.

Hotline Tel.-Nr. Festsitzende Technik +49 72 31 / 803-550
Hotline Tel.-Nr. Herausnehmbare Technik +49 72 31 / 803-555

Telefonische Auftragsannahme +49 72 31 / 803-210



Mehr Informationen zu Dentaaurum-Produkten
finden Sie im Internet.

www.dentaaurum.de

Stand der Information:
Date of information:
Mise à jour :
Fecha de la información:
Data dell'informazione:

12/12


982-601-20 Printed by Dentaaurum Germany 12/12



CE

discovery[®]
.pearl




Debonding-Instrument
Debonding instrument
Instrument de dépoue
Instrumento para Debonding
Strumento per il debonding

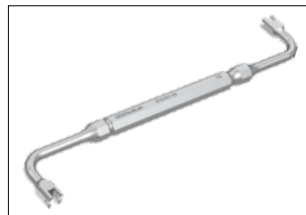

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Modo de empleo
Modalità d'uso

D
DENTAURUM

D
DENTAURUM

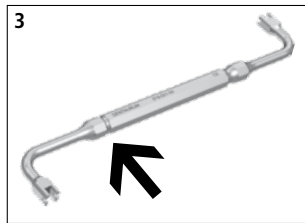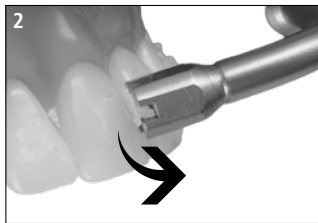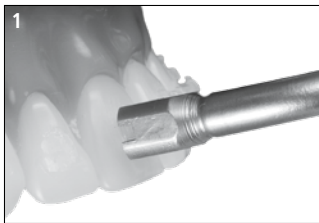

DE

Körperhafte Umfassung des Brackets bis zur Basis.

Ablösen des Brackets durch leichtes seitliches Kippen in Slot- bzw. Bogenverlaufsrichtung.

Abnahme der OK 2er Brackets mit „Rillen-Seite“.

EN

Engage the entire body of the bracket down to the base.

Debond the bracket by tilting it slightly sideways along the horizontal axis.

The "grooved" side is used for debonding brackets from upper laterals.

FR

Bien agripper le bracket jusqu'à la base.

Désolidariser le bracket en faisant un léger mouvement de bascule dans le sens de l'axe horizontale.

Dépose des brackets d'incisives latérales avec le côté « strié ».

ES

Abarcar por completo el cuerpo del bracket hasta la base.

Desprender el bracket mediante ligera inclinación lateral en el slot o en dirección del transcurso del arco.

Desmontaje de los segundos brackets incisivos con el lado "estriado".

IT

Preso in toto del bracket fino alla base.

Rimozione del bracket con una leggera rotazione laterale in direzione dello slot.

Rimozione del bracket laterale superiore con il lato „scanalato“ dello strumento.