

hyrax®


hyrax®  click

hyrax®  neo



Tornillos de expansión para toda necesidad.

Los tornillos **hyrax®** y **hyrax® neo**
(Hygienic Rapid Expansion Screw)
son tornillos de expansión especiales
para la expansión palatina rápida
mediante aparatos fijos.

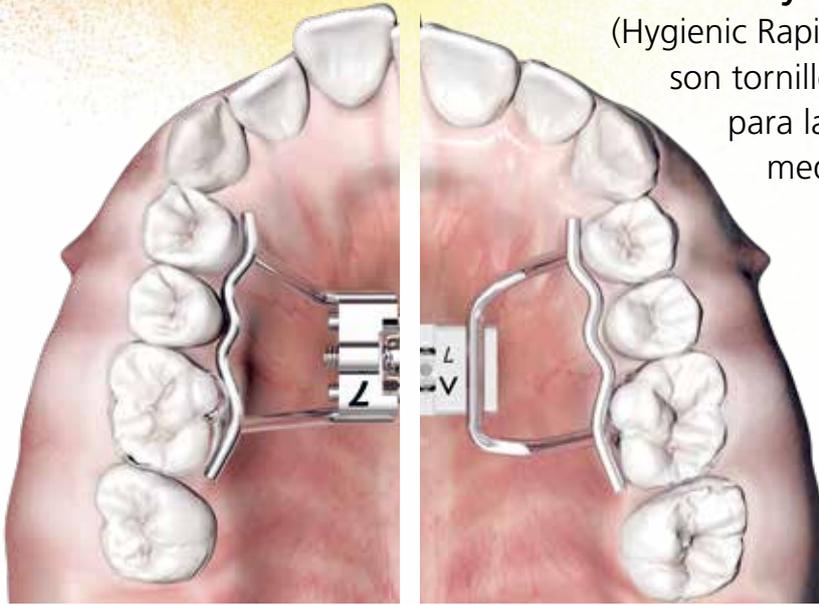


hyrax®
hyrax® **click**



hyrax® **neo**



Los tornillos hyrax® deben quedar "suspendedos" al menos 1-2 mm sobre la bóveda palatina. Para evitar efectos de palanca, debe tenerse en cuenta la posición paralela al plano oclusal.

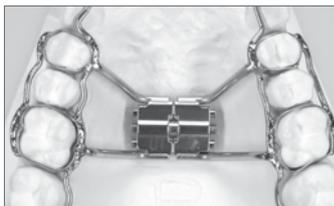

Se sueldan mediante sus brazos de retención sobre las bandas preformadas. Para doblar con facilidad los brazos de retención, recomendamos la llave universal para doblar (REF 611-122-00) sin necesidad de utilizar alicates adicionales.

Llave universal para doblar

REF 611-122-00
Para doblar con facilidad y
cuidado los brazos de retención




Llave de seguridad

REF 611-120-01
Apropiada para todos los tornillos Dentaaurum hyrax®.
Para la activación segura de los tornillos de expansión en
pacientes con aparatos fijos.

¡Usted decide!

Encuentre el tornillo RPE ideal para su método de trabajo.

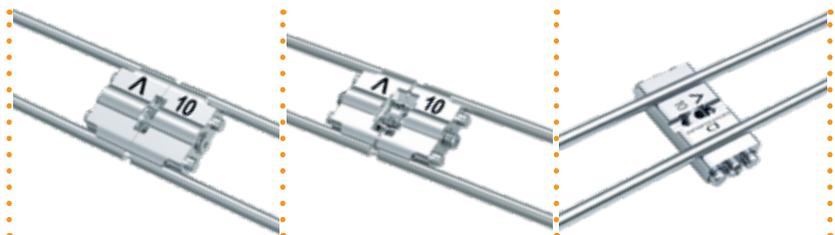

hyrax®

hyrax® **click**

hyrax® **neo**

Cuerpo resistente

Elevada estabilidad incluso con activación completa

•

•

•

Guía estable

Pernos guía con un diseño óptimo

•

•

•

Fácil de doblar

Brazos de retención resistentes a la rotura, posibilidad de doblar los brazos ahorrando espacio gracias al cuerpo del tornillo escalonado

•

•

•

Limitación del recorrido de expansión

Evita que el tornillo se desmonte

•

•

•

Diseño optimizado para TAD

Brazos de retención paralelos a la sutura mediopalatina

•

Seguro antirretrogiro "click" patentado

Seguridad total del tornillo durante la fase activa del tratamiento. Engaste perceptible tras cada cuarto de giro

•

Gran nivel de seguridad

Tanto para el profesional como para el paciente

•

•

•

Marcas láser

Flecha de dirección de giro y recorrido de expansión máximo

•

•

•

Versiones disponibles

Sin brazos

•

•

•

Con brazos rectos

•

•

•

Con brazos acodados

•

•

•

Gama de productos

hyrax®

Producto	Sin brazos	Brazos rectos	Brazos acodados	Cantidad
hyrax® Mini – 7 (expansión 7 mm)	602-800-12	602-800-10	602-801-10	1
	602-800-32	602-800-30	602-801-30	10
	–	602-800-50	602-801-50	50
hyrax® Medium – 10 (expansión 10 mm)	602-808-12	602-808-10	602-840-10	1
	602-808-32	602-808-30	602-840-30	10
	–	602-808-50	602-840-50	50
hyrax® Maxi – 12 (expansión 12 mm)	602-811-12	602-811-10	602-812-10	1
	602-811-32	602-811-30	602-812-30	10
	–	602-811-50	602-812-50	50

hyrax® click

Producto	Sin brazos	Brazos rectos	Brazos acodados	Cantidad
hyrax® click Mini – 7 (expansión 7 mm)	602-830-12	602-830-10	602-831-10	1
	602-830-32	602-830-30	602-831-30	10
	–	602-830-50	602-831-50	50
hyrax® click Medium – 10 (expansión 10 mm)	602-832-12	602-832-10	602-833-10	1
	602-832-32	602-832-30	602-833-30	10
	–	602-832-50	602-833-50	50
hyrax® click Maxi – 12 (expansión 12 mm)	602-834-12	602-834-10	602-835-10	1
	602-834-32	602-834-30	602-835-30	10
	–	602-834-50	602-835-50	50

hyrax® neo

Producto	Sin brazos	Brazos rectos	Cantidad
hyrax® neo Mini – 7 (expansión 7 mm)	602-845-12	602-845-10	1
	602-845-32	602-845-30	10
	–	602-845-50	50
hyrax® neo Medium – 10 (expansión 10 mm)	602-846-12	602-846-10	1
	602-846-32	602-846-30	10
	–	602-846-50	50
hyrax® neo Maxi – 12 (expansión 12 mm)	602-847-12	602-847-10	1
	602-847-32	602-847-30	10
	–	602-847-50	50

Titan hyrax®

Producto	Sin brazos	Brazos rectos	Cantidad
Titan hyrax® Maxi – 12 (expansión 12 mm)	602-810-12	602-810-10	1
	602-810-32	602-810-30	10

Paquetes (1 pieza / 50 piezas) con 1 llave de seguridad / paquetes (10 piezas) con 10 llaves de seguridad

Producto	REF	Cantidad
Llave de seguridad	611-120-01	10 piezas
Llave de seguridad universal	611-122-00	1 pieza

Fecha de la información: 07/21

Reservado el derecho de modificación

D
DENTAURUM