



N

E


W

S

da
Esprident

Nuovi prodotti · Vol. 2

Dentine Chroma Triceram®

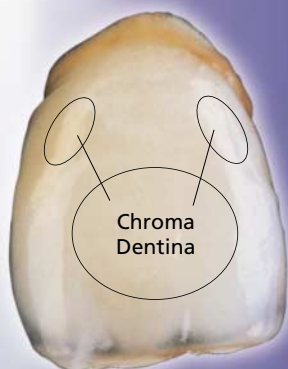

Per incrementare l'intensità di colore nel corpo del dente

Perfetta armonia cromatica

Utilizzando le nuove dentine Chroma Triceram® è possibile aumentare la saturazione del colore della ceramica.

- Incremento dell'intensità di ciascun croma
- Aumento dell'intensità cromatica nel corpo del dente anche in presenza di grossi spessori
- Perfetta armonia del colore della ceramica

Confezioni:

Dentina Chroma A	15 g	No.ord. 294-410-30
Dentina Chroma B	15 g	No.ord. 294-420-30
Dentina Chroma C	15 g	No.ord. 294-430-30

Liquido di modellazione UNIVERSALE LV+



Maggiore brillantezza di colore

**Utilizzabile con tutti i sistemi di ceramica
Esprident**

NOVITÀ: Il liquido di modellazione LV oggi si chiama liquido LV+.


Con il nuovo „liquido di modellazione universale LV+“ di Esprident è possibile stratificare la ceramica in modo molto più semplice e sicuro di prima.

- Con il nuovo liquido LV+ la contrazione delle masse viene ridotta al minimo.
- Additivi di nuova concezione mantengono le masse umide più a lungo mantenendole ottimali per tutto il tempo necessario alla stratificazione.
- Le masse miscelate conservano una ideale consistenza e la modellazione risulta stabile e compatta. Il risultato sono strutture omogenee e colori brillanti.

Confezioni:

Liquido di modellazione LV+	20 ml	No.ord. 299-160-40
Liquido di modellazione LV+	100 ml	No.ord. 299-160-80
Liquido di modellazione LV+	500 ml	No.ord. 299-160-99

Dentine intensive Fluo per Tricer

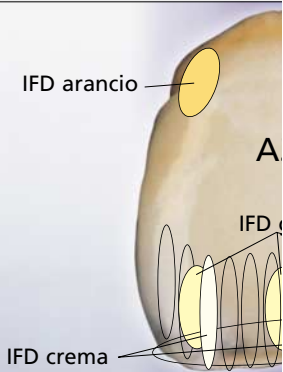

Per incrementare la luminosità nel corpo del dente

Dentine fluorescenti

Con le nuove dentine intensive Fluo per Triceram® e CCS è possibile creare singole caratterizzazioni luminose nella ceramica. Grazie alla forte fluorescenza di queste masse, è possibile far risaltare queste caratteristiche soprattutto in condizioni di luce naturale.

Sotto una fonte luminosa agli UV la luminosità di queste masse fluorescenti è particolarmente visibile se paragonata alle normali dentine.

- Marcato modificatore fluorescente
- Per aumentare il grado di luminosità nella ceramica
- Le dentine intensive Fluo CCS sono completamente compatibili con il sistema di ceramica CARMEN®.

am® e CCS



Confezioni:

Triceram®:

Dentina intensiva Fluo crema	15 g	No.ord. 294-751-30
Dentina intensiva Fluo gialla	15 g	No.ord. 294-760-30
Dentina intensiva Fluo arancio	15 g	No.ord. 294-770-30
Dentina intensiva Fluo arancio plus	15 g	No.ord. 294-773-30

CCS:

Dentina intensiva Fluo crema	20 g	No.ord. 274-751-40
Dentina intensiva Fluo gialla	20 g	No.ord. 274-760-40
Dentina intensiva Fluo arancio	20 g	No.ord. 274-770-40

Liner Triceram®

Adesione ottimale

Nuove intensità di colore

con effetto fino dalla profondità

Con i nuovi Liner Triceram® di Esprident è possibile conferire al manufatto protesico grande profondità e naturalezza. Infatti, grazie all'intensa colorazione, i Liner Triceram® mascherano alla perfezione la bianca struttura in zirconio, costituendo la base per un rivestimento estetico altamente estetico.



Caratteristiche particolari

- Risultati estetici elevatissimi grazie alla possibilità di conferire il colore sin dalla prima stratificazione, con un effetto di grande naturalezza.
- Sempre maggiore corrispondenza alla scala colori VITA* con evidente semplificazione delle fasi di lavoro.
- Ottima riproducibilità cromatica con l'ausilio di sole 6 masse.
- Altissima compatibilità tra la ceramica Triceram® e l'ossido di zirconio, data dalle ottime caratteristiche tecniche.
- Ottimale adesione tra struttura in ossido di zirconio e rivestimento ceramico.

* VITA è un marchio registrato della ditta VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Liner Triceram®

Semplici e veloci

Colorazione individuale del dente



grazie alla combinazione di colore

Con solo sei colori di base è possibile ottenere tutte le combinazioni cromatiche della scala VITA*. Miscelando tra loro i **Liner Triceram®** nelle corrette proporzioni (vedi tabella) con lo speciale liquido **Universale B.O.L.**, è possibile conseguire la colorazione desiderata.



Consigli di miscelazione

Colore dente	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6
A1	1/3				2/3	
A2	2/3				1/3	
A3	1					
A3,5	3/4					1/4
A4	1/2					1/2
B1		1/3			2/3	
B2		2/3			1/3	
B3		3/4			1/4	
B4		1				
C1			1/3		2/3	
C2			2/3		1/3	
C3			3/4		1/4	
C4			1			
D2				2/3	1/3	
D3				3/4	1/4	
D4		1/3		2/3		

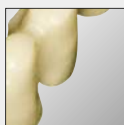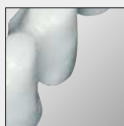

Confezioni

■ L 1	20 g	No.ord. 292-513-40
■ L 2	20 g	No.ord. 292-523-40
■ L 3	20 g	No.ord. 292-533-40
■ L 4	20 g	No.ord. 292-543-40
■ L 5	20 g	No.ord. 292-550-40
■ L 6	20 g	No.ord. 292-567-40
■ Liquido Universale B.O.L.	20 ml	No.ord. 299-180-40
■ Liquido Universale B.O.L.	100 ml	No.ord. 299-180-80

Altre novità di Esprident*

Bonder in pasta Triceram®

Per un lavoro più rapido, semplice e sicuro

Opaco gengivale Triceram®

Per una perfetta ricostruzione delle mucose

Incisali opalescenti Triceram®

La naturalezza attraverso l'opalescenza

Stains UNIVERSALE 45 arancio plus

Nuova tonalità ottimizzata di colore

EspriVest Ultra

Per inlays / onlays / veneers / ceramica integrale

*tutte le novità sono disponibili a magazzino.

Per domande sull'uso dei nostri prodotti, è a disposizione il servizio di assistenza odontotecnica ai seguenti numeri:

Tel.: 335/69.05.545

Fax: 051/86.32.91

Informazioni aggiornate ed indicazioni d'uso complete relative ai prodotti Esprident sono disponibili consultando il nostro sito internet:

www.esprident.com

Data dell'informazione: 11/04