

*dinamique*<sup>®</sup> *dinamique*<sup>®</sup>



*For a dynamic smile.*  
*Die selbstligierenden Brackets aus Keramik und Metall.*





## **dinamique<sup>®</sup>** *c*

*Vollkommene Ästhetik und Tragekomfort für den Patienten, einfaches Handling und eine effiziente Behandlung mit kurzen Stuhlzeiten für die Praxis – dies alles bietet das selbstligierende Keramikbracket **dinamique<sup>®</sup> c** von Dentaaurum.*

## **dinamique<sup>®</sup>** *m*

*Das selbstligierende Metallbracket **dinamique<sup>®</sup> m** von Dentaaurum erfüllt alle Ansprüche an ein modernes selbstligierendes Bracketsystem. Durch seine geringe Bauhöhe ist es für den Patienten angenehm zu tragen. Dabei ist es zuverlässig und einfach in der Handhabung.*



**Wasserlösliche Farbmarkierung.**

*Einfache Zuordnung zum Zahn.*



**Von passiv zu aktiv einsetzbar.**

*Ideale Kontrolle in allen Behandlungsphasen.*



**Anatomisch angepasste Bracketbasis.**

*Perfekter Sitz auf dem Zahn.*



**Basis mit Aluminiumoxidkugeln.**

*Guter Halt und einfaches, berechenbares Debonding.*





# **dinamique** *Selbstligierendes Keramikbracket.*



## **Abgerundete Kanten und optimales Flügeldesign.**

*Ausgezeichneter Tragekomfort und einfaches, flexibles Ligieren.*



## **Rhodiumbeschichteter Clip aus Premium Cobalt-Chrom-Legierung.**

*Lange Haltbarkeit. Leichtes Öffnen und Schließen.*



## **Führungsschiene mit festem Verschlussclip.**

*Sicherheit während der gesamten Therapiedauer.*



## **Perfekte Farbanpassung an die natürliche Zahnumgebung.**

*Mehr Ästhetik.*

**Häkchen mit Pilzkopfdesign.**

*Sicherer Halt für elastomere Elemente.*



**Wasserlösliche Farbmarkierung.**

*Einfache Zuordnung zum Zahn.*



**Von passiv zu aktiv einsetzbar.**

*Ideale Kontrolle in allen Behandlungsphasen.*



**Anatomisch angepasste Bracketbasis.**

*Perfekter Sitz auf dem Zahn.*



**Großzügige Flügelunterschnitte.**

*Sicherer Halt für elastomere Elemente.*



**Mikrogeätzte Netzbasis.**

*Guter Halt und einfaches, berechenbares Debonding.*



# **dynamique** *Selbstligierendes Metallbracket.*



## ***Geringe Bauhöhe und optimales Flügeldesign.***

*Ausgezeichneter Tragekomfort und einfaches, flexibles Ligieren.*



## ***Clip aus Premium Cobalt-Chrom-Legierung.***

*Lange Haltbarkeit. Leichtes Öffnen und Schließen.*



## ***Führungsschiene mit festem Verschlussclip.***

*Sicherheit während der gesamten Therapiedauer.*




## ***Mittenmarkierung.***

*Einfaches Platzieren auf dem Zahn.*

# Optimale Bogensequenzen zu *dynamique*<sup>®</sup>.

1

## Anfangsphase: Runde Drahtbögen

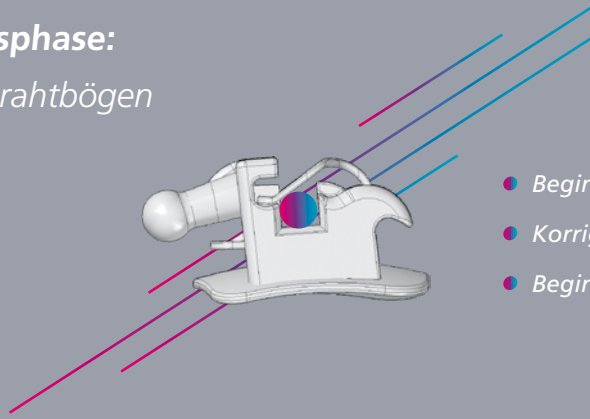

- Beginn von Nivellierung und Alignment.
- Korrigieren von Rotationen.
- Beginn der Zahnbogenentwicklung.

### Tensic<sup>®</sup> (thermoaktives Nickel-Titan)

REF	Durchmesser	Menge	
766-702-00	ø 0,35 mm/14	10	
766-704-00	ø 0,40 mm/16	10	OK
766-706-00	ø 0,45 mm/18	10	

REF	Durchmesser	Menge	
766-703-00	ø 0,35 mm/14	10	
766-705-00	ø 0,40 mm/16	10	UK
766-707-00	ø 0,45 mm/18	10	

### Tensic<sup>®</sup> White (thermoaktives Nickel-Titan, weiß beschichtet)

REF	Durchmesser	Menge	
768-026-00	ø 0,40 mm/16	3	OK
768-028-00	ø 0,45 mm/18	3	

REF	Durchmesser	Menge	
768-027-00	ø 0,40 mm/16	3	UK
768-029-00	ø 0,45 mm/18	3	

### rematitan<sup>®</sup> „LITE“ (Nickel-Titan)

REF	Durchmesser	Menge*	
766-080-00	ø 0,35 mm/14	10	
766-082-00	ø 0,40 mm/16	10	OK
766-084-00	ø 0,45 mm/18	10	

REF	Durchmesser	Menge*	
766-081-00	ø 0,35 mm/14	10	
766-083-00	ø 0,40 mm/16	10	UK
766-085-00	ø 0,45 mm/18	10	

\* auch als Packung mit 50 Stück erhältlich

\* auch als Packung mit 50 Stück erhältlich

### rematitan<sup>®</sup> „LITE“ White (Nickel-Titan, weiß beschichtet)

REF	Durchmesser	Menge	
768-014-00	ø 0,40 mm/16	3	OK
768-016-00	ø 0,45 mm/18	3	

REF	Durchmesser	Menge	
768-015-00	ø 0,40 mm/16	3	UK
768-017-00	ø 0,45 mm/18	3	

### rematitan<sup>®</sup> sl (Nickel-Titan)


REF	Durchmesser	Menge	
766-272-00	ø 0,35 mm/14	10	
766-274-00	ø 0,40 mm/16	10	OK
766-276-00	ø 0,45 mm/18	10	

REF	Durchmesser	Menge	
766-273-00	ø 0,35 mm/14	10	
766-275-00	ø 0,40 mm/16	10	UK
766-277-00	ø 0,45 mm/18	10	



2

**Übergangsphase:**  
Quadratische / Rechteckige  
Drahtbögen

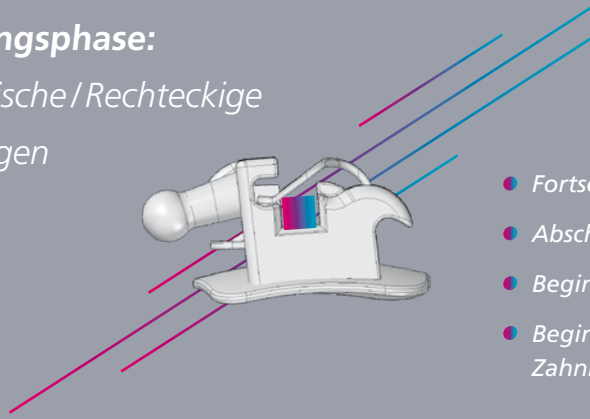

- Fortsetzung der Zahnbogenentwicklung.
- Abschluss von Nivellierung und Alignment.
- Beginn der Torque-Kontrolle.
- Beginn der Koordinierung der Zahnbogenformen.

*Tensic®*, vierkant (thermoaktives Nickel-Titan)

REF		Menge	
766-710-00	∅ 0,41x0,41/16x16	10	OK
766-712-00	∅ 0,41x0,56/16x22	10	OK

REF		Menge	
766-711-00	∅ 0,41x0,41/16x16	10	UK
766-713-00	∅ 0,41x0,56/16x22	10	UK


*Tensic® White*, vierkant (thermoaktives Nickel-Titan, weiß beschichtet)

REF		Menge	
768-030-00	∅ 0,41x0,41/16x16	3	OK
768-032-00	∅ 0,41x0,56/16x22	3	OK

REF		Menge	
768-031-00	∅ 0,41x0,41/16x16	3	UK
768-033-00	∅ 0,41x0,56/16x22	3	UK

3

**Abschlussphase:**  
Rechteckige Drahtbögen  
(slotfüllend)

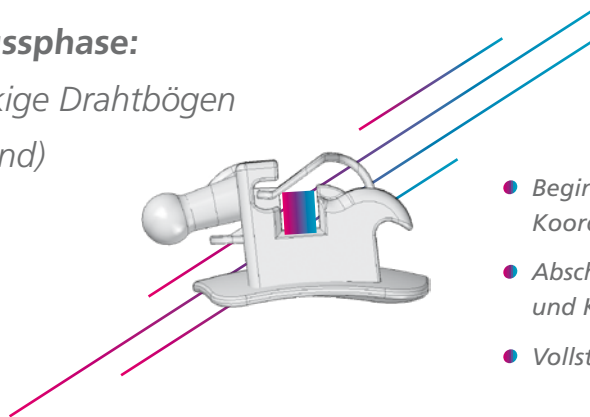

- Beginn der Seitenzahn-Konsolidierung und Koordination der Zahnbogenformen.
- Abschluss der Seitenzahn-Konsolidierung und Koordination der Zahnbogenformen.
- Vollständige Torque-Übertragung.

*remanium®*, vierkant (Edelstahl)

REF		Menge	
767-104-00	∅ 0,46x0,64/18x25	10	OK
767-105-00	∅ 0,48x0,64/19x25	10	

REF		Menge	
767-204-00	∅ 0,46x0,64/18x25	10	UK
767-205-00	∅ 0,48x0,64/19x25	10	

*rematitan® SPECIAL*, vierkant (nickelfreies Titan-Molybdän)

REF		Menge	
766-617-00	∅ 0,48x0,64/19x25	10	OK

REF		Menge	
766-618-00	∅ 0,48x0,64/19x25	10	UK

# Einfaches Arbeiten mit *dynamique*<sup>®</sup>.



## ÖFFNEN



**Einfaches Öffnen:** Mit dem *sl*-Instrument sanft nach okklusal ziehen. Der Verschlussclip springt auf.

## SCHLIEßEN



**Einfaches Schließen:** Den Verschlussclip sanft mit dem Finger nach gingival schieben. Darauf achten, dass der Verschlussclip vollständig schließt.

## DEBONDING



**Sicheres Debonding:** Mit einer Debonding-Zange das Bracket greifen und die Zange sanft zusammendrücken, bis sich das Bracket vom Zahn löst. Adhäsivüberreste entfernen.

## Unser Marketing-Angebot für Sie!

- Patientenbroschüre
- Demomodelle

## Sortimente und Zubehör.

### Bracketsortimente

REF	Bezeichnung	Menge
700-550-00	dinamique® c, System Roth 22, 1-Fall Sortiment, Häkchen auf 3-5	1 Fall
700-551-00	dinamique® c, System MBT* 22, 1-Fall Sortiment, Häkchen auf 3-5	1 Fall
891-410-00	dinamique® m, System Roth 22, 1-Fall Sortiment, Häkchen auf 3-5	1 Fall
891-411-00	dinamique® m, System MBT* 22, 1-Fall Sortiment, Häkchen auf 3-5	1 Fall



\* The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Zubehör

REF	Bezeichnung	Menge
023-276-00	sl-Instrument	1 Stück
004-346-00	Bracket-Abnehmezange, gerade	1 Stück
004-347-00	Bracket-Abnehmezange, abgewinkelt	1 Stück
774-216-00	SUPER Elasto-Force Kunststoffkette, Ring-Innendurchmesser 1,3 mm, Länge 4,5 m	1 Rolle
774-217-00	SUPER Elasto-Force Kunststoffkette, mit Steg, Ring-Innendurchmesser 1,3 mm, Länge 4,5 m	1 Rolle
774-210-00	SUPER Elasto-Force Kunststoffkette, mit Steg, Ring-Innendurchmesser 1,3 mm, Länge 3,5 m	1 Rolle
774-211-00	SUPER Elasto-Force Kunststoffkette, Ring-Innendurchmesser 1,3 mm, Länge 3,5 m	1 Rolle

# Dentaurum-Gruppe

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE

- ➔ Informationen zu Produkten und Serviceleistungen finden Sie unter [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com)
- ➔ Einfach und schnell bestellen im [Dentaurum Online Shop](#)
- ➔ Beachten Sie auch unser spezielles Kursangebot. Hotline: +49 72 31/803 - 470

Hotline Festsitzende Technik: +49 72 31/803 - 550 | Hotline Herausnehmbare Technik: +49 72 31/803 - 555  
Telefonische Auftragsannahme: +49 72 31/803 - 210 | Gebührenfreie Fax-Nummer (Deutschland): 0 800/4 14 24 34

Stand der Information: 02/18

Änderungen vorbehalten



[www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com)



Like us on Facebook!



YouTube

Visit us on YouTube!



Follow us on Pinterest!

**D**  
DENTAURUM