

dinamique® *dinamique*®



For a dynamic smile.
Los brackets autoligables cerámicos y metálicos.





dinamique[®] *c*

El bracket autoligable cerámico dinamique[®] c de Dentaureum tiene mucho que ofrecer: estética excelente y comodidad perfecta para el paciente, manejo sencillo y un tratamiento eficiente con tiempo de sillón reducido.

dinamique[®] *m*

El bracket metálico autoligable dinamique[®] m de Dentaureum cumple con todas las exigencias de un sistema moderno de brackets autoligables. Por su perfil bajo es muy cómodo para el paciente. Es de manejo sencillo y uso seguro.



Marcas de color solubles.
Asignación sencilla al diente.



Aplicable de pasivo a activo.
Control ideal en todas las fases de tratamiento.



Base de bracket contorneada anatómicamente.
Ajuste perfecto sobre el diente.



Base con bolas de óxido de aluminio.
Buena adherencia y descementado sencillo y previsible.



dinamique *Bracket cerámico autoligable.*



Bordes redondeados y óptimo diseño de aletas.

Comodidad excelente y sencillo de ligar.



Clip de cromo-cobalto premium con capa de rodio.

Prolongada vida útil. Abrir y cerrar con facilidad.



Riel de guía con clip de cierre.

Seguridad durante el tratamiento completo.



Adaptación cromática ideal al entorno natural.

Más estética.

Gancho con cabeza fungiforme.

Retención segura de elementos elastoméricos.



Marcas de color solubles.

Asignación sencilla al diente.



Aplicable de pasivo a activo.

Control ideal en todas las fases de tratamiento.



**Base de bracket
contorneada anatómicamente.**

Ajuste perfecto sobre el diente.



Aletas con grandes socavados.

Retención segura de elementos elastoméricos.



Base de malla micro-grabada.

Buena adherencia y descementado sencillo y previsible.





Perfil bajo y óptimo diseño de aletas.

Comodidad excelente y sencillo de ligar.



Clip de cromo-cobalto premium.

Prolongada vida útil. Abrir y cerrar con facilidad.



Riel de guía con clip de cierre.

Seguridad durante el tratamiento completo.




Marcación media.

Posicionamiento sencillo sobre el diente.

Secuencias de arcos ideales para dinámique®.

1

Fase inicial: Arcos de alambre redondos

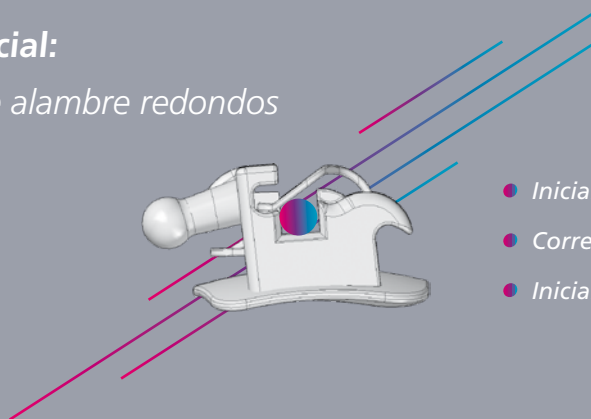

- Iniciar la nivelación y la alineación.
- Corregir rotaciones.
- Iniciar el desarrollo de las arcadas.

Tensic®

| REF | Diámetro | Cantidad | |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 766-702-00 | ø 0,35 mm/14 | 10 | |
| 766-704-00 | ø 0,40 mm/16 | 10 | Max. sup. |
| 766-706-00 | ø 0,45 mm/18 | 10 | |

| REF | Diámetro | Cantidad | |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 766-703-00 | ø 0,35 mm/14 | 10 | |
| 766-705-00 | ø 0,40 mm/16 | 10 | Max. inf. |
| 766-707-00 | ø 0,45 mm/18 | 10 | |

Tensic® White

| REF | Diámetro | Cantidad | |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 768-026-00 | ø 0,40 mm/16 | 3 | Max. sup. |
| 768-028-00 | ø 0,45 mm/18 | 3 | |

| REF | Diámetro | Cantidad | |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 768-027-00 | ø 0,40 mm/16 | 3 | Max. inf. |
| 768-029-00 | ø 0,45 mm/18 | 3 | |

rematitan® "LITE"

| REF | Diámetro | Cantidad* | |
|------------|--------------|-----------|-----------|
| 766-080-00 | ø 0,35 mm/14 | 10 | |
| 766-082-00 | ø 0,40 mm/16 | 10 | Max. sup. |
| 766-084-00 | ø 0,45 mm/18 | 10 | |

| REF | Diámetro | Cantidad | |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 766-081-00 | ø 0,35 mm/14 | 10 | |
| 766-083-00 | ø 0,40 mm/16 | 10 | Max. inf. |
| 766-085-00 | ø 0,45 mm/18 | 10 | |

* disponible también en paquetes de 50 piezas

* disponible también en paquetes de 50 piezas

rematitan® "LITE" White

| REF | Diámetro | Cantidad | |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 768-014-00 | ø 0,40 mm/16 | 3 | Max. sup. |
| 768-016-00 | ø 0,45 mm/18 | 3 | |

| REF | Diámetro | Cantidad | |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 768-015-00 | ø 0,40 mm/16 | 3 | Max. inf. |
| 768-017-00 | ø 0,45 mm/18 | 3 | |


rematitan® sl

| REF | Diámetro | Cantidad | |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 766-272-00 | ø 0,35 mm/14 | 10 | |
| 766-274-00 | ø 0,40 mm/16 | 10 | Max. sup. |
| 766-276-00 | ø 0,45 mm/18 | 10 | |

| REF | Diámetro | Cantidad | |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 766-273-00 | ø 0,35 mm/14 | 10 | |
| 766-275-00 | ø 0,40 mm/16 | 10 | Max. inf. |
| 766-277-00 | ø 0,45 mm/18 | 10 | |

2

Fase de transición:
Arcos de alambre rectangulares

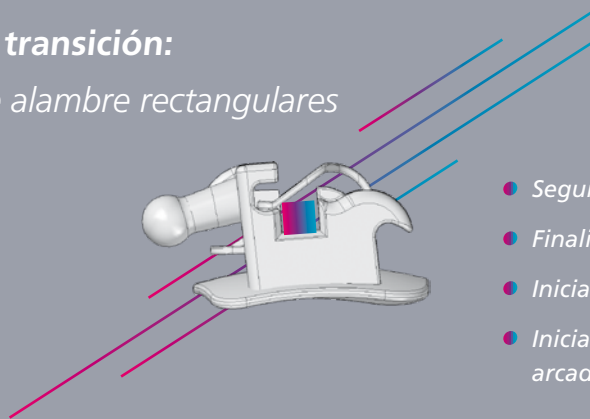

- Seguir el desarrollo de las arcadas.
- Finalizar la nivelación y la alineación.
- Iniciar el control de torque.
- Iniciar la coordinación de las formas de las arcadas.

Tensic®, rectangular

| REF | | Cantidad | |
|------------|-------------------|----------|-----------|
| 766-710-00 | ∅ 0,41x0,41/16x16 | 10 | Max. sup. |
| 766-712-00 | ∅ 0,41x0,56/16x22 | 10 | Max. sup. |

| REF | | Cantidad | |
|------------|-------------------|----------|-----------|
| 766-711-00 | ∅ 0,41x0,41/16x16 | 10 | Max. inf. |
| 766-713-00 | ∅ 0,41x0,56/16x22 | 10 | Max. inf. |


Tensic® White, rectangular

| REF | | Cantidad | |
|------------|-------------------|----------|-----------|
| 768-030-00 | ∅ 0,41x0,41/16x16 | 3 | Max. sup. |
| 768-032-00 | ∅ 0,41x0,56/16x22 | 3 | Max. sup. |

| REF | | Cantidad | |
|------------|-------------------|----------|-----------|
| 768-031-00 | ∅ 0,41x0,41/16x16 | 3 | Max. inf. |
| 768-033-00 | ∅ 0,41x0,56/16x22 | 3 | Max. inf. |

3

Fase final:
*Arcos de alambre rectangulares
(llenando el slot)*

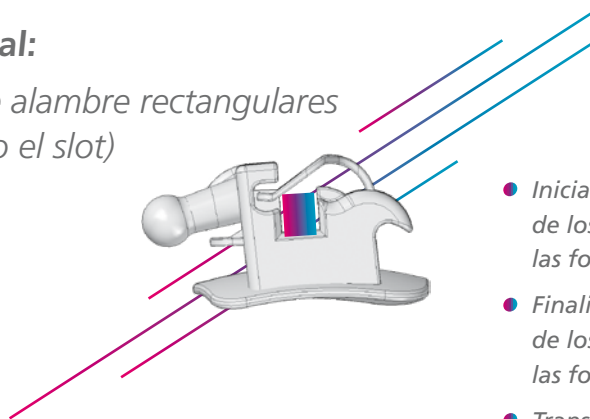

- Iniciar la consolidación de los dientes laterales y la coordinación de las formas de las arcadas.
- Finalizar la consolidación de los dientes laterales y la coordinación de las formas de las arcadas.
- Transmisión completa de torque.

remanium®, rectangular

| REF | | Cantidad | |
|------------|-------------------|----------|-----------|
| 767-104-00 | ∅ 0,46x0,64/18x25 | 10 | Max. sup. |
| 767-105-00 | ∅ 0,48x0,64/19x25 | 10 | |

| REF | | Cantidad | |
|------------|-------------------|----------|-----------|
| 767-204-00 | ∅ 0,46x0,64/18x25 | 10 | Max. inf. |
| 767-205-00 | ∅ 0,48x0,64/19x25 | 10 | |

rematitan® SPECIAL, rectangular

| REF | | Cantidad | |
|------------|-------------------|----------|-----------|
| 766-617-00 | ∅ 0,48x0,64/19x25 | 10 | Max. sup. |

| REF | | Cantidad | |
|------------|-------------------|----------|-----------|
| 766-618-00 | ∅ 0,48x0,64/19x25 | 10 | Max. inf. |

Trabajo sencillo con dinamique®.



ABRIR

CERRAR

DESCEMENTAR



Abrir con facilidad: Tirar con cuidado hacia incisal u oclusal usando el instrumento sl. El clip de cierre se abre.



Cerrar con facilidad: Empujar el clip de cierre con el dedo hacia gingival. Asegúrese de que el clip de cierre esté completamente cerrado.



Descementado seguro: Agarrar el bracket con un alicate de descementado y apretar el alicate con cuidado hasta que el bracket se suelte del diente. Quitar restos de adhesivo.

Nuestra oferta de marketing para usted.

- Folleto para pacientes
- Modelos de demostración

Surtidos y accesorios.

Surtidos de brackets

| REF | Designación | Cantidad |
|------------|---|----------|
| 700-550-00 | dinamique® c, Roth 22, 1 caso, gancho en 3-5 | 1 caso |
| 700-551-00 | dinamique® c, MBT* 22, 1 caso, gancho en 3-5 | 1 caso |
| 891-410-00 | dinamique® m, Roth 22, 1 caso, gancho en 3-5 | 1 caso |
| 891-411-00 | dinamique® m, MBT* 22, 1 caso, gancho en 3-5 | 1 caso |

* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Accesorios

| REF | Designación | Cantidad |
|------------|---|----------|
| 023-276-00 | Instrumento sl | 1 pieza |
| 004-346-00 | Alicates para quitar brackets, rectos | 1 pieza |
| 004-347-00 | Alicates para quitar brackets, acodados | 1 pieza |
| 774-216-00 | Cadena elastomérica SUPER Elasto-Force, diámetro interior de anillo 1,3 mm, longitud 4,5 m | 1 rollo |
| 774-217-00 | Cadena elastomérica SUPER Elasto-Force, con mallete, diámetro interior de anillo 1,3 mm, longitud 4,5 m | 1 rollo |
| 774-210-00 | Cadena elastomérica SUPER Elasto-Force, con mallete, diámetro interior de anillo 1,3 mm, longitud 3,5 m | 1 rollo |
| 774-211-00 | Cadena elastomérica SUPER Elasto-Force, diámetro interior de anillo 1,3 mm, longitud 3,5 m | 1 rollo |

Grupo Dentaureum

Alemania | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
y en más de 130 países a nivel mundial.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

➔ Descubra nuestros productos y servicios en www.dentaureum.com

Fecha de la información: 07/18

Reservado el derecho de modificación



www.dentaureum.com



Like us on Facebook!



Visit us on YouTube!



Follow us on Pinterest!

D
DENTAURUM