



Per eventuali domande sull'uso dei prodotti Dentauro, è a disposizione il nostro servizio di assistenza tecnica ai seguenti numeri:

Tel.: 051/86.50.084 o 335/69.05.545

Fax: 051/86.32.91

E-mail: lab@dentauro.it

► Maggiori informazioni sui prodotti Dentauro sono anche disponibili nel sito

www.dentauro.de

► Per ricevere informazioni sul nostro programma corsi ed incontri, telefonare al numero 051/86.19.35 oppure consultare le pagine del sito www.dentauro.it

Dati tecnici

Rapporto di miscelazione:	250 g : 35 ml
Tempo di miscelazione in vuoto:	90 secondi
Tempo di lavorazione:	4 - 5 minuti
Tempo di presa con preriscaldamento convenzionale:	40 minuti
preriscaldamento veloce, ponti e corone:	15 minuti
preriscaldamento veloce, scheletrati:	30 minuti
Espansione termica:	ca. 0,65 %
Espansione lineare di presa:	ca. 0,05 %
Resistenza alla compressione:	9 - 10 MPa

Confezioni

		REF
Polvere	80 x 250 g = 20Kg	107-620-00
Liquido	1000 ml	107-625-00

Data dell'informazione: 04/06



rematitan® Plus
SPEED

Rivestimento per titanio ad impiego universale



Rivestimento rapido per titanio

Ad impiego universale

Con il nuovo **rematitan® Plus Speed** la Dentauroff offre un rivestimento rapido per la fusione del titanio, particolarmente semplice da usare.

rematitan® Plus Speed è un rivestimento ad impiego universale, indicato quindi sia per ponti e corone che per scheletrati.

Nuovo procedimento brevettato di stabilizzazione

Riduce i tempi di lavorazione

Il nuovo procedimento brevettato di stabilizzazione del rivestimento consente di prelevare il cilindro dal forno terminata la necessaria fase di reazione alla temperatura finale, di raffreddarlo all'aria e di procedere con la fusione dopo 45 minuti. Ciò riduce i tempi di lavorazione di circa 2 ore e comporta, pertanto, un notevole risparmio di denaro.

Superfici di fusione molto lisce ed omogenee

Fusioni di elevata qualità

Con lo sviluppo del noto rivestimento **rematitan® Plus** nel rivestimento rapido **rematitan® Plus Speed** è stato compiuto un ulteriore miglioramento nella qualità delle strutture fuse in titanio.

Semplice impiego

Fondere il titanio non è mai stato così facile

La necessità di impostare correttamente la salita del proprio forno con il nuovo rivestimento **rematitan® Plus Speed** può essere trascurata, cosicché con il ciclo veloce può essere impiegato qualsiasi forno di preriscaldamento. Sia per la fusione di scheletrati che per quella di ponti e corone sarà pertanto necessario solo un liquido di miscelazione a diversa concentrazione.

Ciclo rapido o ciclo notturno

A voi la scelta

rematitan® Plus Speed può essere usato sia con ciclo veloce che con ciclo notturno. A voi la scelta.

rematitan® Plus Speed

Made in Germany

Tutti i rivestimenti Dentauroff vengono fabbricati in Germania con un moderno impianto computerizzato di produzione. Ciascun lotto prodotto viene analizzato da un punto di vista fisico-chimico oltreché da quello odontotecnico.

