



ceraMotion®

*my first
ceramic
in paste*



ceraMotion® Zr Paste Glaze

Homogene Glasurmasse für
Zirkonoxid und Lithium-Disilikat.

D
DENTAURUM

Homogener Glanz in einem Brand!

2 Glasurpasten für homogenen Glanz in einem Brand. Gebrauchsfertige, fluoreszierende Glasurmassen für Zirkonoxid und Lithium-Disilikat:

ceraMotion® Zr Paste Glaze transpa, 3g | REF 250-271-03

ceraMotion® Zr Paste Glaze bright, 3g | REF 250-272-03

Die gemeinsamen Vorteile:

- ✓ Nur ein Glanzbrand nötig
- ✓ Gebrauchsfertige Paste
- ✓ Natürliche Fluoreszenz
- ✓ Sehr gute Benetzbarkeit
- ✓ Homogene Glasur



ceraMotion® Zr Paste Glaze transpa



ceraMotion® Zr Paste Glaze bright



Der Unterschied.

*mittlerer
Helligkeitswert*

*erhöhter
Helligkeitswert*



Die Fluoreszenz einer Zirkonoxidkrone....



...eines natürlichen Zahnes.



*natürliche
Fluoreszenz*



Alle ceraMotion® One Touch Pasten

sind fluoreszierend und der

Fluoreszenz

eines natürlichen Zahnes angepasst.

ceraMotion® Zr Paste Glaze.



*"ceraMotion® Zr Paste Glaze
und ceraMotion® One Touch:
einfach, schnell und ästhetisch"*

ZTM Germano Rossi



Mehr Informationen 



Natürlicher Glanz bei Zirkonoxid und Lithium-Disilikat.



Brenntabelle.

	Starttemp. (°C)	Trockenzeit (m)	Steigrade (°C / min)	Vakuumstart (°C)	Vakuumende (°C)	Brenntemp. (°C)	Haltezeit (min)
Glanzbrand	450	6	55	450	730	730	1 (ohne Vakuum)

! Die angegebenen Brenntemperaturen sind Richtwerte und können aufgrund unterschiedlicher Ofenleistung abweichen.

Dentaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

KUNDENSERVICE

+49 72 31 / 803 - *Durchwahl*

Kieferorthopädie - 550

Implantologie - 590

Zahntechnik / Keramik - 410

Customer Support Digital - 280

Auftragsannahme - 210

Faxbestellung 0 800 / 4 14 24 34

(gebührenfrei aus Deutschland)



ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com



Stand der Information: 2023-10
Änderungen vorbehalten

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany | Phone +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295

www.dentaurum.com | info@dentaurum.com