

SUS²



La solution idéale pour les cas de Classe I.
Efficace. Epruvé. Intraoral.

Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes II a
Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

D
DENTAURUM

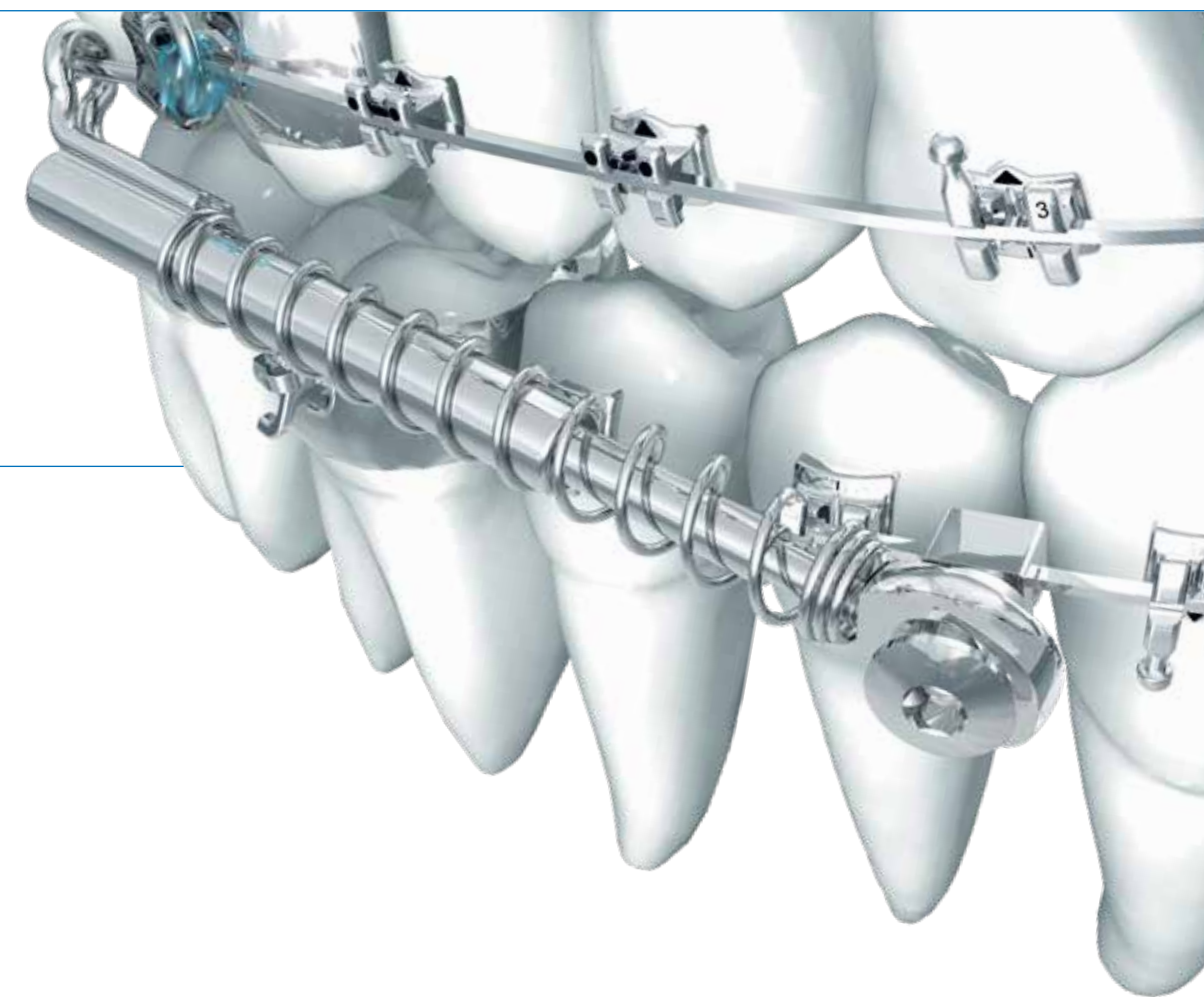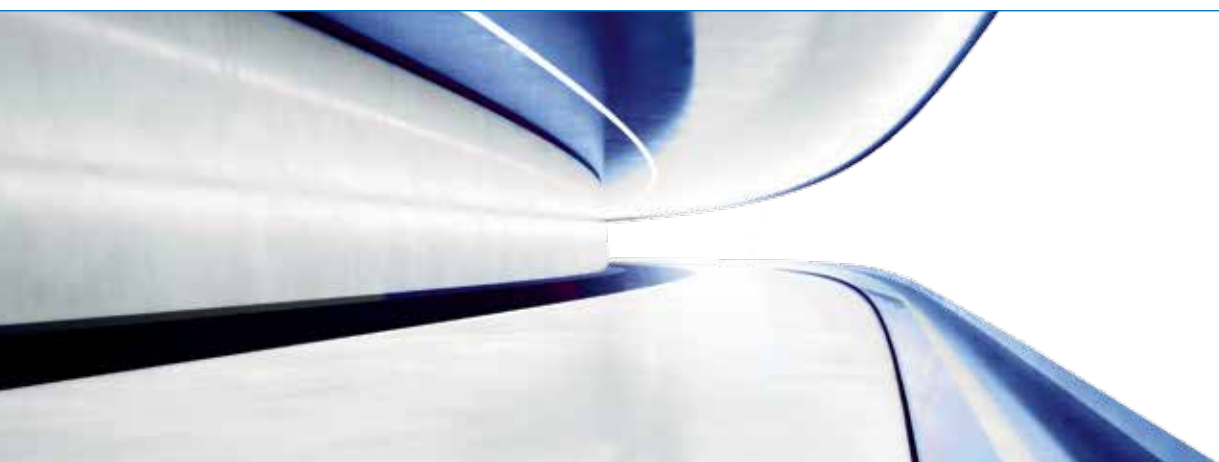

Le Sabbagh Universal Spring (SUS²) est un élément télescopique intermaxillaire avec ressort, à usage universel. Il constitue une excellente option thérapeutique tributaire de la coopération du patient. SUS² exerce - en douceur et de manière régulière - des forces essentiellement horizontales. L'usage de ce système ménage donc l'articulation temporo-mandibulaire et permet d'éviter les extractions ainsi que les interventions chirurgicales pour corriger les dysgnathies.

Indications

- Distocclusion de Classe II (unilatérale/bilatérale)
- Distalisation des molaires (remplace la force extra-orale)
- Compensation dento-alvéolaire de l'occlusion (remplace les élastiques)
- Fermeture des espaces interdentaires (aplasie)
- Dysfonctionnement de l'articulation temporo-mandibulaire (effet de repositionnement)
- Traitement de l'apnée du sommeil

La solution idéale pour les patients :

- pas assez coopératifs
- en fin de croissance
- chez qui il est difficile de mettre en œuvre des appareils amovibles
 - souffrant de maladies des voies respiratoires supérieures ou d'asthme
 - allergiques aux composants des résines
 - souffrant d'un handicap



1



Boucle Omega pour bloquer le crochet boule et l'empêcher de glisser.
Soudage laser pour une biocompatibilité et une résistance excellentes.

4



Vis à pointe conique assurant une connexion solide, précise et sûre du SUS² à l'arc.

Vis à six pans creux pour un montage rapide et facile.

Clé pour vis à six pans pour toutes les vis SUS²

clé pour vis à six pans incluse dans le set de démarrage SUS² (REF 607-140-01).

2



Vis à six pans creux pour le réglage de la longueur / force pour une mise en œuvre simple et sûre.

Force du ressort réglable pour un traitement optimal et personnalisé.

3



Structure télescopique double pour un réglage individuel de la longueur et une meilleure hygiène.

Butée intégrée pour l'élément télescopique interne empêchant la dislocation de la structure.

5



Design en forme d'entonnoir de la tête de la tige télescopique pour une mobilité transversale maximale et une stabilité transversale idéale.

6




Design conique de la partie vestibulaire de l'adaptateur d'arc du SUS². Facilite le montage et assure une mobilité optimale pendant le traitement.

Design One-fits-all – parfaite harmonie avec tous les types de brackets.



Accessoires d'activation

Activation supplémentaire avec le ressort turbo du SUS² pour un effet ressort. Activation standard avec des anneaux d'écartement.

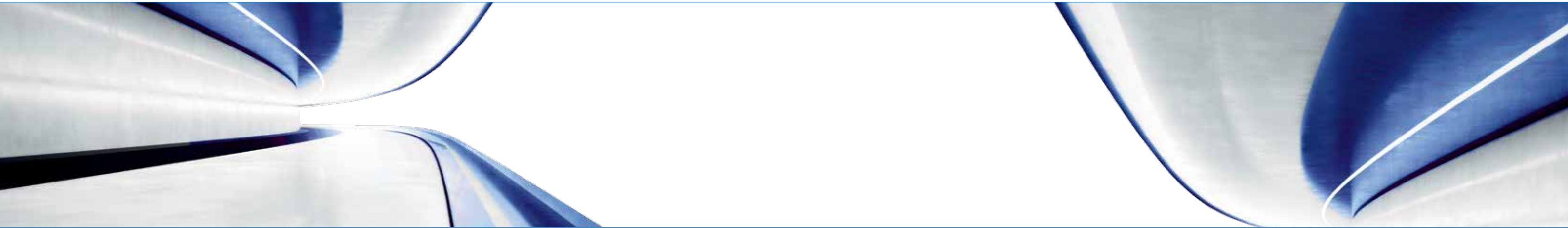

Des avantages convaincants.

- Système polyvalent : une seule taille, un seul produit pour les côtés droit et gauche.
- Facilité de manipulation, d'où une mise en place rapide en quelques minutes.
- Fait office de bielle et de ressort.
- Possibilités d'activation simples et sûres pour toutes les indications :
 - l'activation standard (effet ressort et effet Herbst) par un ou plusieurs anneaux d'écartement fendus (1 et 2 mm) que l'on fixe sur la tige télescopique.
 - l'activation avec le ressort turbo du SUS² permet d'augmenter la force exercée (traitement des adultes). C'est aussi la solution idéale lorsque p. ex. du tartre a inhibé l'action du ressort interne.
- Acier inoxydable résistant à la corrosion et tubes ouverts pour une bonne hygiène.
- Grand confort en bouche et bonne mobilité de la mandibule, ce qui en fait un système très bien accepté par le patient.
- Des forces s'exercent tout en douceur de manière régulière, parallèlement à l'appareil multibrackets. Cette solution se traduit pour le patient par un temps de traitement plus court (6 mois seulement).



Photos : Dr. med. dent. D.D.S. Aladin Sabbagh

Groupe Dentaureum

Allemagne | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
et dans plus de 130 pays à travers le monde.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

	www.dentaureum.com		

Mise à jour : 12/18
Sous réserve de modifications

