



Triceram® Liner

Per risultati di estetica elevata

Adesione ottimale

Nuove intensità di colore

con effetto fino dalla profondità

Con i nuovi Liner Triceram® di Esprident è possibile conferire al manufatto protesico grande profondità e naturalezza. Infatti, grazie all'intensa colorazione, i Liner Triceram® mascherano alla perfezione la bianca struttura in zirconio, costituendo la base per un rivestimento estetico altamente estetico.



Caratteristiche particolari

- Risultati estetici elevatissimi grazie alla possibilità di conferire il colore sin dalla prima stratificazione, con un effetto di grande naturalezza.
- Sempre maggiore corrispondenza alla scala colori VITA* con evidente semplificazione delle fasi di lavoro.
- Ottima riproducibilità cromatica con l'ausilio di sole 6 masse.
- Altissima compatibilità tra la ceramica Triceram® e l'ossido di zirconio, data dalle ottime caratteristiche tecniche.
- Ottimale adesione tra struttura in ossido di zirconio e rivestimento ceramico.

* VITA è un marchio registrato della ditta VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Semplici e veloci

Colorazione individuale del dente

grazie alla combinazione di colore

Con solo sei colori di base è possibile ottenere tutte le combinazioni cromatiche della scala VITA*. Miscelando tra loro i Liner Triceram® nelle corrette proporzioni (vedi tabella) con lo speciale liquido Universale B.O.L., è possibile conseguire la colorazione desiderata.

Consigli di miscelazione

Colore dente	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6
A1	1/3				2/3	
A2	2/3				1/3	
A3	1					
A3,5	3/4					1/4
A4	1/2					1/2
B1		1/3			2/3	
B2		2/3			1/3	
B3		3/4			1/4	
B4		1				
C1			1/3		2/3	
C2			2/3		1/3	
C3			3/4		1/4	
C4			1			
D2				2/3	1/3	
D3				3/4	1/4	
D4		1/3		2/3		

Confezioni

■ L 1	20 g	No.ord. 292-513-40
■ L 2	20 g	No.ord. 292-523-40
■ L 3	20 g	No.ord. 292-533-40
■ L 4	20 g	No.ord. 292-543-40
■ L 5	20 g	No.ord. 292-550-40
■ L 6	20 g	No.ord. 292-567-40
■ Liquido Universale B.O.L.	20 ml	No.ord. 299-180-40
■ Liquido Universale B.O.L.	100 ml	No.ord. 299-180-80

Per domande sull'uso dei nostri prodotti, è a disposizione il servizio di assistenza odontotecnica al seguente numero telefonico:

335/690.55.45

Ulteriori informazioni sui sistemi Esprident sono disponibili nel sito internet

www.esprident.com

Data dell'informazione: 07/04

Autore delle immagini:

Dirk Ahlmann (DCS centro de formazione) · 65779 Kelkheim · Germania

DENTAUTURUM
ITALIA S.r.l.

DENTAUTURUM ITALIA S.r.l.

Via degli Speciali, 142/144 - Blocco 33 - Centergross · 40050 FUNO (Bologna)
Tel.: 051/86.25.80 · Fax: 051/86.32.91 · www.dentaurum.it · E-Mail: info@dentaurum.it