



Plus de 30 ans de technologie
de soudage au laser de Dentaureum.

desktop Compact

Mode d'emploi

Table des matières

Table des figures	4
1. Introduction	5
1.1 Objectif de ce document	5
1.2 Conventions utilisées dans ce document	5
2. Sécurité	7
2.1 Utilisation conforme à la destination	7
2.2 Utilisation incorrecte prévisible	8
2.3 Risques et mesures de sécurité	8
2.3.1 Protection contre le rayonnement laser	9
2.3.2 Protection contre les risques d'origine électrique	11
2.3.3 Protection contre la fumée	11
2.3.4 Protection contre le feu et les brûlures	12
2.3.5 Protection contre d'autres risques	13
2.4 Obligations de l'opérateur	14
2.5 Obligations de l'utilisateur	14
2.6 Qualification du personnel	14
2.7 Dispositifs de sécurité du système laser	15
2.7.1 Bouton d'arrêt d'urgence	15
2.7.2 Volet de sécurité	15
2.7.3 Libération du laser restreinte	15
2.7.4 Autres dispositifs de sécurité du système laser	16
2.8 Étiquettes d'avertissement sur le système laser	16
3. Caractéristiques techniques	18
4. Description du système laser	19
4.1 Domaines d'application	19
4.2 Principe fondamental du soudage au laser	19
4.3 Aperçu du principe de fonctionnement	21
4.4 Tête laser et embout du microscope	22
4.5 Chambre de soudage	23
4.6 Éléments de commande	24
4.6.1 Interrupteur à clé	24
4.6.2 Bouton d'arrêt d'urgence	24
4.6.3 Écran tactile	25
4.6.4 Éléments de commande dans la chambre de soudage	25
4.6.5 Pédale	26
4.7 Raccordements externes et plaque d'identité	26

5.	Installation et mise en service	27
5.1	Conditions ambiantes	27
5.2	Dimensions d'encombrement	27
5.3	Effectuer l'inspection de réception	27
5.4	Vérifier le raccordement au réseau local	28
5.5	Installer le système laser	28
5.6	Remplir l'eau de refroidissement	28
5.7	Raccorder le courant, les composants et le gaz de protection	29
5.8	Garantir la sécurité du système laser	29
6.	Utilisation	30
6.1	Mettre en marche le système laser	30
6.2	Positionner la pièce de travail	30
6.3	Utiliser la pédale	30
6.4	Utiliser du gaz de protection	31
6.5	Utiliser l'écran tactile	32
6.6	Régler les paramètres laser	33
6.7	Enregistrer et charger un ensemble de paramètres	34
6.8	Ouvrir/fermer le volet de sécurité	37
6.9	Utiliser l'embout du microscope	37
6.10	Soudage	39
6.11	Afficher et modifier les réglages de base	40
6.12	Régler l'éclairage de la chambre de soudage	41
6.13	Réinitialiser un message d'erreur	41
6.14	Éteindre le système laser	42
7.	Maintenance	43
7.1	Consignes de maintenance importantes	43
7.2	Plan d'inspection et de maintenance	43
7.2.1	Contrôler une fois par jour avant le début du travail	43
7.2.2	Contrôler une fois par semaine	44
7.2.3	Contrôler une fois par semaine	44
7.2.4	Contrôler une fois par an	44
7.3	Ouvrir le système laser	44
7.3.1	Refermer le capot	46
7.4	Nettoyer le système laser	47
7.5	Nettoyer et changer le verre de protection	47
7.6	Vérifier l'ajustage du laser	48
7.7	Ajuster le miroir de déviation et le réticule	49
7.8	Vérifier et changer le filtre du dispositif d'aspiration des fumées de soudage	50
7.9	Changer l'eau de refroidissement et le filtre particulaire	52

8. Transport, stockage, élimination	56
8.1 Transporter le système laser	56
8.2 Stocker le système laser	56
8.3 Éliminer le système laser	56
9. Messages et élimination des erreurs.....	56
9.1 Messages d'erreur de la commande du laser.....	57
9.2 Autres erreurs de la commande du laser	59
9.3 Codes d'erreur.....	60
10. Pièces de rechange	61
Glossaire	62
Déclaration de conformité CE	64
Index	65

Table des figures

Figure 1	Position des étiquettes d'avertissement sur le système laser	16
Figure 2	Représentation schématique du trajet du faisceau laser	20
Figure 3	desktop Compact avec volet de chargement ouvert.....	21
Figure 4	APERÇU – Vue extérieure	22
Figure 5	Chambre de soudage	23
Figure 6	Dimensions de la chambre de soudage	24
Figure 7	Écran tactile	25
Figure 8	Éléments de commande de la chambre de soudage.....	25
Figure 9	Raccordements externes.....	26
Figure 10	Pédale à deux niveaux (standard).....	30
Figure 11	Fenêtre principale de l'écran tactile – Mode standard.....	32
Figure 12	Paramètres laser	33
Figure 13	Affichage d'ensemble de paramètres.....	35
Figure 14	Fenêtre principale de l'écran tactile – Enregistrer un ensemble de paramètres dans ce mode...	33
Figure 15	Fenêtre principale de l'écran tactile – Charger un ensemble de paramètres dans ce mode.....	36
Figure 16	Écran tactile – Clavier permettant de modifier la description	36
Figure 17	Oculaire et œilleton de l'embout de microscope standard.....	37
Figure 18	Oculaire et œilleton de l'embout de microscope Leica.....	38
Figure 19	Régler l'embout du microscope	39
Figure 20	Écran tactile – Menu des options	41
Figure 21	Écran tactile – Message d'erreur (=Interlock).....	42
Figure 22	Points de fixation du capot	44
Figure 23	Colerette de l'embout du microscope (vue de dessus)	45
Figure 24	Système laser avec capot ouvert	46
Figure 25	Verre de protection dans la tête laser	47
Figure 26	Empreinte de la tache de brûlure sur du papier photographique	49
Figure 27	Vis de réglage du rayon laser	49
Figure 28	Point focal dans le réticule	50
Figure 29	Dispositif d'aspiration de fumée de soudage dans la chambre de soudage.....	51
Figure 30	Filtre de l'aspiration de fumée	51
Figure 31	Réservoir d'eau de refroidissement	53
Figure 32	Vidanger l'eau de refroidissement et remplir d'eau de refroidissement	53
Figure 33	Remplacer les coupe-circuits.....	55

1. Introduction

1.1 Objectif de ce document

Le présent document décrit le système de soudage au laser desktop Compact de Dentaureum, également désigné « système laser » dans ce document.

Vous trouverez ici des informations concernant l'installation, l'utilisation et la maintenance, ainsi que les mesures de protection requises pour l'utilisation du système laser.

Ce manuel d'instructions a été élaboré selon la norme IEC/IEEE 82079-1. Il fait partie intégrante du produit. Le manuel d'instructions doit, de ce fait, être conservé à proximité du système laser jusqu'à son élimination et, en cas de cession à un tiers, être remis à ce dernier.



DANGER

Risque de blessures !

- Nous vous prions de lire impérativement ce manuel d'instructions avant la première mise en service du système laser, et en particulier le chapitre *Sécurité* à la page 7.

1.2 Conventions utilisées dans ce document

Vous trouverez ici les conventions utilisées dans ce manuel d'instructions.

Avertissements et avis

Les avertissements et autres indications sont représentés dans des rectangles gris dans ce manuel d'instructions (voir ci-dessous).

Les types hiérarchiques d'avertissements suivants sont utilisés. L'ampleur du danger est caractérisée par le mot-clé situé à gauche du rectangle :



DANGER

Indique une situation de danger à haut niveau de risque pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles si elle n'est pas évitée.



AVERTISSEMENT

Indique une situation de danger à moyen niveau de risque pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles si elle n'est pas évitée.



ATTENTION

Une mise en danger est désignée par un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait causer des blessures de faible et moyenne gravité. De plus, ce mot-clé indique une possible situation de dommages. Si celle-ci n'est pas évitée, le produit ou quelque chose dans son environnement peut être endommagé.

Outre les avertissements hiérarchiques décrits ci-dessus, nous utilisons les symboles suivants :



AVIS

AVIS ou. CONSEIL

Désigne des conseils d'utilisation et d'autres informations utiles ne causant aucune situation dangereuse ou dommageable. Dans ce document, les consignes opératoires sont identifiées par le signe « ► ».

Exemple :

- Appuyez sur le bouton XY.

Termes utilisés

Opérateur

Il s'agit de *l'entreprise* qui exploite le système laser de Dentaureum (c'est-à-dire l'employeur de l'utilisateur).

Utilisateur

Il s'agit de la *personne* qui utilise le système laser de Dentaureum.

Glossaire

Les termes essentiels utilisés pour le soudage au laser sont expliqués dans le glossaire que vous trouverez à la fin de ce document.

Avis sur le genre

Pour une meilleure lisibilité, ce document n'utilise pas à la fois des formes de langage masculines, féminines ou diverses.

Tous les termes personnels tels que « l'utilisateur » doivent donc être compris comme neutres en matière de genre.

2. Sécurité

Ce chapitre contient d'importantes consignes de sécurité pour l'utilisation du système laser.

Dentaurum GmbH & Co. KG décline toute responsabilité pour des dommages corporels ou matériels, notamment sur le système laser, découlant du non-respect des consignes de sécurité.



DANGER

Nous vous prions de respecter impérativement les consignes de sécurité !

- ▶ Ne mettez le système laser en service qu'après avoir lu attentivement et compris ce manuel d'instructions et en particulier tous les paragraphes de ce chapitre Sécurité.
- ▶ Conservez soigneusement ce manuel d'instructions pour des consultations ultérieures.
- ▶ Respectez les mesures de protection et les avertissements décrits dans ce chapitre dans toutes les situations d'utilisation du système laser, c.-à-d. lors de l'installation, du transport, de l'utilisation, de la maintenance et de la réparation du système laser.

2.1 Utilisation conforme aux prescriptions

desktop Compact est un système laser fermé destiné au soudage au laser de composés métalliques et à la soudure de recharge sur des pièces de travail métalliques.

Le système laser est conçu comme un poste de travail manuel pour un usage industriel avec un fonctionnement surveillé en permanence.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Les points suivants font également partie de l'utilisation conforme du système laser :

- L'utilisation du système laser doit impérativement être conforme aux descriptions et instructions de ce manuel d'instructions. Les consignes relatives à la sécurité, l'exploitation, la maintenance et les réparations de ce manuel d'instructions doivent impérativement être respectées.
- Le système laser doit uniquement être mis en service une fois qu'au moins un représentant de l'opérateur du système a bénéficié d'une formation personnelle à la sécurité de la part de Dentaurum (ou d'un distributeur) et qu'il a **signé** et remis le document *Instructions de sécurité* à Dentaurum. L'opérateur doit veiller à informer du contenu de ce document toutes les personnes destinées à travailler avec le système laser.
- Le système laser doit uniquement être mis en service lorsqu'il a été pris en charge par le responsable de sécurité laser chez l'opérateur.
- Le système laser doit uniquement être mis en service lorsque les mesures de sécurité laser nécessaires de l'opérateur ont été prises.
- Seules les personnes qualifiées et formées de plus de 18 ans, ayant lu et compris ce manuel d'instructions, sont autorisées à installer, utiliser, nettoyer, entretenir et éliminer le système laser.
- Les pièces défectueuses ou d'usure doivent uniquement être remplacées par des pièces de rechange d'origine.
- La pédale doit être installée de façon à ce qu'aucun objet tombé ne puisse déclencher involontairement une impulsion laser.
- L'utilisation du système laser n'est autorisée qu'à condition que les étiquettes d'avertissement, situées sur le système laser, soient bien visibles.
- Le système laser ne peut être utilisé que si les tâches de contrôle et de maintenance ont été exécutées régulièrement.



AVERTISSEMENT

Des risques peuvent survenir en cas d'utilisation non conforme !

- N'utilisez le système laser qu'en conformité avec sa destination conventionnelle et uniquement si son état est impeccable du point de vue de la sécurité.

La sécurité d'exploitation du système laser n'est assurée que si les consignes précitées sont respectées.

2.2 Utilisation incorrecte prévisible

Dans des circonstances raisonnables, les utilisations incorrectes prévisibles du système laser répertoriées ci-dessous sont considérées comme non conformes :

- Le traitement de matériaux non métalliques, en particulier le traitement de matières plastiques, ainsi que tous les matériaux inflammables et explosifs.
- L'orientation du rayon laser sur des personnes ou animaux.
- Les utilisations incorrectes du système laser par des personnes non formées ou n'ayant pas bénéficié des instructions nécessaires.
- L'exécution de transformations ou de modifications sur le système laser, en particulier la modification ou le démontage de dispositifs de sécurité.
- L'utilisation du système laser avec capot ouvert, des dispositifs de sécurité défectueux ou manipulés, ainsi que toutes les modifications du système laser effectuées sans accord du fabricant.

Dentaurum n'assume aucune responsabilité pour tous les dommages découlant d'une utilisation non conforme. Seul l'opérateur est responsable de tels dommages.

2.3 Risques et mesures de sécurité

Ce système laser a été développé et soigneusement contrôlé dans le respect des exigences de sécurité en vigueur. Des risques peuvent cependant être engendrés lors de l'utilisation du système laser si les mesures de protection requises par l'opérateur ou l'utilisateur ne sont pas respectées.

La connaissance des consignes de sécurité mentionnées dans ce manuel d'instructions et dans les instructions de sécurité de Dentaurum à l'achat du système laser est une condition fondamentale pour l'exploitation sûre et le fonctionnement fiable du système laser.

Règle générale :

Un travail minutieux et concentré réduit le risque d'utilisations incorrectes et donc de dommages, notamment corporels.

Les paragraphes suivants décrivent les risques spécifiques pouvant découler de l'utilisation du système laser et les mesures de protection requises pour éviter/réduire ces risques.

Les risques suivants peuvent survenir :

- Risques pour la santé de l'utilisateur du système laser ou de tiers, notamment par le rayonnement laser, l'écrasement, l'électricité, la fumée
- Endommagement du système laser même
- Endommagement d'autres biens matériels

2.3.1 Protection contre le rayonnement laser

Les types de rayonnement suivants peuvent être dangereux :



Rayonnement laser

Le rayonnement laser direct ou indirect est invisible et nocif pour les yeux et la peau en l'absence de mesures de protection :

- Rayonnement laser direct
Il s'agit du rayon laser invisible qui sort de l'objectif laser et touche la pièce de travail.
- Rayonnement laser indirect
Il s'agit du rayonnement laser réfléchi dans plusieurs directions par la pièce de travail ou un outil. Il faut faire particulièrement attention aux objets présentant des surfaces réfléchissantes et brillantes, car ces objets peuvent facilement dévier ou diffuser le rayonnement laser, de sorte que, même à grande distance du point de soudure, il existe encore un certain risque local pour les yeux et la peau.



Rayonnement secondaire

Comme l'arc de soudage dans le soudage conventionnel, le rayon laser produit de très hautes températures lorsqu'il atteint la pièce de travail. Cela entraîne pendant le traitement laser un éclat de lumière intense que l'on appelle « faisceau de plasma ». Il génère le rayonnement secondaire composé de rayons UV et de lumière bleue. Le rayonnement secondaire peut endommager la rétine de l'œil. Cela peut entraîner des troubles de la vision (« coup d'arc »), voire la cécité.

- Rayonnement UV
Le rayonnement UV est invisible et nocif pour la peau et les yeux en l'absence de mesures de protection. La gravité des lésions dépend de la durée et de l'intensité de l'exposition. Autrement dit, plus l'exposition est longue et plus la peau est proche du faisceau de plasma, plus il faut de protection.
- Lumière bleue
Il s'agit de l'intense lumière bleue visible du faisceau de plasma. La lumière bleue est nocive pour les yeux en l'absence de mesures de protection.



Protection des yeux

Avec sa chambre de soudage fermée, le système laser, dans le cadre d'une utilisation conforme, remplit toutes les conditions pour une protection complète des yeux. Avec *une chambre de soudage fermée*, ne pas porter de lunettes de protection laser.

Voir aussi :

Mesures de sécurité laser de l'opérateur à la page 10.



Protection de la peau

La protection de la peau contre le rayonnement laser et le rayonnement secondaire ne peut pas être garantie complètement par le système laser, selon les conditions des processus, car les mains doivent se trouver dans la zone de risque lors du soudage au laser manuel.

Selon l'état actuel de la technique, ni les fonctions techniques de protection adéquates ni les équipements de protection individuelle requis permettant une bonne protection des mains contre le rayonnement laser direct ou réfléchi lors du traitement laser manuel ne sont disponibles sur le marché. Dans certains cas, un passage accidentel des mains sous le rayon laser peut entraîner des brûlures cutanées irréversibles.

Le processus de travail ne s'automatise pas, car chaque pièce de travail est une pièce unique. Le travail manuel est nécessaire car de très nombreux matériaux différents, présentant des mesures, formes extérieures, aspects de surface, tolérances d'ajustement et propriétés électriques, mécaniques et thermiques différent(e)s, doivent être associés les uns avec les autres dans des combinaisons différentes ou travaillés en surface.

Avec la chambre de soudage fermée, le risque se réduit pour la peau en cas d'utilisation conforme et représente uniquement un danger pour les mains et les avant-bras de l'utilisateur.

Par conséquent, un rayonnement laser direct ou réfléchi peut entraîner des brûlures cutanées localisées en cas de mauvaise manipulation du système laser.

À cela s'ajoutent la contrainte thermique de la pièce de travail chauffée, le cas échéant la conduction thermique du fil de soudage fondu et les projections de métal chaudes.

Le port de gants (en cuir, par exemple) peut vous permettre de protéger votre peau du rayonnement secondaire et des brûlures liées aux pièces de travail chaudes. Cela est particulièrement valable pour les matériaux présentant une bonne conductibilité thermique, comme l'aluminium, le cuivre, l'argent ou l'or.

Pour que les utilisateurs et les tiers se protègent du rayonnement laser et du rayonnement secondaire, l'opérateur et l'utilisateur du système laser doivent prendre des mesures de protection. Ces mesures de protection sont décrites ci-dessous :

Mesures de sécurité laser de l'opérateur



AVERTISSEMENT



Rayonnement laser et  rayonnement secondaire !

En tant qu'**opérateur**, vous êtes responsable du respect des mesures de protection organisationnelles et individuelles suivantes afin de garantir une protection contre le rayonnement laser et le rayonnement secondaire. Avant la première mise en service, veillez à mettre en place les mesures de protection suivantes :

- ▶ Déclarez le système laser auprès de l'association professionnelle compétente et de l'autorité compétente en matière de protection du travail (par exemple auprès de l'inspection du travail, de manière informelle, en indiquant l'adresse du fabricant et les données techniques mentionnées sur la plaque signalétique).
- ▶ Désignez par écrit un responsable de sécurité laser (classe de laser 4) chargé de l'exploitation sûre du laser dans votre entreprise.
- ▶ Assurez-vous que le système laser est toujours utilisé conformément à sa destination (voir *Utilisation conforme à la destination* à la page 7).
- ▶ Transmettez ce mode d'emploi à toutes les personnes qui travaillent avec ce système laser.

Mesures de sécurité laser de l'utilisateur



AVERTISSEMENT



Rayonnement laser et  rayonnement secondaire !

En tant qu'**utilisateur**, vous êtes responsable du respect des mesures de protection organisationnelles et individuelles suivantes afin de garantir une protection contre le rayonnement laser et le rayonnement secondaire. Avant la première mise en service, veillez à mettre en place les mesures de protection suivantes :

- ▶ Travaillez avec une chambre de soudage fermée.

- ▶ Pendant toute l'opération de soudage, regardez attentivement par l'embout du microscope, restez concentré et vérifiez vos mains et la position de la pièce de travail. Un travail minutieux et concentré réduit le risque d'utilisations incorrectes.
- ▶ Ne portez pas de bijoux, de vêtements amples, de cravates et si vous avez les cheveux longs, attachez-les.
- ▶ En cas de dégradation du champ de vision, éloignez immédiatement vos yeux de l'embout du microscope et contactez le service après-vente.
- ▶ Protégez votre peau :
 - ▶ Portez des gants lorsque vous travaillez pendant plusieurs heures.
 - ▶ Couvrez-vous la peau sur les bras et les jambes.
 - ▶ Si vous prenez des médicaments contenant des substances sensibilisant la peau, couvrez-vous toutes les parties principales de la peau. Dans certaines circonstances, des irritations, des rougeurs ou des allergies cutanées peuvent survenir.
- ▶ Ne passez pas vos mains dans le rayon laser direct.
- ▶ Ne dirigez pas le rayon laser vers des personnes, des animaux ou des surfaces réfléchissantes.
- ▶ Observez en permanence le processus de traitement, notamment en cas de fonctionnement semi-automatique ou automatique.
- ▶ Veillez à ce que seules des personnes formées au système laser pénètrent dans la zone de travail du système laser.
- ▶ Lors d'irrégularités, appuyez immédiatement sur le bouton d'arrêt d'urgence (voir *Bouton d'arrêt d'urgence* à la page 15).

2.3.2 Protection contre les risques d'origine électrique

Des tensions sont présentes dans le système laser jusqu'à 800 V.



DANGER



Électricité !

Mesures de protection requises pour la protection contre les risques d'origine électrique :

- ▶ Utilisez uniquement de l'eau déminéralisée avec une conductance inférieure à 5 µS/cm comme eau de refroidissement pour éviter les courts-circuits.
- ▶ Avant d'ouvrir le système laser, retirez la fiche de réseau et attendez au moins 5 minutes.
- ▶ Confiez exclusivement les tâches de maintenance à du personnel qualifié.
- ▶ Faites réaliser les travaux d'entretien et remplacer les composants électriques uniquement par des électriciens qualifiés conformément à la norme TRBS 1203, par ex. remplacer les lampes flash.

2.3.3 Protection contre la fumée

Le soudage au laser engendre la génération de fumée et de particules nocives pour la santé.

Le niveau de risque dépend des matériaux traités.

L'association professionnelle exige, de ce fait, un système d'aspiration de fumée approprié pour le soudage au laser, afin de préserver la qualité de l'air ambiant que l'on respire.

Le desktop Compact est doté d'un tel système d'aspiration de fumée intégré (voir également *Vérifier et changer le filtre du dispositif d'aspiration des fumées de soudage* à la page 50).

Respectez les consignes de sécurité suivantes :



AVERTISSEMENT

L'inhalation de fumée est dangereuse pour la santé !

Mesures de protection requises pour la protection contre la fumée :

- ▶ Exploitez le système laser uniquement avec le système d'aspiration de fumée.
- ▶ Utilisez le système d'aspiration de fumée exclusivement pour aspirer la fumée de soudage laser et non pour aspirer les substances suivantes :
 - ▶ Gaz facilement inflammables ou explosifs
 - ▶ Tous types de liquides
 - ▶ Substances organiques
- ▶ Veillez à ce que les fentes d'aération soient toujours dégagées.
- ▶ N'inhaliez en aucun cas la fumée qui pourrait s'échapper.
- ▶ N'utilisez jamais le système d'aspiration de fumée sans filtre et n'utilisez que des filtres de rechange d'origine.
- ▶ Changez régulièrement le filtre de l'aspiration de fumée. Ce faisant, respectez les mesures de protection.
- ▶ Nettoyez régulièrement le système laser complet et veillez à respecter les consignes de sécurité relatives au nettoyage (voir *Nettoyer le système laser* à la page 47).

2.3.4 Protection contre le feu et les brûlures



AVERTISSEMENT



Risque d'incendie et de brûlures par des températures élevées !

Les matériaux facilement inflammables peuvent prendre feu par l'action du rayon laser.

- ▶ L'utilisation ou le stockage de matières solides, de gaz et de liquides inflammables ou explosifs sont interdits dans la zone laser pendant son exploitation.
- ▶ Veillez à ce que le rayon laser soit uniquement déclenché dans des conditions contrôlées et qu'il soit uniquement dirigé sur des matériaux résistants à la chaleur.
- ▶ Veillez à ce que le système laser soit installé à un emplacement suffisamment grand pour éviter toute accumulation de chaleur. Les fentes d'aération ne doivent en aucun cas être recouvertes ou obstruées par un obstacle.
- ▶ Utilisez des gants fins en laine ou en cuir fin. Ainsi, votre peau sera protégée des brûlures dues aux pièces de travail chaudes. Cela est particulièrement valable pour les matériaux présentant une bonne conductibilité thermique, comme l'aluminium, le cuivre, l'argent ou l'or.
- ▶ Ne travaillez aucun matériau pour lequel vous ne connaissez pas la composition, ni les propriétés d'inflammabilité et d'allumage.

 AVERTISSEMENT

 Risque d'incendie et de brûlures en cas de mauvaise manipulation du gaz de protection !

- ▶ N'utilisez en tant que gaz de protection que des gaz inertes tels que l'argon, c'est-à-dire des gaz qui ne provoquent aucune réaction chimique. N'utilisez absolument pas d'oxygène !
- ▶ Assurez-vous que le tuyau et le régulateur de pression de la bouteille de gaz sont protégés contre le rayonnement laser direct et indirect.
- ▶ Fixez la bouteille de gaz en toute conformité. La bouteille de gaz peut être posée à plat si elle est fixée de manière à empêcher tout mouvement imprévu et si le régulateur de pression est protégé.
- ▶ Protégez la bouteille de gaz de la chaleur (à l'abri de la lumière directe du soleil, à au moins 0,5 m du chauffage).
- ▶ Utilisez des bouteilles de gaz de 200 litres max.

2.3.5 Protection contre d'autres risques

 AVERTISSEMENT

Dangers éventuels pour les personnes portant un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux !

En règle générale, le rayonnement magnétique/électromagnétique des systèmes laser de Dentaureum ne présente pas de danger pour les personnes portant un stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autre appareil électromédical implanté.

- ▶ Néanmoins, si vous avez un doute en tant que porteur d'un dispositif médical, surtout si ce dernier est ancien, contactez le fabricant du dispositif médical. Le fabricant pourra alors déterminer, au cas par cas, si le fait de se tenir à proximité immédiate du système laser présente un risque éventuel.
- ▶ Dans de rares cas, il peut arriver que le fonctionnement d'un capteur de diabète soit perturbé par la proximité immédiate d'un système laser Dentaureum (ou d'un téléphone portable). Dans ce cas, le porteur du capteur doit éviter de travailler avec le système laser.

 ATTENTION

Le système laser est lourd !

Le desktop Compact pèse env. 42 kg.

- ▶ Quand vous déplacez le système laser, respectez les lignes directrices pour opérateurs correspondantes.

 ATTENTION

Risque d'infection possible par le contact entre les yeux et l'embout du microscope, ainsi que par le contact entre la peau et d'autres surfaces de contact !

Les contacts directs entre les yeux et l'embout du microscope ainsi qu'entre la peau et d'autres surfaces de contact (par ex. le clavier, l'écran tactile et le joystick), représentent une voie de transmission potentielle pour les infections virales et bactériennes.

- ▶ Avant de changer d'utilisateur du système laser, nettoyez les œilletons de l'embout du microscope avec un chiffon désinfectant jetable (disponible en pharmacie).
- ▶ Avant de changer d'utilisateur du système laser, nettoyez les surfaces de contact avec un produit désinfectant pour surfaces à base d'éthanol ou d'isopropanol, voir *Nettoyer le système laser* à la page 47.
- ▶ Respectez les règles d'hygiène générales (par ex. se nettoyer souvent et correctement les mains).

2.4 Obligations de l'opérateur

L'opérateur s'engage à assurer les points suivants :

- Les mesures de protection organisationnelles et individuelles dont l'opérateur est responsable doivent être respectées (voir page 10). Les mesures de protection doivent être vérifiées sur chaque nouveau lieu d'utilisation du système laser.
- Le système laser est toujours utilisé conformément à sa destination (voir page 7).
- Seules des personnes remplissant les conditions suivantes travaillent avec le système laser :
 - Avoir été formées à l'utilisation du système laser.
 - Avoir lu et compris ce manuel d'instructions.
 - Connaître les règlements en vigueur en matière de sécurité au travail et de prévention des accidents.
- Les utilisateurs ont accès à tout moment à ce manuel d'instructions.
- Les prescriptions nationales en matière de protection du travail pour les opérateurs de machines laser sont respectées.

Pour l'Allemagne : l'employeur doit définir un responsable de sécurité laser et effectuer une évaluation des risques liés au lieu de travail avant la mise en service du système laser, conformément à l'*ordonnance allemande sur la protection au travail concernant le rayonnement optique artificiel (OStrV)* et conformément aux *règlementations techniques concernant le rayonnement laser optique (TROS)*.

2.5 Obligations de l'utilisateur

Toutes les personnes intervenant sur le système laser s'engagent avant le début des interventions :

- à respecter les règlements en vigueur en matière de sécurité au travail et de prévention des accidents,
- à avoir lu et compris ce manuel d'instructions et en particulier ce chapitre *Sécurité*.

2.6 Qualification du personnel

Toutes les personnes chargées par l'opérateur d'effectuer des tâches en relation avec l'utilisation du système laser doivent faire preuve des qualifications suivantes :

	Personnel spécialement formé	Chargé de la protection laser	Utilisateur instruit avec formation spécialisée (mécanique/électrotechnique)	Utilisateur instruit
Transport	x			
Installation	x			
Mise en service		x		
Contrôle de sécurité		x		
Configuration, équipement			x	x
Utilisation				x
Maintenance de routine	x			
Maintenance spéciale	x		x ¹	
Recherche d'erreurs/suppression d'erreurs	x		x ²	
Élimination	x			

¹ valable uniquement pour les mesures de résolution d'erreurs décrites au chapitre Maintenance.

² valable uniquement pour les mesures de résolution d'erreurs décrites au chapitre Messages et résolution des erreurs.

2.7 Dispositifs de sécurité du système laser

Ce chapitre décrit les dispositifs de sécurité, c.-à-d. les composants relatifs à la sécurité, du système laser.



AVERTISSEMENT

Danger dû au rayonnement laser, danger d'écrasement, etc. !

- Les composants relatifs à la sécurité du système laser ne doivent en aucun cas être pontés, retirés, modifiés ou mis hors fonction d'une autre manière.
- Les composants relatifs à la sécurité du système laser sont conçus pour durer 20 ans. Une fois ce délai passé, les composants relatifs à la sécurité doivent être remplacés par des pièces de rechange d'origine.

2.7.1 Bouton d'arrêt d'urgence

Le bouton d'arrêt d'urgence est destiné à l'arrêt immédiat du système laser en situation critique. Ce bouton n'est pas destiné à l'extinction habituelle du système laser.



Actionner le bouton d'arrêt d'urgence

- Appuyez fortement sur le bouton d'arrêt d'urgence pour mettre le système laser hors service dans une situation critique. Le laser est immédiatement éteint et sécurisé pour éviter un redémarrage involontaire.

Remettre le système laser en marche après un arrêt d'urgence

- Désactivez l'interrupteur à clé.
- Débloquez le bouton d'arrêt d'urgence enfoncé en le tournant dans le sens de la flèche.
- Réactivez l'interrupteur à clé.

2.7.2 Volet de sécurité

Le volet de sécurité est un dispositif de sécurité du système laser (voir Figure 2 à la page 20).

Ce dispositif de sécurité empêche la sortie involontaire du rayonnement laser. Avant l'opération de soudage, le volet de sécurité doit être ouvert activement par l'utilisateur.

Le laser ne peut être activé que si le volet de sécurité est ouvert.

Lorsque le volet de sécurité est ouvert, la lampe d'avertissement laser est allumée.

Avant d'ouvrir le volet de sécurité, les mesures de protection contre le rayonnement laser et le rayonnement secondaire doivent être prises.

Le volet de sécurité se ferme automatiquement dans les situations suivantes :

- Lorsque le volet de chargement de la chambre de soudage est ouvert
- Lorsque la tension (V) de la lampe flash est réduite.
- Lorsque la commande du laser détecte une erreur (Interlock).

2.7.3 Libération du laser restreinte

Le laser n'est libéré qu'une fois toutes les conditions suivantes remplies :

- Le volet de chargement est fermé.
- Le réglage des paramètres laser est terminé.

- Le laser est prêt à fonctionner.
- L'utilisateur a ouvert le volet de sécurité.

Si toutes ces conditions sont remplies, la lampe d'avertissement laser rouge du système laser s'allume et le laser peut être activé.

2.7.4 Autres dispositifs de sécurité du système laser

· Chambre de soudage fermée

Protège les yeux et la peau de l'utilisateur et des autres personnes du rayonnement laser. Seules les mains de l'utilisateur se trouvent dans la zone laser. La chambre de soudage fermée du desktop Compact assure l'étanchéité optique vers l'extérieur de l'ensemble du trajet du faisceau.

· Fenêtre de protection laser

Pour observer l'opération de soudage.

· Verre de protection laser dans l'embout du microscope

Protège les yeux de l'utilisateur du rayonnement laser (voir Figure 2 à la page 20).

· Volet LCD dans l'embout du microscope

Protège les yeux de l'utilisateur de la lumière UV et de la lumière bleue (rayonnement secondaire), (voir Figure 2 à la page 20).

· Lampe d'avertissement laser

Avertit toutes les personnes du rayonnement laser et du rayonnement secondaire dans la zone laser.

· Interrupteur à clé

Permet de faire en sorte que seules les personnes autorisées puissent activer le laser.

2.8 Étiquettes d'avertissement sur le système laser

La figure suivante indique la position des étiquettes d'avertissement sur le système laser.

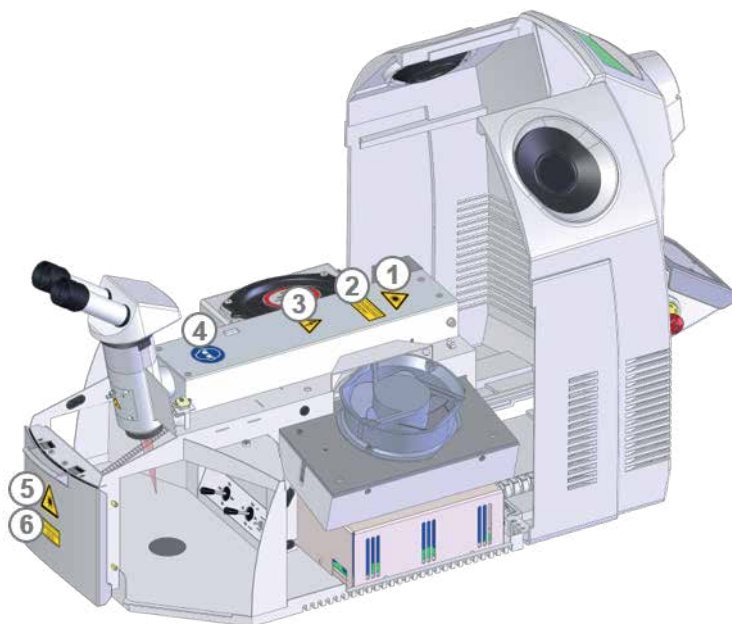
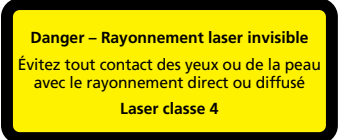
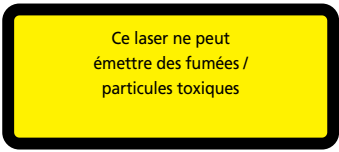
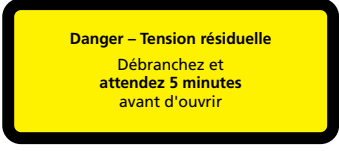


Figure 1 : Position des étiquettes d'avertissement sur le système laser

① ⑤		Étiquette d'avertissement <i>Attention rayonnement laser</i>
②		Étiquette d'avertissement <i>Classe de laser 4</i> pour avertir du rayonnement laser
⑥		Étiquette d'avertissement pour le marquage de l'ouverture de sortie du rayon laser
③		Étiquette d'avertissement de l'alimentation électrique au niveau de la zone dangereuse à l'intérieur du capot
④		Panneau d'obligation <i>Porter des lunettes de protection</i> pour la protection contre le rayonnement laser et le rayonnement secondaire

Il existe en outre les étiquettes d'avertissement suivantes, qui ne sont pas représentées dans la figure :

	Étiquette d'avertissement pour prévenir de la fumée toxique et des particules
	Signe d'avertissement <i>Danger – Tension résiduelle...attendez 5 minutes</i> au point de danger à l'intérieur du boîtier. Il met en garde contre la tension électrique dangereuse qui peut encore être présente sur les composants marqués de cette étiquette d'avertissement jusqu'à 5 minutes après le débranchement de la fiche secteur.
	Panneau d'obligation <i>Débrancher la fiche de réseau avant l'ouverture</i> au niveau de toutes les ouvertures du boîtier
	Mention indiquant que seule de l'eau déionisée (DI) doit être utilisée, sur le réservoir de liquide de refroidissement
	Panneau d'obligation <i>respecter les instructions du mode d'emploi</i>

Des informations concernant la longueur d'onde et la puissance du système laser se trouvent sur la plaque d'identité située à l'arrière du système laser.

 **ATTENTION**

Les étiquettes d'avertissement doivent toujours être visibles !

- ▶ Quelles que soient les circonstances, respectez les instructions marquées sur les étiquettes d'avertissement apposées sur le système laser.
- ▶ Remplacez immédiatement les étiquettes d'avertissement illisibles ou endommagées. Elles peuvent être commandées via Dentaurum.
- ▶ À partir du moment où les étiquettes d'avertissement ne sont plus immédiatement lisibles au premier coup d'œil, le système laser doit immédiatement être mis hors service jusqu'au remplacement des étiquettes concernées.

3 Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures :

Largeur x profondeur x hauteur	510 mm x 500 mm x 630 mm
Poids	env. 42 kg

Raccordement électrique :

Monophasé	200 V - 240 V / 50 Hz - 60 Hz / 10 A
Disjoncteur de réseau nécessaire	16 A avec disjoncteur différentiel
Coupe-circuit (interne)	Protecteur thermique 10 A, à côté de la fiche de réseau

Laser :

Cristal de laser	Nd: YAG, stimulé par une lampe flash
Longueur d'onde	1064 nm (invisible, proche infrarouge)
Classe de protection laser	4
Puissance moyenne	60 W
Energie d'impulsion	50 J
Puissance de crête de l'impulsion	5,0 kW
Durée d'impulsion	0,5 ms - 20 ms
Fréquence d'impulsion	impulsion unique ... 25 Hz
Générateur d'impulsions	4 types d'impulsions préprogrammées
Refroidissement du laser	échangeur de chaleur eau/air incorporé.
Quantité de liquide de refroidissement	5 l d'eau déminéralisée (conductance inférieure à 5 µS/cm)

Chambre de travail :

Volet de chargement (l x h)	184 mm x 139 mm
Hauteur maximale	192 mm
Profondeur maximale	232 mm
Largeur maximale	475 mm
Capacité de charge maximale	20 kg

Soudage :

Point focal Ø	0,2 mm - 2,0 mm
Objectif d'observation	Embout du microscope
	Oculaire 16x, champ de vision Ø 16 mm
Distance focale	120 mm
Alimentation en gaz de protection	1 fixe, 1 flexible ; blocables séparément
Aspiration de fumée	Intégré avec filtre HEPA de la classe H14 conforme à la norme DIN EN 1822-1
	et tapis de préfiltrage de la classe F5 conforme à la norme DIN EN 779
Buse à air comprimé de refroidissement	Intégrée
Mémoire du programme	39 ensembles de paramètres programmables

Valeur totale des vibrations :	> 2,5 m/s ²
---------------------------------------	------------------------

Émission de bruit :

Niveau de pression acoustique
d'émission pondéré A <70 dB(A)

Capot :

Type de protection selon EN 60529 IP 20

4 Description du système laser

4.1 Domaines d'application

Le système de soudage au laser desktop Compact est un banc compact avec chambre de soudage fermée pour une utilisation dans l'artisanat, pour le soudage au laser de composants métalliques.

Le système laser est conçu pour une utilisation en atelier et en laboratoire, comme dans des laboratoires dentaires et des ateliers d'orfèvrerie.

Le laser délivre de courtes impulsions laser invisibles de haute puissance énergétique, avec une longueur d'onde de 1064 nm.

Le système laser doit uniquement être utilisé en conformité avec sa destination conventionnelle voir page 7.

4.2 Principe fondamental du soudage au laser

Le terme « laser » est l'acronyme de « **L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation » (amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement).

Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement lumineux) amplifiée par émission stimulée.

La lumière laser est invisible.

Votre système laser comporte un milieu amplificateur de lumière sous forme de barreau de cristal en grenat d'yttrium et d'aluminium dopé au néodyme (Nd:YAG), ledit barreau étant stimulé par une impulsion de lumière provenant d'une lampe flash en forme de barreau. Un réflecteur à haute performance assure une utilisation et une injection efficaces de la lumière de la lampe dans le cristal laser. Pour permettre la diffusion d'une lumière laser amplifiée et dirigée, deux miroirs sont situés en dehors du cristal dans le résonateur de sorte que la lumière émise du cristal soit à nouveau réfléchi en retour sur elle-même et vers le cristal. Un des miroirs est partiellement réfléchissant et permet ainsi d'extraire le rayonnement laser utilisable fortement dirigé du résonateur.

La plage des longueurs d'onde de ce rayonnement est étroitement limitée à 1 064 nm.

La forte dépendance de la direction et l'étroite plage des longueurs d'onde permettent alors de créer une extrême concentration de l'énergie laser sur la pièce de travail. Cette concentration d'énergie dépasse de loin la concentration possible pouvant être générée avec des sources lumineuses classiques. La concentration élevée et de courte durée de l'énergie laser sur une surface limitée génère la chaleur nécessaire à la fusion.

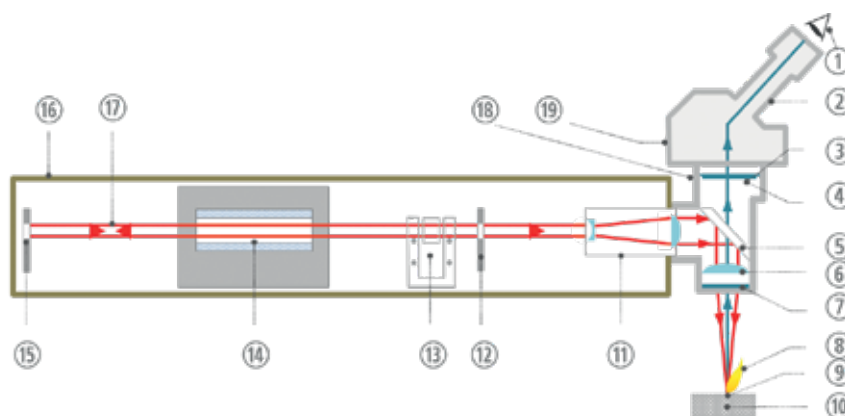


Figure 2 : Représentation schématique du trajet du faisceau laser

- | | |
|---|--|
| ① Yeux | ⑪ Télescope |
| ② Oculaire | ⑫ Miroir de sortie |
| ③ Volet LCD (protection anti-éblouissement et UV) | ⑬ Volet de sécurité |
| ④ Verre de protection laser | ⑭ Chambre de pompe avec lampe flash et barreau laser |
| ⑤ Miroir de déviation | ⑮ Miroir arrière |
| ⑥ Lentille de focalisation | ⑯ Résonateur |
| ⑦ Verre de protection | ⑰ Rayon laser |
| ⑧ Faisceau de plasma | ⑱ Colonne de renvoi |
| ⑨ Tache focale | ⑲ Embout du microscope |
| ⑩ Pièce de travail | |

Sous l'effet du rayon laser, dans la région focale, la pièce de travail est chauffée au-delà des températures de fusion des métaux à assembler et ainsi fluidifiée, ce qui engendre un mélange réciproque. Après la durée d'application relativement courte du laser (quelques millisecondes), les matériaux fondus se solidifient à nouveau et forment ainsi une liaison fixe.

Pendant l'opération de soudage, vous pouvez guider le fil de soudure afin d'appliquer du matériau et de réparer les imperfections sur votre pièce de travail.

Dans un circuit d'eau de refroidissement fermé, l'eau de refroidissement filtrée et nettoyée est dirigée par la chambre de pompe du laser et refroidit ainsi la lampe flash et le barreau laser. La chaleur générée est évacuée dans l'air ambiant par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur et d'un ventilateur.

Vous pouvez utiliser du gaz de protection, par exemple de l'argon, pour protéger le cordon de soudure de l'oxydation causée par l'oxygène de l'air. Vous pouvez injecter le gaz de protection directement sur le point de soudure à l'aide d'une buse. Lors du déclenchement du laser, le flux de gaz est automatiquement régulé par l'intermédiaire de la pédale.

La fumée de soudage provenant de l'opération de soudage est aspirée et filtrée.

4.3 Aperçu du principe de fonctionnement

La figure suivante montre le système laser et ses principaux éléments de commande.

La pièce de travail est placée dans la chambre de soudage intégrée et sécurisée via le volet de chargement avant. Les deux passages de mains latéraux permettent de positionner la pièce de travail manuellement sous l'embout du microscope et de la maintenir pour le soudage. Lorsque les deux mains sont placées dans les colliers en cuir des passages de mains, aucun rayonnement laser ne peut sortir de la chambre de soudage.

Le gaz de protection éventuellement nécessaire et l'impulsion laser sont activés et déclenchés via une pédale à deux niveaux. Pendant et après l'usinage, la fumée de soudage est aspirée automatiquement.



Figure 3 : desktop Compact avec volet de chargement ouvert

Les éléments de la chambre de soudage sont décrits dans la section Figure 5 à la page 23.

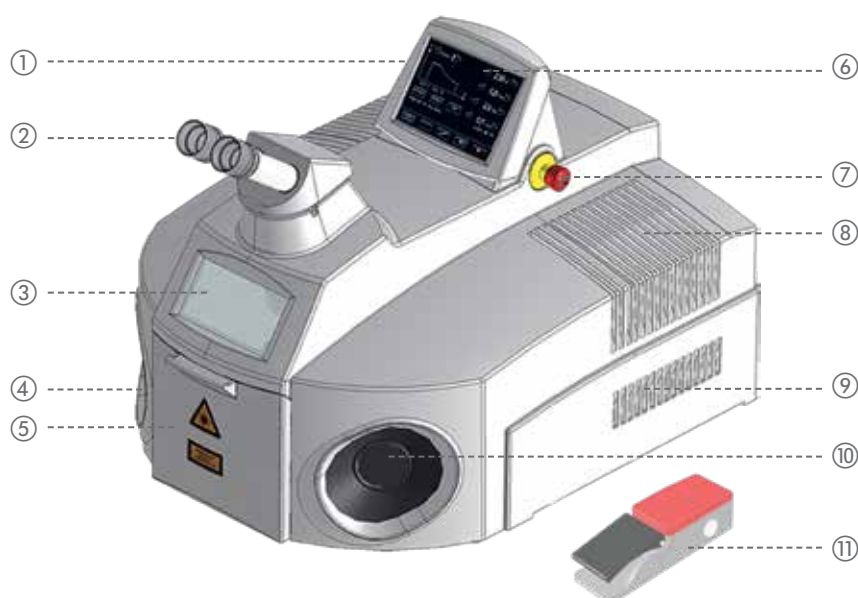


Figure 4 : APERÇU – Vue extérieure

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① Interrupteur à clé (caché) | ⑦ Bouton d'arrêt d'urgence |
| ② Embout du microscope | ⑧ Fentes d'aération de l'air vicié |
| ③ Fenêtre de protection laser avec vue dans la chambre de soudage | ⑨ Fentes d'aération de l'air entrant |
| ④ Passage des mains à gauche | ⑩ Passage des mains à droite |
| ⑤ Volet de chargement | ⑪ Pédale |
| ⑥ Écran tactile | |

4.4 Tête laser et embout du microscope

À l'aide de l'embout du microscope, positionnez uniquement la partie souhaitée de la pièce de travail sous le rayon laser dans la chambre de soudage.

La hauteur à laquelle un objet apparaît de manière nette dans l'embout du microscope correspond à la tache focale du laser (par ex. 90 mm, 120 mm ou 150 mm sous la sortie du rayon, selon la lentille de focalisation utilisée). C'est la hauteur idéale pour traiter la pièce de travail (voir également Figure 5 à la page 23).

Un filtre de protection est intégré à l'embout du microscope, et protège les yeux du rayonnement laser et du rayonnement UV intense qui apparaissent lors des opérations de soudage. De même, un volet de sécurité permet de protéger les yeux, assombrissant l'embout du microscope pendant la courte durée d'une impulsion laser.

Pour régler l'embout du microscope selon vos besoins personnels, reportez-vous page 37.

4.5 Chambre de soudage

La chambre de soudage protège les yeux de l'utilisateur, ainsi que les yeux et la peau des autres personnes, contre le rayonnement laser.

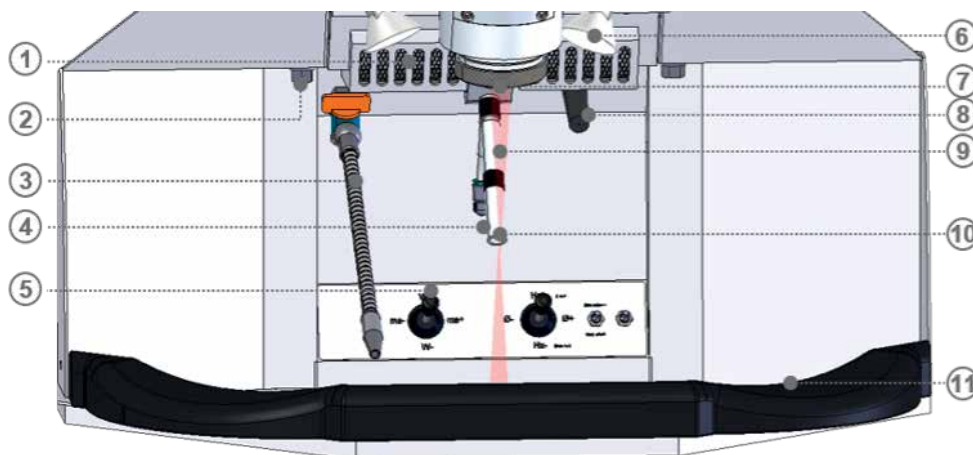


Figure 5 : Chambre de soudage

- ① Dispositif d'aspiration de fumée
- ② Vis de fixation du porte-filtre du dispositif d'aspiration de fumée (2x)
- ③ Buse à gaz protecteur flexible
- ④ Buse pivotante pour gaz de protection (réglable en hauteur par rotation)
- ⑤ Éléments de commande de la chambre de soudage (pour de plus amples informations, voir page 36)
- ⑥ Lampes LED (2x) pour l'éclairage de la chambre de soudage
- ⑦ Sortie du rayon avec verre de protection
- ⑧ Buse coudée à air comprimé pour le refroidissement
- ⑨ Rayon laser, invisible (infrarouge)
- ⑩ Tache focale du rayon laser et de l'embout du microscope
- ⑪ Repose-main

La chambre de soudage contient tous les éléments de commande nécessaires à un soudage manuel confortable : joysticks et interrupteurs à bascule. Ceux-ci se trouvent en bas et à l'arrière de la chambre de soudage (pour plus de détails, voir page 25). Il est possible de regarder dans la chambre de soudage depuis l'extérieur grâce à la fenêtre de protection fermée et sécurisée.

Le rayon laser sort de l'objectif optique au centre, en haut. La lentille de focalisation de l'objectif optique est munie d'un verre qui protège la lentille de tout dommage. Le verre de protection doit toujours être intact et propre afin de garantir en permanence la pleine puissance de laser pour l'opération de soudage.

La chambre de soudage et la pièce de travail sont éclairées par des lampes performantes qui se trouvent à droite et à gauche de la sortie du rayon. La luminosité des lampes halogènes peut être réglée via un variateur (en option).

Les deux buses pour gaz de protection vous permettent, le cas échéant, de guider le gaz de protection vers le point de soudure sur la pièce de travail.

La buse coudée permet de refroidir la pièce de travail avec de l'air comprimé.

Les ouvertures du dispositif d'aspiration de la fumée de soudage se trouvent en haut derrière la sortie du rayon.

La figure suivante montre les dimensions de la chambre de soudage (en mm) :



Figure 6 : Dimensions de la chambre de soudage

4.6 Éléments de commande

Ce chapitre décrit chaque élément de commande du système laser.

4.6.1 Interrupteur à clé

Voir Figure 4 à la page 22.

L'interrupteur à clé du desktop Compact permet d'activer le système laser. Ainsi, toutes les unités du desktop Compact sont alimentées en courant.



4.6.2 Bouton d'arrêt d'urgence

Voir Figure 4 à la page 22.

Le bouton d'arrêt d'urgence est destiné à l'arrêt immédiat du laser et du système de mouvement en situation critique.

Voir aussi : *Bouton d'arrêt d'urgence* à la page 15.



4.6.3 Écran tactile

L'écran tactile permet de commander le laser.



Figure 7 : Écran tactile

Voir aussi Figure 4 à la page 22.

4.6.4 Éléments de commande dans la chambre de soudage

Les éléments de commande suivants se trouvent dans la chambre de soudage :

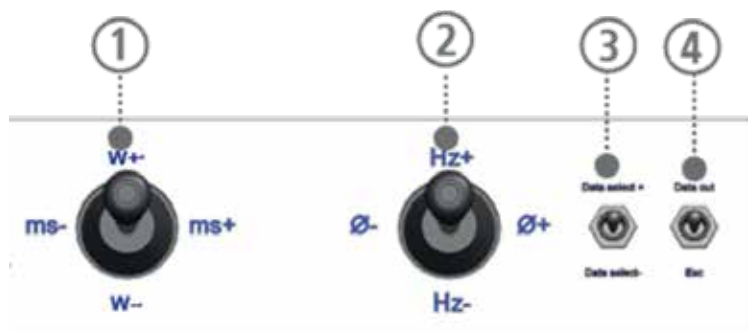



Figure 8 : Éléments de commande de la chambre de soudage

- ① Joystick pour régler les paramètres laser Puissance laser W+, W- et la durée d'impulsion ms-, ms+
- ② Joystick pour régler les paramètres laser fréquence d'impulsion Hz+, Hz- et diamètre du faisceau Ø-, Ø+
En mode sélection des ensembles de paramètres, ce joystick est aussi utilisé pour confirmer ou interrompre la sélection d'un ensemble de paramètres. Dans ce cas, Hz+ signifie *Interruption* et Hz- signifie *Confirmation*
- ③ Interrupteur pour sélectionner des ensembles de paramètres enregistrés
- ④ Interrupteur non affecté sur ce système laser

4.6.5 Pédale

La pédale à deux niveaux vous permet de faire affluer du gaz de protection et de déclencher les impulsions laser.

Voir aussi : *Utiliser la pédale* à la page 30.

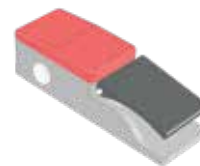

4.7 Raccordements externes et plaque d'identité

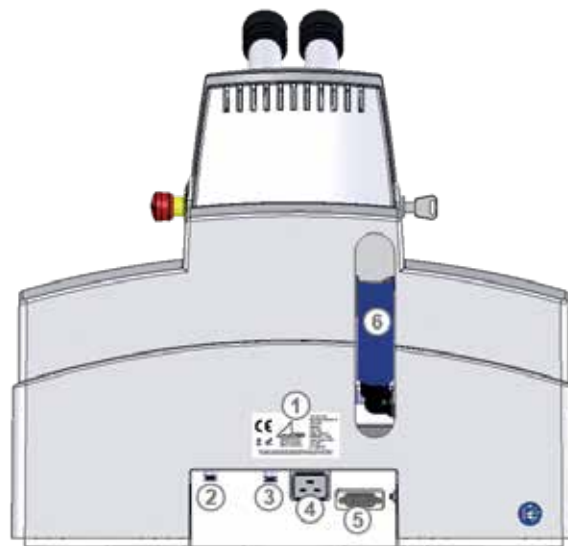


Figure 9 : Raccordements externes

- ① Plaque d'identité
- ② Raccordement du gaz de protection
Le régulateur de pression de la bouteille de gaz doit être réglable sur une plage de 1 l/min à 10 l/min. Un débit de gaz d'environ 3 l/min - 7 l/min est recommandé.
- ③ Raccordement d'air comprimé
- ④ Raccordement au réseau
- ⑤ Raccordement de la pédale
- ⑥ Tuyau de remplissage pour effectuer un remplissage d'eau de refroidissement/une vidange

5 Installation et mise en service



ATTENTION

Sans mesures de protection organisationnelles et individuelles de l'opérateur, le système laser est dangereux !

- Ne mettez le système laser sous tension qu'après avoir lu et compris ce manuel d'instructions et en particulier le chapitre *Sécurité* !
- Ne mettez le système laser en service que s'il est dans un état impeccable.

La sécurité d'exploitation du système laser n'est assurée que si les consignes précitées sont respectées.



ATTENTION

Un écoulement d'eau de refroidissement ou le gel peuvent endommager le système laser !

- Avant tout transport, videz le réservoir d'eau de refroidissement.

5.1 Conditions ambiantes

Température ambiante	10 °C - 30 °C
	Aucun rayon direct du soleil
Température de transport et de stockage	0 °C - 70 °C
Humidité rel. max. de l'air	5 % - 85 %
Hauteur d'installation max. au-dessus du niveau de la mer NN	3.000 m
Écart à droite et à gauche avec la paroi	Au moins 10 cm



ATTENTION

- Le système laser ne doit pas être utilisé dans une atmosphère explosive.

5.2 Dimensions d'encombrement

Vous trouverez une vue d'ensemble des dimensions au chapitre *Caractéristiques techniques* à la page 18.

5.3 Effectuer l'inspection de réception

Contrôlez le système laser lors de sa réception en observant les points suivants :

- Vérifiez l'état de l'emballage et du système laser pour détecter d'éventuels dommages visibles.



ATTENTION

Un système laser endommagé peut entraîner des blessures !

- Ne mettez le système laser en service que si vous êtes sûr qu'il ne présente aucun dommage.
- Un emballage endommagé doit immédiatement être signalé au transporteur. Documenter les dommages pour les droits de recours ultérieurs.

- Vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide de la liste de colisage.

Sont compris dans le volume de livraison du desktop Compact :

- Pédale
- Accessoires en option commandés en plus

5.4 Vérifier le raccordement au réseau local

Avant de raccorder le système laser au réseau local, vous devez impérativement vérifier si celui-ci répond aux caractéristiques requises pour le système laser (voir *Caractéristiques techniques* à la page 18).

5.5 Installer le système laser

- Installez le système laser dans un endroit approprié. Pour cela, veillez à respecter les *Conditions ambiantes* à la page 27 requises, ainsi que les *Dimensions d'encombrement* à la page 27.

Respectez en outre les points suivants :

- Le sol sous le système laser doit être plan. Le système laser ne doit pas vaciller.
- Le sol doit présenter une capacité de charge suffisante. Pour compenser les éventuelles petites inégalités sous le système laser, utilisez uniquement du matériel antidérapant.
- Installez le système laser si possible à un endroit exempt de poussière et protégé contre le rayonnement solaire direct.
- Réglez la hauteur optimale du siège. Le système laser est correctement installé lorsque l'on est assis bien droit et que l'on peut regarder confortablement par l'embout du microscope. Ces conditions permettent de s'assurer de la hauteur optimale du siège réglable en hauteur.



ATTENTION

Le système laser est lourd !

Le desktop Compact pèse env. 42 kg.

- Quand vous déplacez l'appareil, respectez les consignes correspondantes relatives à l'opérateur.



CONSEIL

Utilisation de la cale « Ergo »

Pour une position de travail ergonomique optimale, pour augmenter notamment la hauteur des bancs ou lorsque l'utilisateur est petit, nous vous recommandons d'utiliser la cale « Ergo » qui vous permet d'incliner l'embout du microscope à un angle de 5° à 25°.

5.6 Remplir l'eau de refroidissement



ATTENTION

Utiliser uniquement de l'eau déminéralisée !

Pour la capacité de fonctionnement et la durée de vie du système laser, il est important d'utiliser uniquement de l'eau de refroidissement déminéralisée et filtrée !

Si une autre eau est utilisée, il se peut que la lampe flash ne s'allume plus et que des composants importants se corrodent.

- ▶ Utilisez uniquement de l'eau déminéralisée avec une conductance inférieure à 5 µS/cm comme eau de refroidissement.
- ▶ Changez l'eau de refroidissement et le filtre particulaire **tous les ans et/ou après 1 000 heures de fonctionnement**, selon ce qui arrive en premier (voir *Changer l'eau de refroidissement et le filtre particulaire* à la page 52).
- ▶ Avant la première mise en service, versez environ 5 litres d'eau de refroidissement *déminéralisée* avec une conductance inférieure à <5 µS/cm dans le réservoir d'eau de refroidissement du desktop Compact à l'aide du tuyau de remplissage situé en partie arrière. .
- ▶ Avant chaque transport du desktop Compact, videz le réservoir d'eau de refroidissement à l'aide du tuyau de remplissage situé en partie arrière et ouvrez la chambre de pompe quelques secondes. Vous éviterez ainsi des dommages dus à un écoulement ou au gel de l'eau de refroidissement.



ATTENTION

Risque de dérapage !

- ▶ Pour éviter tout risque de dérapage, essuyez l'eau de refroidissement renversée.

Voir aussi : *Changer l'eau de refroidissement et le filtre particulaire* à la page 52

5.7 Raccorder le courant, les composants et le gaz de protection

- ▶ Branchez la pédale et tous les autres raccordements nécessaires au système laser désactivé.
- ▶ Le cas échéant, raccordez l'air comprimé à l'aide du tuyau bleu fourni. Cela vous permet de raccourcir le temps de refroidissement des pièces de travail. La pression maximale admissible est de 6 bar.
- ▶ Branchez le système laser à la prise de secteur locale.



ATTENTION

Danger à cause de l'électricité !

- ▶ Lors du branchement du système laser à la prise secteur locale, respectez les consignes de sécurité du chapitre *Protection contre les risques d'origine électrique* à la page 11.

Voir aussi : *Raccordements externes et plaque d'identité* à la page 26.

5.8 Garantir la sécurité du système laser

Assurez-vous que vous avez pris toutes les mesures de protection requises pour l'exploitation sûre du système laser, en particulier contre le rayonnement laser.

Voir aussi :

Sécurité à la page 7.

Obligations de l'opérateur à la page 14.

Obligations de l'utilisateur à la page 14.

6. Utilisation

Ce chapitre explique comment utiliser le système laser.

6.1 Mettre en marche le système laser



ATTENTION

- ▶ Ne mettez le système laser en marche qu'après avoir lu et compris ce manuel d'instructions et en particulier le chapitre *Sécurité* !
- ▶ Avant la mise en marche, consultez la check-list quotidienne du plan d'inspection et de maintenance (voir page 43).
- ▶ Ouvrez la bouteille de gaz avec le gaz de protection, le cas échéant.
- ▶ Activez l'interrupteur à clé.
- ▶ Si vous avez préalablement réalisé des travaux de maintenance sur le desktop Compact (changement de la lampe flash, remplissage de l'eau de refroidissement, etc.), attendez environ cinq minutes avant de souder.

6.2 Positionner la pièce de travail




CONSEIL

Pour positionner parfaitement la pièce de travail, vérifiez qu'en regardant la pièce de travail par l'embout du microscope, la mise au point soit bien faite (pour cela, l'embout du microscope doit être réglé sur vos réglages personnels pour vos yeux, voir *Utiliser l'embout du microscope* à la page 37).

6.3 Utiliser la pédale

De série, le système laser est équipé de la pédale à deux niveaux standard. Elle vous permet de déclencher des impulsions laser et de procéder à une alimentation en gaz de protection.

Au premier niveau, du gaz de protection afflue. Au second niveau, les impulsions laser sont déclenchées. Ainsi, le gaz de protection peut chasser l'air ambiant autour de la zone de soudage avant que l'opération de soudage ne commence. Un cordon de soudure exempt d'oxyde est ainsi garanti.

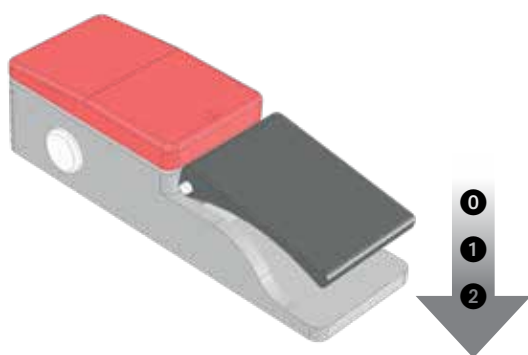

Niveau 0 – Position de base, à savoir OFF

Niveau 1 – Le gaz de protection afflue

Niveau 2 – Le laser est activé

Figure 10 : Pédale à deux niveaux (standard)

Déclencher les impulsions laser et acheminer le gaz de protection

Condition préalable : Vous avez appuyé sur le bouton **Ouvrir le volet de sécurité**  pour ouvrir le volet de sécurité et vous portez des lunettes de protection.

Les LED vertes  des boutons **Ouvrir le volet de sécurité**  et **Laser OK** s'allument.

- ▶ Actionnez le bouton à deux niveaux de la pédale jusqu'au premier niveau.
Le gaz de protection afflue.
- ▶ Actionnez le bouton à deux niveaux de la pédale jusqu'au second niveau.
Le gaz de protection continue d'affluer.
Le laser délivre des impulsions avec les valeurs réglées des paramètres d'impulsion et vous pouvez procéder au soudage.
- ▶ Lorsque vous avez terminé l'opération de soudage, relâchez la pédale.
Après avoir relâché la pédale, du gaz continue d'affluer pendant un temps donné.

6.4 Utiliser du gaz de protection

Nous vous conseillons d'utiliser du gaz de protection pour protéger la soudure contre l'oxydation (voir aussi *Principe fondamental du soudage au laser* à la page 19 et l'entrée *Gaz de protection* du glossaire).

Pour le soudage avec gaz de protection :

- ▶ Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz et assurez-vous que le débit de gaz souhaité est réglé niveau du régulateur de pression de la bouteille de gaz. Un débit de gaz d'environ 3 l/min - 7 l/min est recommandé.
- ▶ Appuyez sur le bouton **Ouvrir le volet de sécurité**  afin d'ouvrir le volet de sécurité.
- ▶ Guidez le gaz de protection avec la buse pour gaz de protection souhaitée (voir Figure 5 à la page 23) sur le point de soudure de la pièce de travail. La buse pour gaz de protection flexible s'ouvre et se ferme avec le robinet rotatif. La buse pivotante pour gaz de protection peut être pivotée vers l'avant et l'arrière, et est également réglable en hauteur. En position arrière, le débit de gaz est ininterrompu, en position avant, le gaz de protection est directement acheminé vers la tache focale du laser. La hauteur de l'ouverture de la buse est réglable en tournant la buse de 5 mm.



Lors du soudage de matériaux uniques, par ex. le titane, il est recommandé que les deux buses pour gaz de protection se trouvent à la même position, afin de protéger la soudure de l'oxydation aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.

- ▶ Commencez par enfoncer pendant quelques secondes le premier bouton à deux niveaux de la pédale jusqu'au premier niveau pour que le gaz de protection afflue et puisse se répartir sur la pièce de travail.
- ▶ Enfoncez le bouton à deux niveaux de la pédale jusqu'au second niveau.
Des impulsions laser sont délivrées.
- ▶ Refermez la vanne de la bouteille de gaz de protection à la fin de l'opération.

6.5 Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile vous permet de commander le laser, mais aussi de modifier les réglages système.

Après le démarrage du desktop Compact, la fenêtre principale s'affiche en mode standard sur l'écran tactile :



Figure 11 : Fenêtre principale de l'écran tactile – Mode standard

- ① Sélectionner la forme d'impulsion
- ② Affichage de l'énergie d'impulsion (J) et de la puissance d'impulsion (W) actuelles
- ③ Enregistrer et charger des ensembles de paramètres
- ④ Barre de symboles permettant d'afficher les messages d'état et d'erreur (Interlocks)
- ⑤ Barre de menu
- ⑥ Réinitialiser un message d'erreur
- ⑦ *Non affecté*
- ⑧ Ouvre le menu des options
- ⑨ S'allume en rouge lorsque le volet de sécurité est fermé
- ⑩ S'allume en vert lorsque le volet de sécurité est ouvert (voir page 15)
- ⑪ Indicateur d'état de la commande laser
- ⑫ Régler les paramètres laser

6.6 Régler les paramètres laser

Les paramètres laser nécessaires dépendent fortement des matériaux concernés et des épaisseurs des pièces de travail. Les valeurs exactes découlent du fin réglage effectué sur la pièce d'ouvrage. Vos distributeurs peuvent vous donner régulièrement des conseils et des valeurs empiriques. Ici, seules des directives très générales peuvent être indiquées pour les réglages des paramètres laser.

La représentation suivante, non fidèle à la réalité, explique le déroulement du faisceau laser lors de l'impulsion :

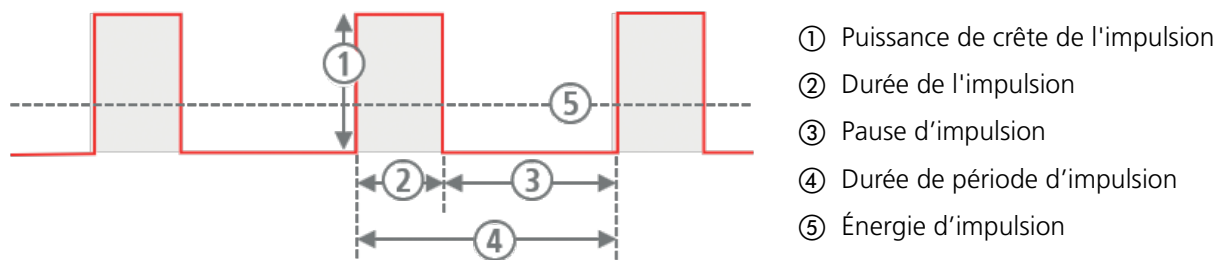


Figure 12 : Paramètres laser

Vous pouvez régler les paramètres laser suivants :

- Puissance de crête d'impulsion via la Puissance laser (en W)
- Durée d'impulsion (en ms)
- Fréquence d'impulsion (en Hz)
- Diamètre du faisceau ($\varnothing$ en 0,2 mm) sur la pièce de travail
- Forme d'impulsion. La forme de base d'une impulsion laser est à peu près rectangulaire, mais vous pouvez utiliser également d'autres formes d'impulsion.

AVIS

Les paramètres laser Puissance laser, durée d'impulsion et fréquence d'impulsion définissent la puissance moyenne du laser. La puissance moyenne du laser est limitée par les performances du desktop Compact.

Si vous augmentez la Puissance laser et/ou la durée d'impulsion, le système laser réduit automatiquement la fréquence d'impulsion dès que le seuil des performances du système laser est atteint. Dans ce cas, la valeur de la fréquence d'impulsion est automatiquement réduite.

ATTENTION

Plus la Puissance laser et la durée d'impulsion sont élevées, plus la lampe flash s'use rapidement !

Vous avez plusieurs possibilités pour régler les paramètres laser :

- Via l'écran tactile
- Via les deux joysticks dans la chambre de soudage


Régler les paramètres laser

Vous pouvez modifier la valeur des paramètres laser Puissance laser (W), durée d'impulsion (ms), fréquence d'impulsion (Hz) et diamètre du faisceau (mm).



- À l'aide des flèches **Gauche/Droite** [←] / [→] augmentez ou diminuez la valeur actuelle du paramètre laser souhaité. La nouvelle valeur est affichée entre les flèches du paramètre laser donné. L'énergie d'impulsion (J) et la puissance d'impulsion (W) correspondantes sont affichées sous la forme d'impulsion.

Régler la forme d'impulsion

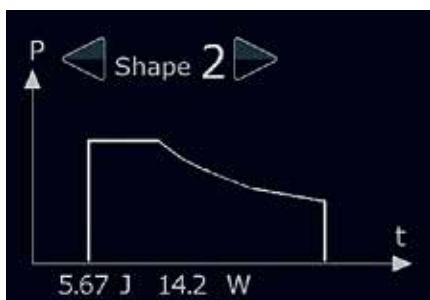

Vous pouvez sélectionner parmi quatre formes d'impulsion prédéfinies pour influencer la répartition de la puissance au sein d'une impulsion.

- Appuyez sur les flèches **Gauche/Droite** [←] / [→], jusqu'à ce que la forme d'impulsion souhaitée soit affichée. La forme d'impulsion souhaitée est affichée entre les flèches. Par ailleurs, la forme de l'impulsion est représentée dans le graphique.

6.7 Enregistrer et charger un ensemble de paramètres

Vous pouvez enregistrer les paramètres laser que vous utilisez fréquemment en tant qu'ensemble de paramètres dans la base de données du desktop Compact, puis les charger à tout moment.

Mxx : affiche le numéro d'emplacement d'enregistrement de l'ensemble de paramètres actuel (M01 - M39).

M00 signifie que les paramètres laser actuels ne sont pas disponibles en tant qu'ensemble de paramètres dans la base de données. Au démarrage du desktop Compact, **M00** est toujours affiché.

Le texte de description de l'ensemble de paramètres est affiché à côté. Ce dernier peut être modifié.



Figure 13 : Affichage d'ensemble de paramètres

Enregistrer un ensemble de paramètres

► Appuyez sur le bouton **Enregistrer un ensemble de paramètres** . La flèche devient orange et les deux boutons situés à gauche et à droite changent de fonction. Elles servent maintenant à sélectionner le numéro de l'emplacement mémoire. Les deux boutons de la barre de menu changent également de fonction :



Figure 14 : Fenêtre principale de l'écran tactile – Enregistrer un ensemble de paramètres dans ce mode

- Appuyez sur les boutons **Moins / Plus**  /  , jusqu'à ce que l'emplacement d'enregistrement souhaité soit affiché (M01 - M39).
- Appuyez sur le bouton **Entrée**  , pour enregistrer les valeurs de paramètres laser actuelles en tant qu'ensemble de paramètres à l'emplacement d'enregistrement sélectionné.

Ou : Appuyez sur le bouton **Annuler**  , pour revenir au mode standard sans enregistrer.

Si vous n'appuyez sur aucun de ces deux boutons pendant 3 secondes, la fenêtre principale repasse automatiquement en mode standard.

Charger un ensemble de paramètres

- Appuyez sur le bouton **Charger l'ensemble de paramètres**  . La flèche marquée sur la touche s'allume en vert et les deux touches situées à droite et à gauche changent de fonction. Elles servent maintenant à sélectionner le numéro de l'emplacement mémoire. Les deux boutons de la barre de menu changent également de fonction :



Figure 15 : Fenêtre principale de l'écran tactile – Charger un ensemble de paramètres dans ce mode

- Appuyez sur les boutons **Moins / Plus** / , jusqu'à ce que l'emplacement d'enregistrement souhaité soit affiché (M01 - M39). Les valeurs de paramètres laser de l'ensemble de paramètres donné sont affichées.
- Appuyez sur la touche **Entrée** , pour charger l'ensemble de paramètres sélectionné.

Ou : Appuyez sur le bouton **Annuler** , pour revenir au mode standard sans charger d'ensemble de paramètres.

Si vous n'appuyez sur aucun de ces deux boutons pendant 3 secondes, la fenêtre principale repasse automatiquement en mode standard.

Modifier le texte de description de l'ensemble de paramètres actuel

- Appuyez sur le bouton Texte .
- Sur le clavier affiché, tapez le texte de description souhaité pour l'ensemble de paramètres :



- ① Champ de texte (max. 23 caractères)
- ② Basculer entre :
aaa: minuscules
AAA: majuscules
123: chiffres
- ③ Espace

Figure 16 : Écran tactile – Clavier permettant de modifier la description

► Appuyez sur la touche **Entrée** , pour enregistrer le texte de description modifié.

Ou : Appuyez sur le bouton **Annuler** , pour revenir au mode standard sans enregistrer.

Si vous n'appuyez sur aucun de ces deux boutons pendant 3 secondes, la fenêtre principale repasse automatiquement en mode normal.

6.8 Ouvrir/fermer le volet de sécurité

► Pour ouvrir le volet de sécurité, appuyez sur le bouton **Ouvrir le volet de sécurité** . Si toutes les conditions sont remplies pour l'émission de l'impulsion laser (voir page 15), le volet de sécurité s'ouvre et le bouton **Ouvrir le volet de sécurité**  s'allume en vert. Vous pouvez à présent déclencher des impulsions laser.

► Pour fermer le volet de sécurité, appuyez sur le bouton **Fermer le volet de sécurité** . Le volet de sécurité se ferme et le bouton **Fermer le volet de sécurité**  s'allume en rouge. Vous ne pouvez plus déclencher des impulsions laser.

6.9 Utiliser l'embout du microscope

Vous pouvez régler l'embout du microscope sur vos réglages personnels pour vos yeux afin d'effectuer avec précision les cordons de soudure les plus fins.

En tant qu'utilisateur, déterminez une seule fois vos réglages personnels du microscope. Notez vos valeurs personnelles (nombre de traits dans la direction +/- pour les deux oculaires). Avant de travailler la prochaine fois sur le système laser, réglez à nouveau vos valeurs personnelles. Ce procédé permet à tous les utilisateurs du système laser de travailler avec les mêmes conditions de faisceau pour les mêmes réglages de focalisation.

L'embout du microscope est équipé d'un oculaire avec un grossissement de 10x.



Figure 17 : Oculaire et œilleton de l'embout de microscope standard

- ① Œilleton en position de base (relevée)
- ② Œilleton glissé en arrière
- ③ Oculaire
- ④ Anneau dioptrique
- ⑤ Tube oculaire



Figure 18 : Oculaire et œillette de l'embout de microscope Leica

- ① Œillette avec bague de protection amovible en position de base (relevé, sans lunettes)
- ② Œillette avec bague de protection amovible rabattu (pour les porteurs de lunettes)
- ③ Oculaire
- ④ Anneau dioptrique
- ⑤ Tube oculaire
- ⑥ Vis de fixation de l'oculaire pour faire pivoter le réticule

Régler l'écart des yeux

- Regardez avec les deux yeux dans les oculaires.
- Rapprochez et écartez les tubes oculaires des deux mains jusqu'à ce que vous ayez trouvé le bon écart des yeux. L'écart des yeux est bien réglé lorsque vous voyez avec les deux yeux une image circulaire unique.

Régler l'écart entre les yeux et les oculaires

L'écart optimal entre les yeux et les oculaires s'élève en général à 22 mm.

- Rapprochez doucement les yeux des oculaires.
- Trouvez l'écart optimal entre les yeux et les oculaires.

Vous avez trouvé l'écart correct lorsque votre champ de vision est intégral et sans ombre.

Établir un contact visuel

Si vous ne portez pas de lunettes et que vous souhaitez un contact rapproché avec les oculaires :

Embout de microscope standard :

- Laissez l'œillette dans la position de base, c'est-à-dire rabattu vers le haut (voir Figure 17 ci-dessus).

Embout de microscope Leica :

- Maintenez l'anneau dioptrique en tournant l'œillette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer.

- Tirez l'œilleton vers le haut jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée.
- Maintenez l'anneau dioptrique en serrant l'œilleton dans le sens des aiguilles d'une montre.

Si vous portez des lunettes :

- Embout de microscope standard : Rabattez l'œilleton vers le bas.
- Réglez les oculaires sur votre acuité visuelle personnelle :
- Embout de microscope standard : Réglez les dioptries sur les deux oculaires sur +|-.
- Positionnez une pièce de travail test plate (par ex. un morceau de tôle) sous l'objectif laser. Réglez la hauteur à l'aide d'une table élévatrice adaptée de façon à faire la mise au point sur l'objet avec l'œil dominant (voir Figure 19, à droite).
- Répétez la dernière étape avec l'œil non dominant. Ce faisant, ne modifiez pas l'emplacement de la pièce de travail test !

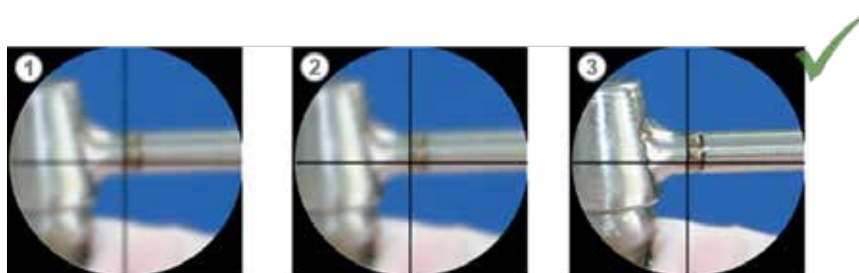


Figure 19 : Régler l'embout du microscope

- ① Tout est flou
- ② Faire la mise au point sur le réticule avec l'anneau optique
- ③ Faire la mise au point sur l'objet

6.10 Soudage

- Réglez les paramètres laser souhaités (voir *Régler les paramètres laser* à la page 33).
- Appuyez sur le bouton **Ouvrir le volet de sécurité**  , afin d'ouvrir le volet de sécurité. Le bouton **Ouvrir le volet de sécurité**  s'allume en vert.
- Visez la zone à souder de la pièce de travail avec l'embout du microscope :
- Regardez par l'embout du microscope.
- Déplacez la pièce de travail dans le champ de vision et faites la mise au point dessus en modifiant l'écart.
- Alignez le réticule sur la zone à souder.
- Alignez la buse du gaz de protection sur la soudure. Vous reconnaîtrez la bonne position de la buse du gaz de protection à la surface brillante de la zone à souder.
- Actionnez le bouton à deux niveaux de la pédale jusqu'au premier niveau. Le gaz de protection afflue.
- Enfoncez le bouton à deux niveaux de la pédale jusqu'au second niveau. Le point de soudure doit se trouver précisément dans le réticule. Si ce n'est pas le cas, vous devez ajuster le miroir de déviation (voir *Ajuster le miroir de déviation et le réticule* à la page 49). Tant que vous enfoncez entièrement la pédale, le laser délivre

des impulsions avec les valeurs réglées et vous pouvez souder. Le dispositif d'aspiration de fumée de soudage aspire la fumée de soudage. Pendant l'impulsion laser, l'embout du microscope s'assombrit brièvement pour protéger vos yeux.

- Déplacez la pièce de travail sous le rayon laser afin de réaliser un cordon de soudure. Adaptez la vitesse à la fréquence d'impulsion pour que les points de soudure sur la pièce de travail se chevauchent suffisamment (env. 80 %). Après l'opération de soudage, le dispositif d'aspiration de fumée de soudage continue de fonctionner pendant un bref moment.
- Appuyez sur le bouton **Fermer le volet de sécurité** , afin de fermer le volet de sécurité. Le bouton **Fermer le volet de sécurité**  s'allume en rouge.
- Si vous avez soudé avec du gaz de protection, fermez à nouveau la vanne de la bouteille de gaz de protection à la fin de l'opération de soudage.

6.11 Afficher et modifier les réglages de base

Vous pouvez afficher et modifier les réglages de base suivants :

- Vitesse du dispositif d'aspiration de fumée de soudage (**Vitesse du ventilateur**)
Définit la vitesse de rotation relative du dispositif d'aspiration de fumée de soudage.
- Durée de marche résiduelle du dispositif d'aspiration de fumée de soudage (**Durée d'arrêt du ventilateur**)
Définit le nombre de secondes après lequel le dispositif d'aspiration de fumée de soudage s'arrête après l'impulsion laser.
- Compteur d'impulsions (**Compteur d'impulsions**)
Indique le nombre actuel d'impulsions laser déclenchées depuis la dernière réinitialisation. (Réinitialisation possible uniquement depuis le menu Service)
- Vider les ensembles de paramètres prédéfinis (**Sélec. ensembles de paramètres prédéfinis**)
Si vous n'avez pas besoin des ensembles de paramètres pré-réglés en usine, vous pouvez les supprimer.
- Rétablir la configuration originale des ensembles de paramètres prédéfinis (**Restaurer ensembles de paramètres prédéfinis**)
Les ensembles de paramètres 1-9 ou 1-15 (en fonction du modèle) contiennent des valeurs de paramètres d'impulsion pré-réglées en usine pour les opérations de soudage courantes. Ces valeurs peuvent être écrasées. Cette fonction vous permet de rétablir la configuration originale des ensembles de paramètres prédéfinis.
- Débit de liquide de refroidissement (**Débit**)
Affiche le débit actuel de liquide de refroidissement en l/min (affichage uniquement).
- Variateur dédié aux lampes halogènes (**Lampes halogènes**)
Définit la clarté de l'éclairage dans la chambre de soudage. **Indiquez au maximum 80 % !**
- Activer et désactiver la fonction *Micro-soudage* (**Volet de mode**)

Procédure :

La touche  vous permet d'ouvrir le menu d'options dans lequel vous pouvez modifier les réglages de base du desktop Compact et appeler les valeurs du système.

- Appuyez sur le bouton Réglages . Le menu des options s'affiche :



Figure 20 : Écran tactile – Menu des options

- ① **Touche Entrée** : Au niveau des options de menu avec interrogation de la valeur du système, pour actualiser la valeur. La mention **OK** s'affiche ensuite à droite.
 - ② **Boutons Haut/Bas** : Pour sélectionner l'option de menu.
Boutons Gauche/Droite : Au niveau des options de menu avec des valeurs numériques, pour sélectionner la valeur décimale.
 - ③ **Boutons Moins/Plus** :
 Au niveau des options de menu avec des valeurs numériques, pour modifier la valeur décimale.
 Au niveau des options de menu avec options, pour sélectionner une option
- **Modifier une valeur** : Pour modifier la durée de marche résiduelle du dispositif d'aspiration de fumée de soudage, par exemple, utilisez les flèches **Haut/Bas** ▲ / ▼ pour accéder à l'entrée **Durée d'arrêt du ventilateur [s]**, et utilisez les flèches **Gauche/Droite** ◀ / ▶ pour accéder à la valeur décimale que vous souhaitez modifier et modifiez-la à l'aide des boutons **Moins/Plus** ▢ / ▢.
 - **Afficher la valeur système**, par exemple le débit de liquide de refroidissement : Pour afficher le débit actuel du liquide de refroidissement, utilisez les flèches **Haut/Bas** ▲ / ▼ pour accéder à l'entrée **Obtenir débit en l/min** et appuyez sur la touche **Entrée** ▢. La valeur actuelle s'affiche, par ex. **4.3**. L'entrée **OK** indique que la valeur système a bien été interrogée. Procédez de la même façon pour afficher le nombre d'impulsions laser déclenchées (**Obtenir compteur d'impulsions**).
 - Appuyez sur le bouton **Annuler** ESC, pour quitter le menu des options.

6.12 Régler l'éclairage de la chambre de soudage

Vous pouvez régler la clarté des lampes halogènes dans la chambre de soudage à l'aide du menu des options (voir *Afficher et modifier les réglages de base* à la page 40).

6.13 Réinitialiser un message d'erreur

En cas de message d'état ou de message d'erreur (=Interlock), un symbole correspondant apparaît dans la barre de symboles.

S'il s'agit d'un message d'erreur, un panneau Danger rouge apparaît également et le bouton **Reset Interlock**  s'allume en jaune. Dans ce cas, le message doit être réinitialisé après la résolution de l'erreur.



Figure 21 : Écran tactile – Message d'erreur (=Interlock)

- ① Symbole de message d'erreur
- ② Panneau Danger
- ③ Bouton permettant de réinitialiser le message d'erreur

► Appuyez sur le bouton **Reset Interlock**  . La LED jaune s'éteint.

Voir aussi : *Messages et élimination des erreurs* à la page 56.

6.14 Éteindre le système laser

► Appuyez sur le bouton **Fermer le volet de sécurité**  , afin de fermer le volet de sécurité.



AVERTISSEMENT

Rayonnement laser !

- Même en cas de pauses courtes, fermez le volet de sécurité.
- À la fin des travaux de soudage, laissez fonctionner la pompe à liquide de refroidissement encore 5 minutes pour poursuivre le refroidissement.
- Désactivez l'interrupteur à clé.
- Fermez la bouteille de gaz.



AVIS

Éteignez le système laser en cas de non-utilisation prolongée pour économiser la lampe flash.

7 Maintenance

Ce chapitre décrit les tâches de maintenance du système laser devant être effectuées régulièrement ou selon les besoins.

Vous trouverez à la page 61 une liste des pièces de rechange que vous pouvez commander pour le système laser.

Lors de la maintenance, respectez impérativement les consignes de maintenance importantes suivantes.

7.1 Consignes de maintenance importantes



DANGER

Rayonnement laser et électricité !

- ▶ Seule une personne formée à cet effet est autorisée à effectuer les travaux de maintenance décrits dans ce chapitre sur le système laser.
- ▶ Les tâches de maintenance qui ne sont pas décrites dans ce chapitre doivent être effectuées uniquement par des techniciens de service de Dentaforum.
- ▶ N'utilisez que des outils et des appareils de mesure appropriés.
- ▶ Si, lorsque le laser est allumé, il est nécessaire d'effectuer des travaux de maintenance requérant une mise hors service des dispositifs de protection laser, les consignes suivantes s'appliquent :
- ▶ Veillez, pendant les travaux de maintenance, à ce que toutes les personnes présentes dans le local portent des lunettes de protection laser.
- ▶ Si nécessaire, limitez la zone laser par des parois ou des rideaux de protection laser, afin que seules les personnes présentes dans la zone laser doivent porter des lunettes de protection laser.

7.2 Plan d'inspection et de maintenance

Ce plan d'inspection et de maintenance indique les tâches de contrôle et de maintenance qui doivent être effectuées régulièrement sur le système laser.



AVIS

La condition requise pour les droits de garantie est la tenue correcte d'un journal de maintenance. Le formulaire de journal de maintenance est joint à la livraison du système laser.

- ▶ Consignez toutes les tâches de maintenance effectuées dans le journal de maintenance.
- ▶ Veillez également à ce que toutes les réparations soient consignées dans ce journal de maintenance par les techniciens de service.
- ▶ S'il vous faut un nouveau formulaire de journal de maintenance, contactez notre service après-vente.

7.2.1 Contrôler une fois par jour avant le début du travail

- La lampe d'avertissement laser s'allume-t-elle lorsque le volet de sécurité est ouvert ?
- L'ouverture du dispositif d'aspiration des fumées de soudage est-elle propre ?
- Le verre de protection de l'objectif est-il en bon état ? Pas de fissures, égratignures, encrassements ?
- La fenêtre de protection est-elle en bon état ? Pas de fissures, égratignures, encrassements ?
- L'écran tactile fonctionne-t-il bien, en particulier les LED rouge et verte du volet de sécurité ? Les boutons d'ouverture et de fermeture du volet de sécurité passent-ils sans problème du rouge au vert ?
- La pédale fonctionne-t-elle ?

- Les passages de mains sont-ils en bon état ? Est-ce qu'aucun rayonnement laser ne peut sortir ? Pas de trous ni de fissures sur les manchettes ?

7.2.2 Contrôler une fois par semaine

- Le tapis de préfiltrage du dispositif d'aspiration de fumée de soudage est-il fortement encrassé ? Si oui, il faut le remplacer.
- Vérifier l'ajustage du laser avec du papier photographique (voir *Vérifier l'ajustage du laser* à la page 48).

7.2.3 Contrôler une fois par semaine

- Le filtre principal du dispositif d'aspiration de fumée de soudage est-il fortement encrassé ? Si oui, il faut le remplacer. Si oui, il faut le remplacer. Vérifiez encore plus fréquemment si vous traitez des matériaux générant un fort dégagement de fumée !
- Le bouton d'arrêt d'urgence fonctionne-t-il ? Est-il bien fixé mécaniquement ? Commute-t-il correctement ?
- L'interrupteur à clé fonctionne-t-il ?

7.2.4 Contrôler une fois par an

- Changez l'eau de refroidissement déminéralisée avec le filtre particulaire **tous les ans ou après 1 000 heures de fonctionnement**, selon ce qui arrive en premier.

Veillez à respecter absolument ce point car un non-respect peut endommager le système laser (voir *Changer l'eau de refroidissement et le filtre particulaire* à la page 52).

7.3 Ouvrir le système laser

Un grand nombre des pièces nécessitant une maintenance se trouvent sous le capot du système laser. Cette section décrit comment ouvrir et refermer le desktop Compact.




DANGER



Rayonnement laser et électricité !

- Avant d'ouvrir le système laser, éteignez-le, retirez la fiche de réseau et attendez au moins 5 minutes.

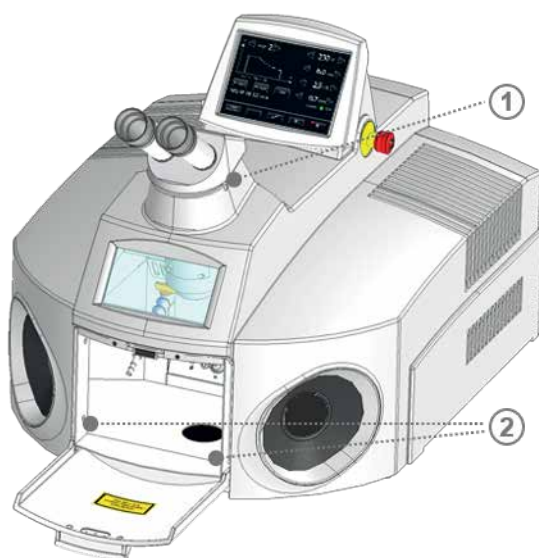

- ① Vis de pression pour le support du microscope (à six pans creux de 3 mm)
- ② Vis de fixation pour le capot (4 pièces)

Figure 22 : Points de fixation du capot

Pour ouvrir le capot, retirez d'abord l'embout du microscope.

Retirer l'embout du microscope


- ▶ Éteignez le système laser.
- ▶ Débranchez la fiche de réseau.
- ▶ Attendez au moins 5 minutes.
- ▶ Desserrez la vis de pression à droite sous l'embout du microscope.
- ▶ Soulevez l'embout du microscope à droite pour le retirer du rail en queue d'aronde. La collerette de l'embout du microscope est fixée avec trois vis (voir Figure 23).
- ▶ Desserrez les trois vis et retirez la collerette en tirant vers le haut.



ATTENTION

L'embout du microscope est sensible !

- ▶ Protégez l'embout du microscope des saletés.
- ▶ Ne touchez aucune surface optique.

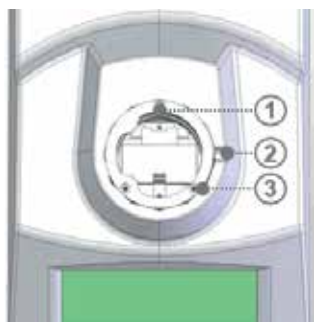

- ① Collerette du microscope
- ② Vis de pression pour le support du microscope (à six pans creux de 3 mm)
- ③ Vis de fixation pour la collerette du microscope (3x)

Figure 23 : Collerette de l'embout du microscope (vue de dessus)

ouvrir le capot

Le capot est fixé par quatre vis dans la zone du volet de chargement.

- ▶ Éteignez le système laser et débranchez la fiche de réseau.
- ▶ Desserrez les quatre vis de fixation dans la zone du volet de chargement (voir Figure 22 à la page 44).
- ▶ Basculez le capot vers l'arrière.



ATTENTION

Le capot ouvert doit être bien mis à plat pour éviter qu'il ne se casse !

- ▶ Posez toujours à plat le couvercle du capot ouvert, par ex. sur un plan de travail.

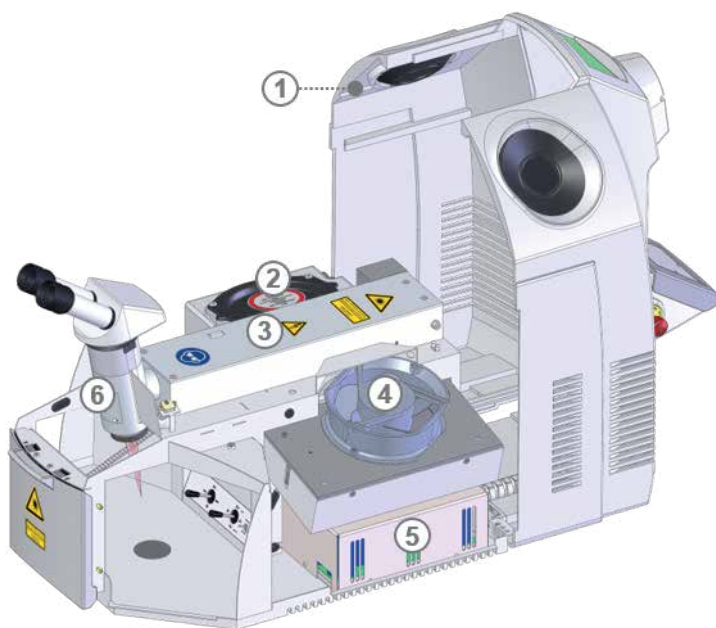


Figure 24 : Système laser avec capot ouvert

- ① Crochet de guidage pour le capot
- ② Réservoir d'eau de refroidissement
- ③ Résonateur avec laser
- ④ Ventilateur
- ⑤ Bloc d'alimentation laser
- ⑥ Miroir de déviation

7.3.1 Refermer le capot

- Fermez le capot en veillant de ne pas coincer le câble.
- Revissez les vis de fixation et fermez les bouchons.
- Accrochez les crochets de guidage du capot dans le bord de la partie inférieure du capot.
- Montez l'embout du microscope (voir ci-dessous).

Remonter l'embout du microscope

- Vissez la collerette de l'embout du microscope avec les trois vis.
- Posez l'embout du microscope dans la collerette du microscope.
- Vissez la vis de pression à droite sous l'embout du microscope. Veillez à ce que l'embout du microscope ne soit pas déformé dans la collerette.
- Ajustez le miroir de déviation (voir page 49).

7.4 Nettoyer le système laser

Respectez les points suivants lors du nettoyage du système laser :

- ▶ Éteignez le système laser et débranchez la fiche de réseau.
- ▶ Essuyez l'extérieur du système laser et la zone de travail avec un chiffon légèrement humide. Pour cela, n'utilisez aucun produit nettoyant agressif.
- ▶ Lavez-vous les mains avant et après le nettoyage.
- ▶ Jetez le chiffon utilisé après le nettoyage.

Désinfecter les surfaces de contact

Les contacts entre la peau/les yeux et les surfaces de contact du système laser (par ex. embout du microscope, clavier ou écran tactile) peuvent contribuer à la transmission d'agents pathogènes, notamment lorsque plusieurs utilisateurs travaillent avec le système laser.

Pour cette raison, désinfectez les surfaces de contact du système laser régulièrement et avant chaque changement d'utilisateur.

Nous recommandons les produits désinfectants suivants :

- Chiffons désinfectants jetables pour les œilletons de l'embout du microscope
- Produit désinfectant pour surfaces à base d'éthanol ou d'isopropanol pour toutes les autres surfaces de contact

Procédure :

- ▶ Nettoyez les œilletons de l'embout du microscope avec un chiffon désinfectant jetable.
- ▶ Pulvérisez du produit désinfectant pour surfaces sur un chiffon en microfibres. Veillez à ce que le chiffon ne soit pas trop humide. La quantité de produit utilisée doit pouvoir s'évaporer après le nettoyage et ne doit pas s'infiltrer dans les fentes.
- ▶ Nettoyez avec précaution les surfaces concernées à l'aide du chiffon.

7.5 Nettoyer et changer le verre de protection

La lentille de focalisation de l'objectif laser est protégée contre l'encrassement et l'endommagement par un verre de protection.


Le verre de protection se trouve au niveau de la sortie du rayon dans la chambre de soudage.

Le verre de protection est une pièce d'usure. Au fil du temps, il peut être endommagé par des projections de particules de métal qui s'y incrustent lors du soudage ou encore s'encrasser par les poussières de soudage.

Un verre de protection souillé ou endommagé engendre une réduction de la puissance du laser. De ce fait, vérifiez quotidiennement la propreté et le bon état du verre de protection.

Nettoyez le verre de protection s'il est encrassé par des poussières de soudage. Le nettoyage ne permet toutefois pas d'éliminer les incrustations causées par des projections de particules de métal.

Changez le verre de protection s'il est endommagé par des incrustations de particules métalliques.

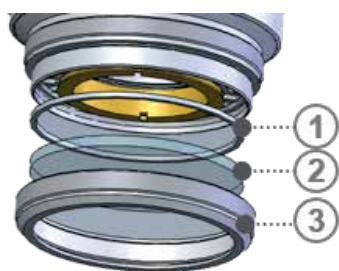

- ① Anneau d'espacement
- ② Verre de protection
- ③ Anneau de retenue moleté

Figure 25 : Verre de protection dans la tête laser



ATTENTION

La surface du verre de protection est fragile !

- ▶ Utilisez des gants propres.
- ▶ Ne souillez et ne rayez pas le verre de protection.
- ▶ Lorsque vous manipulez le verre de protection, tenez-le uniquement par les bords.
- ▶ Ne remettez pas un verre de protection encrassé en place, côté encrassé vers la lentille de focalisation. Les salissures pourraient atteindre la lentille de focalisation. Cela peut entraîner des incrustations qu'un nettoyage ne permet pas d'éliminer.

Pour nettoyer ou changer le verre de protection, procédez comme suit :

- ▶ Éteignez le système laser et débranchez la fiche de réseau.
- ▶ Maintenez avec une main la partie inférieure de l'objectif laser et tournez la bague de blocage moletée vers la gauche.
- ▶ Retirez la bague de blocage avec le verre de protection sans modifier la position de l'ensemble. Veillez à ce que l'anneau d'espacement ne tombe pas et ne soit pas perdue lors de cette opération. Veillez à ce qu'aucune salissure ne pénètre dans le capot ouvert.
- ▶ Nettoyer le verre de protection :
- ▶ Nettoyez le verre de protection avec un produit de nettoyage spécial pour les verres optiques et avec un chiffon non pelucheux. Si le verre de protection ne peut pas être nettoyé correctement, il convient de le remplacer.
- ▶ Montage d'un verre de protection :
- ▶ Mettez l'anneau d'espacement et le verre de protection en place en veillant à ne pas inverser les faces, pour éviter le risque de rayer la lentille de focalisation dans la tête laser.
- ▶ Revissez la bague de blocage moletée avec le nouveau verre de protection sur la face inférieure de l'objectif. Pendant cette opération, respectez le point suivant : Pour éviter que le verre de protection soit sous tension et se brise, vissez d'abord avec précaution jusqu'en butée, puis desserrez la bague d'environ 5°.

7.6 Vérifier l'ajustage du laser

Une fois par semaine ou en cas de résultats de soudage insatisfaisants malgré des paramètres laser habituels, vérifiez à l'aide de papier photographique si le laser est encore correctement réglé :

- ▶ Placez le papier photographique sous l'objectif laser, hors de la tache focale du laser. Vous pouvez commander le papier photographique auprès de Dentaurem.
- ▶ Réglez les paramètres laser suivants : 3000 W – 6 ms – 1.0 Hz – 2.0 mm
- ▶ Déclenchez une impulsion laser à l'aide de la pédale.
- ▶ Vérifiez l'empreinte de la tache de brûlure sur le papier photographique : L'empreinte de la tache de brûlure doit être uniformément ronde et claire. Le bord de l'empreinte ne doit être que légèrement rugueux. La couche photographique noire doit être éliminée uniformément.



Figure 26 : Empreinte de la tache focale laser sur papier photo

L'empreinte de la tache de brûlure ne doit **pas** présenter l'une des apparences suivantes :

- **Tachetée**

Nettoyez le verre de protection (voir *Nettoyer et changer le verre de protection* à la page 47).

- **Bord de l'empreinte effiloché**

Changez le verre de protection de l'objectif optique (voir *Nettoyer et changer le verre de protection* à la page 47).

- **Ovale, incohérente, asymétrique**


Soit le trajet du rayon laser est gêné par des obstacles, soit le laser a besoin d'un nouvel ajustage. Dans un tel cas, veuillez contacter le service après-vente.

7.7 Ajuster le miroir de déviation et le réticule

Le miroir de déviation est situé dans la tête laser. Il dévie le rayon laser préalablement horizontal verticalement vers le bas sur la pièce de travail.

Figure 24 à la page 46 montre la position du miroir de déviation sur le desktop Compact.

Lors du soudage, le point focal, c.-à-d. le point de soudure, doit se trouver exactement sous le réticule. Si tel n'est pas le cas, la tache focale du rayon laser ne coïncide pas avec celle de l'objectif et le miroir de déviation doit être réajusté.

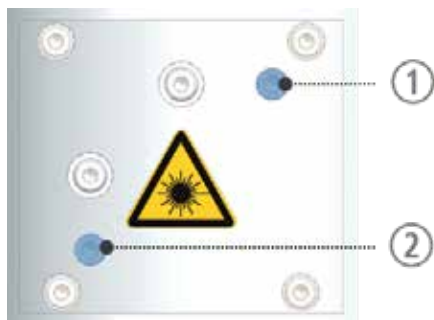

- ① Vis de réglage supérieure (à six pans, 3 mm)
Déplace le point focal vers la gauche/droite
- ② Vis de réglage inférieure (à six pans, 3 mm)
Déplace le point focal vers le haut/bas

Figure 27 : Vis de réglage du rayon laser

Pour ajuster le miroir de déviation et le réticule :

- ▶ Placez une petite table élévatrice ou un meuble similaire sous l'objectif du laser et posez dessus un objet test, par ex. une pièce métallique plate.
- ▶ À l'aide de la table élévatrice, faites la mise au point de l'objet dans l'embout du microscope.
- ▶ Réglez les paramètres d'impulsion laser suivants : 2500 W, 1 ms, Ø 0.7 mm
- ▶ Regardez par l'embout du microscope tout en activant le laser. Une tache focale apparaît sur l'objet.
- ▶ Activez à nouveau le laser et tournez alternativement les deux vis de réglage du miroir de déviation avec une clé à six pans creux coudée afin de déplacer le point focal dans le réticule de l'embout du microscope : Tournez la vis de réglage supérieure vers la droite ou vers la gauche pour déplacer respectivement le point focal vers la gauche ou vers la droite. Tournez la vis de réglage inférieure vers la droite ou vers la gauche pour déplacer respectivement le point focal vers le haut ou vers le bas.
- ▶ Réglez les deux vis de réglage jusqu'à ce que le miroir de déviation soit correctement ajusté.

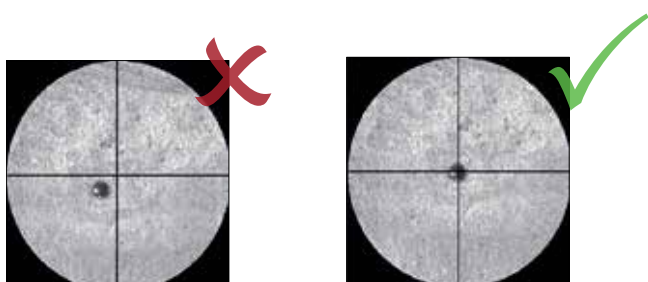


Figure 28 : Point focal dans le réticule

Si vous n'arrivez pas à déplacer le point focal exactement sous le réticule, il faut probablement effectuer un ajustage du laser. Dans un tel cas, veuillez contacter le service après-vente.



ATTENTION

Si la vis du capot du miroir est desserrée, le laser doit être réajusté !

- ▶ Ne desserrez **pas** la vis du capot du miroir.

7.8 Vérifier et changer le filtre du dispositif d'aspiration des fumées de soudage



ATTENTION

La fumée de soudage présente un risque pour la santé !

- ▶ Pendant le remplacement du filtre, portez une protection respiratoire (classe de filtre FFP-2) et des gants jetables (pouvant être commandés auprès de Dentaureum).
- ▶ Conditionnez le filtre dans un sac plastique et fermez-le bien.
- ▶ Jetez le filtre dans les déchets spéciaux conformément aux directives locales.

Le filtre du dispositif d'aspiration de la fumée de soudage se trouve dans la chambre de soudage, à l'arrière sur la partie supérieure.

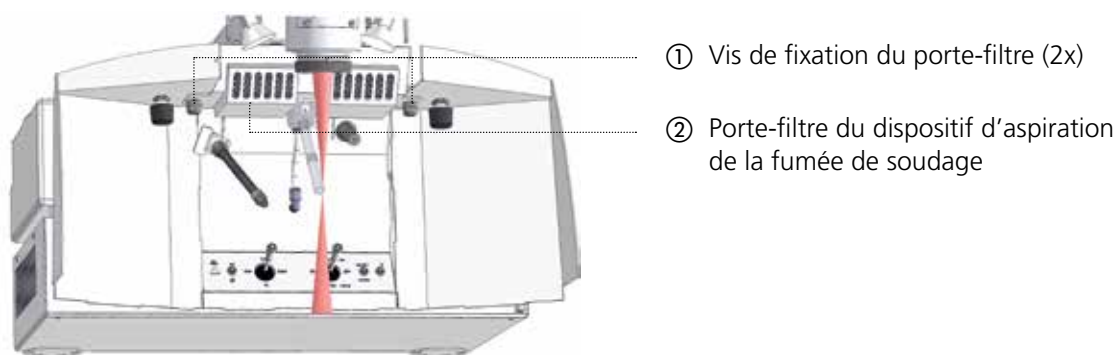


Figure 29 : Système d'aspiration des fumées de soudage dans la chambre de travail

Le filtre du dispositif d'aspiration de fumée de soudage se compose des éléments suivants :

- Filet métallique en guise de protection incendie
- Tapis de préfiltrage pour grosses particules (classe de filtre F5 conforme à la norme DIN EN 779)
- Filtre principal (filtre HEPA de la classe H14 conforme à la norme DIN EN 1822-1)

Vérifiez tous les jours le filtre avec les matériaux produisant de fortes fumées, sinon une fois par mois (voir *Plan d'inspection et de maintenance* à la page 43), et changez le filtre au besoin pour garantir une aspiration impeccable de la fumée de soudage.

Nettoyez également le piège à étincelles à chaque changement de filtre.

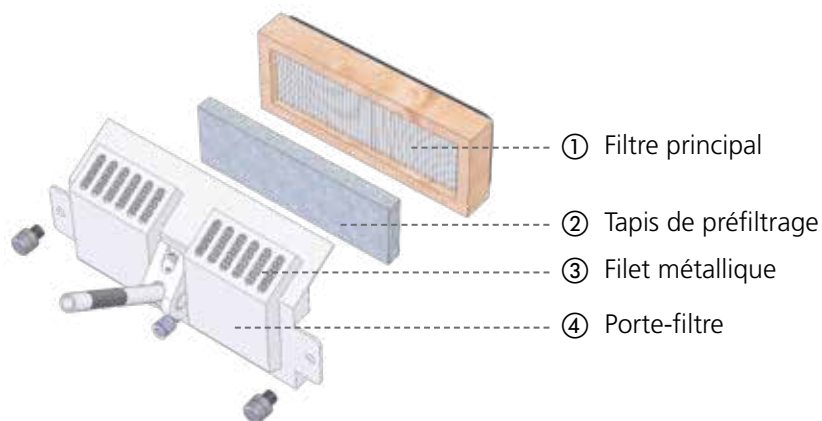


Figure 30 : Filtre du système d'aspiration des fumées de soudage

i CONSEIL

Plus vous changez souvent le tapis de préfiltrage, moins vous avez besoin de changer le filtre principal.

Retirer le filtre

- ▶ Mettez des gants jetables, enfiler un masque de protection respiratoire et préparez un sac plastique suffisamment grand.
- ▶ Desserrez les deux vis de fixation du porte-filtre dans le couvercle de protection du porte-filtre.
- ▶ Retirez le filtre principal avec le tapis de préfiltrage en veillant à ne pas causer de secousse, si possible.
- ▶ Mettez le filtre retiré et les gants jetables dans un sac plastique, fermez correctement le sac et jetez-le avec les déchets spéciaux conformément aux directives locales.

Vérifier le filtre

- ▶ Vérifiez le tapis de préfiltrage et le filtre principal. Le tapis de préfiltrage doit être remplacé lorsqu'il devient marron clair ou foncé. Le filtre principal doit être changé lorsqu'il s'assombrit sur la partie arrière.

Installer les nouveaux filtres

- ▶ Installez le nouveau tapis de préfiltrage dans le filtre principal.
- ▶ Installez le filtre principal avec le tapis de préfiltrage vers le bas dans le porte-filtre.
- ▶ Installez le filtre principal avec le tapis de préfiltrage dans le porte-filtre.
- ▶ Resserrez les vis de fixation du porte-filtre.

7.9 Changer l'eau de refroidissement et le filtre particulaire

Le desktop Compact est refroidi avec env. 5 l d'eau déminéralisée.

Un capteur de niveau se trouve dans le réservoir d'eau de refroidissement afin de vérifier s'il contient assez d'eau de refroidissement. Si tel n'est pas le cas, un message d'erreur (Interlock) est affiché (voir *Messages et élimination des erreurs* à la page 56).

Un filtre particulaire se trouve également dans le réservoir de liquide de refroidissement, préparant le liquide et filtrant les particules fines hors du liquide.



ATTENTION

Le liquide de refroidissement et le filtre particulaire doivent absolument être remplacés conformément aux directives !

Dans le cas contraire, cela risque de provoquer des dommages irréversibles sur le barreau de cristal laser, la lampe flash ou la cavité et de réduire la durée de vie de la lampe flash.

- ▶ Utilisez uniquement de l'eau déminéralisée avec une conductance inférieure à 5 µS/cm comme eau de refroidissement.
- ▶ Changez le **liquide de refroidissement déminéralisé avec le filtre particulaire tous les ans ou après 1 000 heures de fonctionnement**, selon ce qui arrive en premier. Le nombre d'heures de fonctionnement réalisées est communiqué par votre technicien de service et saisi dans le protocole de maintenance et de réparation.



ATTENTION

Risque de dérapage

- ▶ Essayez le liquide de refroidissement renversé sur le sol.

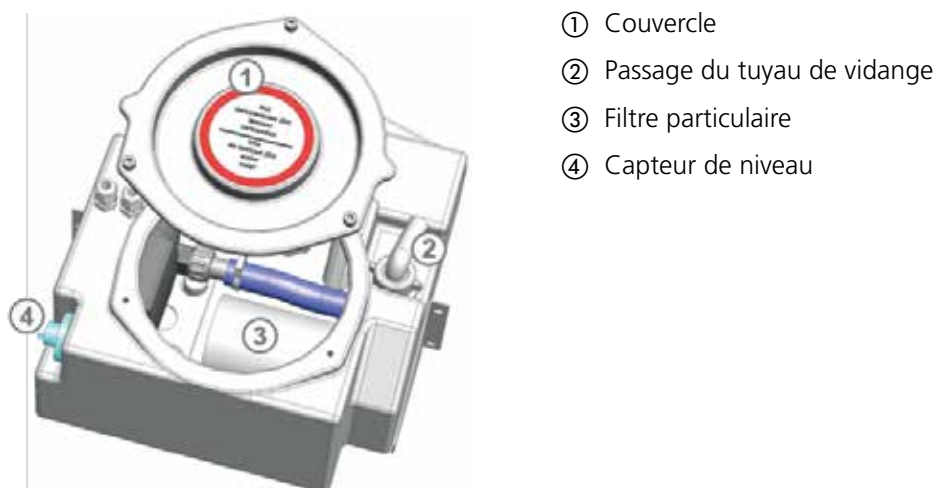


Figure 31 : Réservoir d'eau de refroidissement

Vous pouvez effectuer le remplissage d'eau de refroidissement ou la vidange via le tuyau de remplissage situé à l'arrière sans ouvrir le capot du desktop Compact.

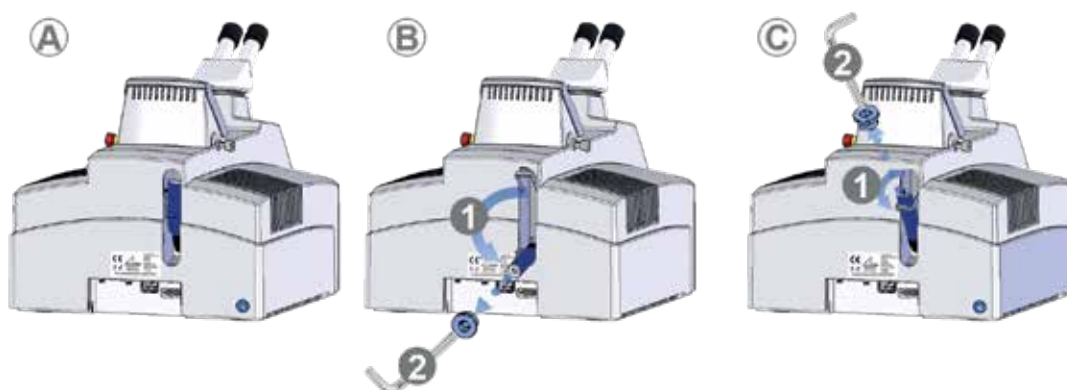


Figure 32 : Vidanger l'eau de refroidissement et remplir d'eau de refroidissement

- A Position de base – Tuyau de remplissage rabattu
- B Position pour vidanger l'eau de refroidissement – Tuyau de remplissage en bas
- C Position pour remplir d'eau de refroidissement – Tuyau de remplissage en haut

Retirer l'eau de refroidissement

Voir Figure 32 à la page 53, position B.

- Préparez un récipient et placez le tuyau de remplissage en position B.
- Retirez la vis du tuyau de remplissage à l'aide d'une clé à six pans de 10 mm.
- Laissez l'eau de refroidissement s'écouler dans le réservoir.

Remplir l'eau de refroidissement

Voir Figure 32 à la page 53, position C.

- ▶ Placez le tuyau de remplissage en position C.
- ▶ Retirez la vis du tuyau de remplissage à l'aide d'une clé à six pans de 10 mm.
- ▶ Versez l'eau déminéralisée dans le tuyau de remplissage avec précaution à l'aide d'un entonnoir.
- ▶ Attendez environ 5 minutes que l'air soit sorti du circuit de refroidissement.
- ▶ Si nécessaire, faites l'appoint en eau de refroidissement déminéralisée. Le niveau d'eau de refroidissement doit toujours être situé entre les repères MIN et MAX.

Ouvrir le réservoir de liquide de refroidissement

- ▶ Éteignez le système laser et débranchez la fiche de réseau.
- ▶ Ouvrez le système laser (voir page 44).
- ▶ Desserrez les vis du couvercle du réservoir d'eau de refroidissement.
- ▶ Ouvrez le couvercle en le soulevant prudemment avec un tournevis large.

Retirer l'eau de refroidissement

- ▶ Retirez l'eau de la chambre de pompe :
- ▶ Ouvrez le résonateur



DANGER



Électricité !

Même lorsque le système laser est éteint, il peut encore rester une tension potentiellement mortelle issue du banc de condensateurs sur les contacts de la lampe flash.

- ▶ Éteignez le système laser, débranchez la fiche de réseau et attendez au moins 5 minutes.
- ▶ Court-circuitez les contacts de la lampe flash avant de procéder à des travaux de maintenance sur le résonateur.
- ▶ À l'aide d'un multimètre, assurez-vous qu'il ne reste aucune tension avant de continuer.
- ▶ Desserrez les 6 vis du couvercle de la chambre de pompe.
- ▶ Soulevez légèrement le couvercle de la chambre de pompe. De l'air peut ainsi passer et l'eau de refroidissement peut se déverser dans le réservoir d'eau de refroidissement.
- ▶ Vissez à nouveau le couvercle de la chambre de pompe.

Changer le filtre particulaire

Le filtre particulaire est le cylindre blanc qui se trouve dans le réservoir d'eau de refroidissement (voir la figure ci-dessus).

- ▶ Dévissez l'ancien filtre particulaire du tuyau d'alimentation.
- ▶ Retirez l'ancien filtre particulaire.
- ▶ Veillez à ce que vos mains soient propres et installez le nouveau filtre particulaire.
- ▶ Vissez le nouveau filtre particulaire. Veillez à ce que le tuyau d'alimentation ne soit pas coudé.

7.10 Remplacer un coupe-circuit

Le système laser est équipé de coupe-circuits. Ils se trouvent à l'arrière du système laser. En cas de surcharge, vous pouvez remplacer les coupe-circuits.

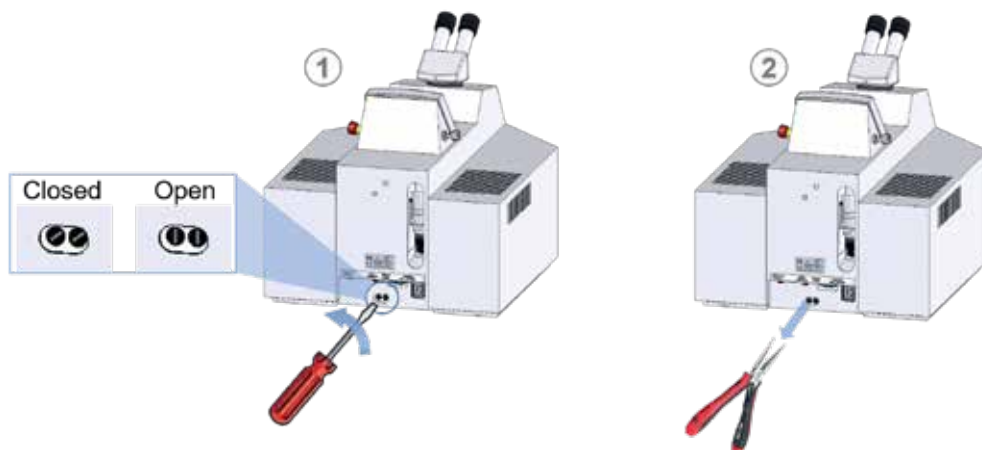


Figure 33 : Remplacer les coupe-circuits

Pour chacun des deux coupe-circuits, procédez comme suit :

- ▶ Desserrez la vis du coupe-circuit.
- ▶ Retirez le coupe-circuit avec précaution, à l'aide d'une pince.
- ▶ Remplacez le coupe-circuit.
- ▶ Resserrez la vis.

8 Transport, stockage, élimination

Veuillez respecter les points suivants lors du transport, du stockage et de l'élimination du système laser.

8.1 Transporter le système laser

Pour éviter d'éventuels dommages du système laser lors du transport et pour lesquels le fabricant n'assume aucune responsabilité, respectez les points suivants :

- ▶ Avant un transport relativement long, videz le réservoir d'eau de refroidissement du système laser. Vous éviterez ainsi des dommages dus à un écoulement ou au gel de l'eau de refroidissement (voir *Changer l'eau de refroidissement et le filtre particulaire* à la page 52).
- ▶ En cas de gel, ouvrez la chambre de pompe du laser pour que l'eau puisse s'écouler.
- ▶ Choisissez un emballage adapté pour le transport, afin de protéger le système laser des chocs et de l'humidité. Si possible, utilisez le matériel d'emballage d'origine.

8.2 Stocker le système laser

- ▶ Protégez le système laser contre les salissures, l'humidité et les secousses.
- ▶ Évitez les grandes variations de température qui, en entraînant la formation de condensat, pourraient endommager le système (voir *Conditions ambiantes* à la page 27).
- ▶ En cas d'entreposage prolongé, videz le réservoir d'eau de refroidissement du desktop Compact (voir *Changer l'eau de refroidissement et le filtre particulaire* à la page 52).

8.3 Éliminer le système laser

- ▶ Éliminez le système laser en séparant ses composants pour permettre le recyclage correct des différentes matières.
- ▶ Respectez les dispositions locales lors de l'élimination du système laser et de ses composants.

9 Messages et élimination des erreurs

Le tableau suivant regroupe tous les messages d'avertissement et d'erreur (verrouillages) susceptibles de s'afficher sur l'écran tactile du desktop Compact.

Vous trouverez dans le tableau le symbole affiché sur l'écran tactile, des symptômes d'erreurs supplémentaires, les causes possibles, ainsi que les mesures à prendre pour résoudre l'erreur en question. Le tableau indique également les personnes qui sont chargées de résoudre chaque erreur.

Vous devez réinitialiser certains messages d'erreur (verrouillages) après la résolution de l'erreur (voir page 41).

Le paragraphe *Codes d'erreur* à la page 60 contient la liste des codes de la chaîne d'erreur dans le menu des options avec la signification de chaque composant.

9.1 Messages d'erreur de la commande du laser

Symboles	Autres indications	Cause probable	Solution	Qui ?
	Le bouton Fermer le volet de sécurité s'allume. Le bouton Ouvrir le volet de sécurité clignote.	L'utilisateur a réduit la valeur de la tension.	Attendre. Pour décharger la tension en excédent, le système laser active la lampe flash lorsque le volet de sécurité est fermé jusqu'à ce que la valeur réduite configurée soit atteinte. Après cette étape, l'affichage s'éteint automatiquement.	Client
	Le bouton Laser OK s'allume en rouge. Le bouton Reset Interlock s'allume en jaune.	Le capteur de débit est défectueux. Pompe à eau défectueuse. Le filtre à particules est bouché. Coude dans le tuyau de liquide de refroidissement.	Appuyer sur le bouton Reset Interlock  Relâcher le capteur de débit bloqué. Si rien n'y fait, vérifier le débit (voir page 41) et contacter le SAV. Vérifier le débit (voir page 41) et contacter le SAV. Appuyer sur le bouton Reset Interlock  Changer le filtre à particules (voir page 52). Si rien n'y fait, vérifier le débit (voir page 41) et contacter le SAV. Appuyer sur le bouton Reset Interlock  Vérifier le guide de tuyau. Si rien n'y fait, vérifier le débit (voir page 41) et contacter le SAV.	Client, SAV Service après-vente Client formé, SAV Client, SAV
	Le bouton Laser OK s'allume en rouge. Le bouton Reset Interlock s'allume en jaune.	Température du liquide de refroidissement supérieure à 50 °C.	Appuyer sur le bouton Reset Interlock  Vérifier si les ailettes du ventilateur sont propres. Laisser les ventilateurs et la pompe fonctionner pendant 10 minutes environ sans utiliser le laser. Sinon, contacter le SAV.	Client, SAV
	L'affichage Laser OK s'allume en rouge.	Entrée d'impulsion laser (pédale ou autre commande externe) non raccordée, incorrecte ou défectueuse.	Vérifier les câbles, les tester avec l'autre pédale. Sinon, contacter le SAV.	Client, SAV
	–	Entrée d'impulsion laser active (pédale ou autre commande externe).	Pour déclencher une nouvelle impulsion, relâcher la pédale ou l'actionner plus lentement.	Client
	Le bouton Fermer le volet de sécurité s'allume. Le bouton Ouvrir le volet de sécurité clignote. Le bouton Reset Interlock s'allume. Le bouton Laser OK s'allume en rouge.	Le circuit de sécurité ne peut pas être fermé parce que l'un des capteurs du volet de chargement signale une erreur depuis plus de 3 secondes.	Appuyer sur le bouton Reset Interlock  Vérifier les capteurs du volet de chargement. Sinon, contacter le SAV.	Client
	–	Erreur de communication entre l'écran tactile et la carte de commande.	Contactez le service après-vente.	Service après-vente
	–	Erreur de la fonction <i>Micro-soudage</i>	Contactez le service après-vente.	Service après-vente
	Le bouton Ouvrir le volet de sécurité s'allume en rouge.	La lampe flash est en cours d'allumage.	Aucune action nécessaire. Le message disparaît après l'allumage automatique.	–

	Le bouton Fermer le volet de sécurité s'allume. Le bouton Reset Interlock s'allume. L'affichage Laser OK s'allume en rouge.	L'allumage automatique de la lampe flash a échoué. Lampe flash, laser ou allumeur défectueux ou eau déminéralisée de mauvaise qualité.	Changer la lampe flash.	Client formé, SAV
	L'affichage Laser OK s'allume en rouge. Le bouton Reset Interlock s'allume en jaune. Le bouton Fermer le volet de sécurité clignote.	Interruption de liaison électrique avec l'obturateur de sécurité. L'obturateur de sécurité est bloqué. Capteur du volet de sécurité défectueux. Tension d'alimentation 24 V manquante.	Appuyer sur le bouton Reset Interlock  Vérifier le câble. Sinon, contacter le SAV.	Client formé, SAV
	L'affichage Laser OK s'allume en rouge. Le bouton Reset Interlock s'allume en jaune. Le bouton Fermer le volet de sécurité s'allume en rouge.	Niveau de liquide de refroidissement trop bas.	Appuyer sur le bouton Reset Interlock  Mettre de l'eau déionisée jusqu'au niveau du capteur de niveau (voir page 52).	Client, SAV
	–	Erreur de la lampe d'avertissement laser intégrée.	Contacter le service après-vente.	Service après-vente
–	L'affichage Laser OK clignote en rouge.	Laser défectueux.	Vérifier l'entrée de tension. Sinon, contacter le SAV.	Client formé, SAV
–	L'affichage Laser OK s'allume en rouge. Le bouton Reset Interlock s'allume en jaune. Le bouton Fermer le volet de sécurité s'allume en rouge.	Surcharge thermique du bloc d'alimentation après avoir allumé et éteint souvent l'appareil.	Eteindre le système laser à l'aide de l'interrupteur à clé. Attendre 10 minutes environ. Rallumer le système laser.	Service après-vente

9.2 Autres erreurs de la commande du laser

Erreur / Icône	Autres symptômes	Cause probable	Solution	Qui ?
Paramètres laser habituels	L'énergie d'impulsion laser semble trop faible avec les réglages habituels.	Le verre de protection est sale.	Nettoyer ou changer le verre de protection (voir page 47).	Client
		Vieille lampe flash.	Changer la lampe flash.	Client formé, SAV
Paramètres laser habituels	Impossible de focaliser le laser comme d'habitude. Le point de soudage est trop grand.	Mauvais réglage de l'oculaire de l'embout du microscope.	Faire une mise au point sur le réticule dans l'oculaire droit (voir page 37).	Client
		La pièce d'ouvrage est mal positionnée.	Positionner la pièce d'ouvrage en hauteur de façon à ce qu'elle soit nettement visible (voir page 39).	Client
Paramètres laser habituels	Point de soudage et réticule ne s'accordent pas.	Pièce de travail mal positionnée.	Positionner la pièce de travail à une hauteur permettant de la voir nettement (voir page 49).	Client
Paramètres laser habituels	Point de soudure ovale, anguleux, effiloché.	Laser désajusté.	Vérifier l'ajustage du laser (voir page 48).	Client formé, SAV
		Montures du barreau laser non étanches, eau dans la trajectoire de rayonnement.	Eteindre immédiatement le système laser. Contacter le SAV.	Service après-vente
Paramètres laser habituels	Point de soudure inégalement réparti.	Verre de protection fendu. Verre de protection sali, projections de soudure sur la surface de la vitre.	Changer le verre de protection (voir page 47). Sinon, déclencher l'impulsion sur le papier photographique et contacter le service après-vente.	Client
Aucune	Le système laser ne réagit pas, la pompe ne fonctionne pas, le ventilateur ne fonctionne pas, l'éclairage ne s'allume pas.	Bouton d'arrêt d'urgence enfoncé.	Ressortir le bouton d'arrêt d'urgence (voir page 15).	Client
		Fiche d'alimentation débranchée.	Brancher la fiche d'alimentation.	Client
		Prise sans courant.	Vérifier la prise de courant.	Client
		Disjoncteur FI de la prise de courant défectueux.	Rallumer le disjoncteur différentiel.	Client
		Coupe-circuit sauté, une fois.	Remplacer le coupe-circuit (voir page 55).	Client
		Coupe-circuit sauté, de façon répétée.	Contacter le SAV.	Service après-vente
Aucune	L'écran ne s'allume pas.	Bloc d'alimentation 24 V défectueux.	Changer le bloc d'alimentation 24 V. Sinon, contacter le SAV.	Client formé, SAV
	Le laser n'émet pas d'impulsions.	La pédale ne s'enfonce pas assez. Dysfonctionnement du système laser.	Enfoncer la pédale jusqu'en butée. Contacter le SAV.	Client Service après-vente

9.3 Codes d'erreur

Si une erreur survient sur le desktop Compact, un code d'erreur composé de caractères alphanumériques est affiché dans le champ **Chaîne d'erreur** dans le menu des options (voir *Afficher et modifier les réglages de base* à la page 40).

En général, les minuscules indiquent des erreurs actuelles et les majuscules des erreurs enregistrées.

Le tableau suivant contient la signification de chaque caractère.

Symboles	Signification
a	La surveillance du matériel détecte un bouton d'arrêt d'urgence enfoncé. (En temps normal, cette action éteint l'écran et rien n'est affiché.) (Le contact du relais d'arrêt d'urgence est resté bloqué.)
A	La surveillance du matériel a détecté un bouton d'arrêt d'urgence enfoncé (ne doit plus être actif).
b	La demi-onde négative de la tension réseau n'est plus détectée par le logiciel.
B	La demi-onde négative de la tension réseau n'a pas été détectée (ne doit plus être actif).
c	La demi-onde positive de la tension réseau n'est plus détectée par le logiciel.
C	La demi-onde positive de la tension réseau n'a pas été détectée (ne doit plus être actif).
d	Les interrupteurs de porte ne donnent pas de réponse antivalente depuis plus de 3 secondes.
D	Les interrupteurs de porte n'ont pas donné de réponse antivalente depuis plus de 3 secondes (ne doit plus être actif).
e	Les interrupteurs de porte ne donnent pas de réponse antivalente depuis plus de 5 ms.
E	Les interrupteurs de porte n'ont pas donné de réponse antivalente depuis plus de 5 ms (ne doit plus être actif).
f	Le processeur de l'écran ne peut plus communiquer avec le processeur du bloc d'alimentation depuis plus de 250 ms.
F	Le processeur de l'écran ne pouvait plus communiquer avec le processeur du bloc d'alimentation depuis plus de 250 ms (ne doit plus être actif).
g	L'interrupteur de température externe vient de se déclencher.
G	L'interrupteur de température externe a été déclenché (ne doit plus être actif).
h	L'interrupteur de niveau vient de se déclencher.
H	L'interrupteur de niveau externe a été déclenché (ne doit plus être actif).
i	La réponse des lampes d'avertissement est actuellement incorrecte (aucune réponse, bien que la commande soit active).
I	La réponse des lampes d'avertissement était incorrecte (ne doit plus être actif).
j	Le débit se situe actuellement sous la limite inférieure.
J	Le débit est passé sous la limite inférieure (ne doit plus être actif).
k	Aucun débit n'est actuellement détecté.
K	Aucun débit n'a été détecté (ne doit plus être actif).
l	La lampe ne peut pas être allumée.
L	La lampe n'a pas pu être allumée (ne doit pas être le cas actuellement).
m	La réponse antivalente de la pédale passe actuellement sur non raccordé pendant plus d'une seconde.
M	La réponse antivalente de la pédale est passée sur non raccordé pendant plus d'une seconde (ne doit plus être actif).
n	Réponse inattendue du signal de la pédale pendant plus d'une seconde, ne passant pas sur non raccordé.
N	Réponse inattendue du signal de la pédale pendant plus d'une seconde, ne passant pas sur non raccordé (ne doit plus être actif).
o	Sortie d'impulsion simple terminée et encore sur la pédale.
p	Le volet de sécurité donne actuellement une réponse antivalente défectueuse depuis plus de 50 ms.
P	Le volet de sécurité a donné une réponse antivalente défectueuse depuis plus de 50 ms (ne doit plus être actif).
q	Le volet de sécurité donne actuellement une réponse inattendue depuis plus de 100 ms (ouvert bien que la commande ne soit pas active, ou inversement).
Q	Le volet de sécurité a donné une réponse inattendue depuis plus de 100 ms (ne doit plus être actif).
r	La pédale est encore enfoncée avec le verrouillage actif, et ne peut donc pas être réinitialisée.

Symboles	Signification
s	Coupure du courant de maintien.
S	Le bloc d'alimentation du processeur indique que la bascule de surintensité/surtension s'est déclenchée.
t	Impulsions désactivées en raison d'une erreur interne.
T	Le bloc d'alimentation du processeur indique qu'une erreur interne du ventilateur a été détectée.
U	Le bloc d'alimentation du processeur indique qu'un interrupteur de température interne s'est déclenché.
V	Le bloc d'alimentation du processeur indique qu'une mesure de température interne est défectueuse.
W	Le bloc d'alimentation du processeur indique qu'une tension d'alimentation de signal faible interne est défectueuse.
x	La réponse de l'aspiration vient de passer sous la limite inférieure.
X	La réponse de l'aspiration est passée sous la limite inférieure (ne doit plus être actif).
y	La mesure de température interne est actuellement au-dessus de la limite supérieure.
Y	La mesure de température interne était au-dessus de la limite supérieure (ne doit plus être actif).
z	La communication avec l'extenseur E/S interne ne fonctionne pas actuellement.
Z	La communication avec l'extenseur E/S interne ne fonctionnait pas (ne doit plus être actif).
1	La surveillance de la tension d'alimentation 5 V du processeur de l'écran n'est pas atteinte actuellement.
2	La surveillance de la tension d'alimentation 5 V du processeur de l'écran n'a pas été atteinte (ne doit plus être actif).
3	Erreur actuelle du dispositif de chargement Overload Error (pas de chargement OK du dispositif de chargement pour le banc de condensateurs depuis plus de 5 s, même après une tentative de réduction de la fréquence d'impulsion).
4	Erreur enregistrée du dispositif de chargement Overload Error (pas de chargement OK du dispositif de chargement pour le banc de condensateurs depuis plus de 5 s, même après une tentative de réduction de la fréquence d'impulsion).
5	Réduction automatique de la fréquence d'impulsion activée car aucun chargement OK n'a été signalé depuis plus de 5 s.
6	Avertissement enregistré pour la réduction automatique de la fréquence d'impulsion.
7	Erreur de coupure du courant de maintien enregistrée.
;	Fin de la chaîne d'erreurs.

10. Pièces de rechange

Vous trouverez ici les pièces de rechange que vous pouvez commander pour le dèktop Laser chez Dentaureum.

Pièces de rechange	REF
Filtre à particules dans le réservoir d'eau.....	908-231-50
Élément filtrant dans le système d'aspiration des fumées de soudage.....	908-235-60
Préfiltre pour le système d'aspiration des fumées de soudage.....	908-236-60
Lampe flash	908-232-90
Verre de protection de l'objectif	908-234-00
1 paire de manchons en cuir pour les clapets d'introduction des mains	907-490-20

Glossaire

Barreau laser	<i>Milieux actifs</i> en forme de barreau.
Barreau Nd:YAG	Voir <i>barreau laser</i>
Bobine d'allumage	Rend la lampe flash prête à émettre des impulsions.
Cavité	(En anglais : <i>Cavity</i>). Assure une utilisation et une injection efficaces de la lumière de la lampe dans le cristal laser. Réservoir alimenté en eau de refroidissement dans la <i>chambre de pompe</i> , dont l'intérieur doré-brillant est galvanisé. Il entoure la <i>lampe flash</i> , le <i>barreau laser</i> et la <i>plaque d'écoulement</i> .
Chambre de pompe	Réservoir dans lequel l'énergie de lampe flash est pompée dans le barreau laser. La chambre de pompe contient tous les éléments nécessaires à la mise à disposition d'énergie laser comme la <i>lampe flash</i> , le <i>barreau laser</i> , la <i>cavité</i> , ainsi que les raccordements pour le courant et l'eau de refroidissement.
Courant de maintien	Petit courant continu émis par la lampe flash, servant à garder la lampe flash prête à émettre des impulsions après l'allumage avec la bobine.
Eau déminéralisée	Également appelée eau déionisée ou eau purifiée (différente de l'eau distillée). Eau exempte de tous les minéraux normalement contenus dans l'eau potable. Sert à refroidir le laser, assurer que la <i>lampe flash</i> s'éclaire et empêcher la corrosion de la <i>cavité</i> . Pour déterminer le degré de pureté, la conductivité électrique est indiquée en $\mu\text{S/cm}$ (microsiemens par centimètre). Pour les systèmes laser de Dentaureum, la pureté doit être inférieure à $5 \mu\text{S/cm}$.
Embout du microscope	L'embout du microscope sert à positionner le point de soudure sur la pièce de travail et à contrôler visuellement l'opération de soudage laser. Pour tous les systèmes laser de Dentaureum, il s'agit d'un embout de stéréomicroscope avec un trajet du faisceau séparé pour chaque œil. Les deux yeux voient la pièce de travail depuis un angle légèrement différent, de façon à ce qu'un effet de stéréoscopie se produise, c'est-à-dire une impression de relief. Les embouts de microscopes utilisés dans les systèmes laser de Dentaureum sont équipés d'un <i>filtre de protection laser</i> et d'un volet <i>LCD</i> pour la protection des yeux.
Fenêtre de protection	Fenêtre carrée teintée pour observer sans danger l'opération de soudage laser. Protège les yeux des rayonnements laser et UV.
Filtre de protection laser	Tous les systèmes laser de Dentaureum possèdent sous l' <i>embout du microscope</i> un filtre de protection laser pour protéger les yeux de la lumière infrarouge du laser.
Gaz de protection	Utilisé pour protéger la soudure des influences atmosphériques (comme l'oxygène dans l'air) lors du soudage. Empêche l'oxydation et les changements de couleur au niveau de la soudure et réduit la projection de pièces métalliques. Seuls les gaz inertes sont appropriés (gaz qui ne provoquent aucune réaction chimique), par ex. l'argon ou l'azote. Plus le gaz est pur, meilleur sera le résultat de soudage. Pour la plupart des applications, l'argon d'une pureté de 4.6 est approprié.
Lampe flash	Pour générer une impulsion laser, le <i>milieu actif</i> , c'est-à-dire le barreau laser, est éclairé d'une lumière très claire. Pour ce faire, une lampe flash est utilisée. Elle pompe (= délivre) l'énergie sous forme de flashes lumineux.
Laser	Amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement (L ight A mplification by S timulated E mission of R adiation). Les laser de Dentaureum émettent des rayons infrarouges invisibles, à impulsion. Le milieu amplificateur de lumière est un cristal en forme de barreau (voir également <i>barreau laser</i> , <i>milieu actif</i> , <i>barreau Nd :YAG</i>). Grâce à un système optique, le rayon se concentre sur une très petite surface.
Milieu actif	Matériau permettant l'émission de la lumière laser. Détermine la longueur d'onde et la couleur de la lumière laser. Pour les systèmes laser de Dentaureum, le milieu actif utilisé est le cristal Nd:YAG (grenat d'yttrium et d'aluminium dopé au néodyme) sous forme de barreau laser. La longueur d'onde se situe dans la plage infrarouge invisible.

Oculaire	Lentille à travers laquelle on regarde dans l' <i>embout du microscope</i> .
Paramètres laser	Facteurs grâce auxquels vous influencez les caractéristiques de l'impulsion laser du rayon laser en tant qu'utilisateur. Vous pouvez définir les paramètres laser suivants : Puissance laser (en W), durée d'impulsion (durée d'une impulsion en ms), fréquence d'impulsion (nombre d'impulsions par seconde en Hz), diamètre du faisceau (diamètre en mm).
Plaque d'écoulement	Plaque de verre dans le résonateur, placée entre le barreau laser et la lampe flash.
Point de soudure	Section transversale du rayon laser. Le point de soudure est le plus petit et le plus puissant au niveau de la <i>tache focale du laser</i> .
Puissance moyenne	= énergie d'impulsion isolée (en joules) x fréquence d'impulsion. La puissance moyenne peut, pour une impulsion définie avec une énergie d'impulsion isolée élevée (= Puissance laser élevée et durée d'impulsion longue) et une fréquence d'impulsion plus basse, être aussi élevée que pour une impulsion définie avec une énergie d'impulsion isolée basse et une fréquence d'impulsion plus élevée.
Réflecteur	Voir <i>cavité</i>
Résonateur	Sert à générer le rayon laser en faisceau. Agencement de miroirs (miroir de sortie, miroir arrière) entre lesquels se trouve le rayon laser qui se réfléchit autant que possible entre les deux miroirs.
Tache focale	Emplacement du rayon laser au niveau duquel les rayons se regroupent pour former la tache la plus petite. Point le plus puissant du rayon laser.
Télescope	Agrandit le rayon laser en dehors du résonateur. Sert à modifier le diamètre du faisceau sur la pièce de travail.
Verre de protection	L'objectif de focalisation laser haut de gamme est protégé contre l'encrassement dû à la fumée de soudage et des dommages dus à la pénétration de pièces métalliques projetées, grâce à du verre de protection amovible au niveau de la sortie du rayon. Un verre de protection souillé ou endommagé engendre une réduction de la puissance du laser. Il doit donc être contrôlé, nettoyé et remplacé régulièrement.
Volet de sécurité	Élément de sécurité mécanique étanche à la lumière sur le trajet du faisceau du laser. Empêche une sortie non souhaitée du rayon laser hors de la source de rayonnement.
Volet LCD	Tous les systèmes laser de Dentaaurum sont équipés d'une protection contre les UV et la luminosité sous l' <i>embout du microscope</i> . Afin de protéger vos yeux lorsque vous regardez à travers l' <i>embout du microscope</i> , vous ne verrez aucune lumière lors d'une impulsion laser.
Zone laser	Zone (jusqu'à 100 m de la sortie du rayon) dans laquelle le rayon laser est dangereux pour les yeux et la peau en l'absence de mesures de protection organisationnelles et individuelles (également appelée « Zone de travail »).

Certificat de conformité CE

conformément à la Directive 2006/42/CE relative aux machines, annexe IIA

Par le présent document, nous,

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen, Germany

nous déclarons par la présente, que la machine désignée ci-dessous remplit, par sa conception, sa structure et sa fabrication, dans la version que nous avons livrée, les exigences fondamentales en matière de sécurité et de santé de la directive 2006/42/CE.

Description de la machine :

Le desktop Compact est un poste de soudage au laser de classe 4 et est destiné au soudage de composés métalliques ou au soudage de recharge de métaux.



Typ: desktop Compact Laser

REF: 090-578-50

A partir du numéro de série : DC-001-0002

Nous déclarons également la conformité du produit aux directives applicables suivantes :

2014/30/UE, directive EMC
(2014/35/UE, directive basse tension)

Normes harmonisées appliquées, en particulier :

EN ISO 11553-1:2020
EN ISO 11553-2:2008
IEC/EN 60204-1:2018

Autres normes et spécifications techniques appliquées :

IEC/EN 60825-1:2015
IEC/EN 60825-4:2011+A1:2008+A2:2011
EN 207:2017

Date / signature:

Ispringen, 24.02.2023

Identité du signataire:



- Dimple.Ing. (FH) Klaus Merkle –
Chef de Mécanique

Index

A		
air comprimé		
· raccordement	26, 29	
air de refroidissement, voir air comprimé	29	
ajustage, voir vérifier l'ajustage laser	48	
ajustement du réticule	49	
aperçu du principe de fonctionnement	21	
aspiration de fumée de soudage		
· position sur le système laser	23	
aspiration, voir dispositif d'aspiration de fumée de soudage	50	
atmosphère explosive	27	
avertissements	7	
avis sur le genre	6	
B		
bouteille de gaz	12	
bouton d'arrêt d'urgence	15, 24	
· position sur le système laser	22	
brûlures	12	
buse à air comprimé		
· position sur le système laser	23	
buse pour gaz de protection		
· buse flexible et pivotante	31	
· position sur le système laser	23	
C		
cale Ergo	28	
capacité de charge, maximale	18	
capot, type de protection	19	
capteur		
· capteur de niveau	52	
capteur de niveau		
· dans le réservoir d'eau de refroidissement	52	
caractéristiques techniques	18	
certificat de conformité	64	
certificat de conformité CE	64	
chambre de soudage	23	
· caractéristiques techniques	18	
· éléments de commande	25	
· régler l'éclairage	41	
changer le filtre du dispositif d'aspiration des fumées de soudage	50	
changer le filtre particulaire	52	
changer le liquide de refroidissement	52	
changer, verre de protection	47	
classe de protection laser	9	
classe, classe de protection laser	19	
clip de protection contre l'éblouissement	9	
commande du système laser	30	
conditions ambiantes	27	
conforme à la norme TRBS 1203, électriciens qualifiés	11	
conventions utilisées dans ce document	5	
D		
dangers	8	
débit du gaz de protection	26	
débit du liquide de refroidissement	41	
désinfection	13, 47	
dimensions d'encombrement	27	
dimensions extérieures	18	
dispositif d'aspiration de fumée de soudage, changer le filtre	50	
dispositifs de sécurité du système laser	15, 16	
domaines d'application	19	
E		
eau de refroidissement	27	
· remplir	28	
eau déminéralisée	52	
eau, voir eau de refroidissement	28	
écart des yeux	38	
eclairage		
· lampes halogènes	23	
· régler dans la chambre de soudage	41	
éclairage circulaire LED	41	
écran tactile	32	
· position sur le système laser	22	
électricien qualifié	11	
électricité, protection contre	11	
éléments de commande	24	
· de la chambre de soudage	25	
éléments de commande dans la chambre de soudage	23	
élimination	50, 56	
éliminer le système laser	56	
embout de microscope	37	
embout de microscope	22	
· position sur le système laser	22	

· protection contre une infection oculaire	47
· supprimer	45
émission de bruit	19
émissions sonores	19
emplacement d'enregistrement	34
enregistrer un ensemble de paramètres	35
ensemble de paramètres	34
· enregistrer et charger	35
entretien	43
ergonomie, hauteur optimale du siège	28
éteindre	42
F	
faisceau de plasma	9
fentes d'aération	
· position sur le système laser	22
feu	12
fonctionnement, aperçu	21
forme de l'impulsion	
· régler	34
fumée	11
fumée de soudage, voir fumée	11
fusible	55
G	
gants jetables	50
gants, voir gants jetables	50
gaz protecteur	12, 20
H	
hauteur d'installation	27
humidité de l'air	27
hygiène	13, 47
I	
impulsion, impulsion laser	33
infection	47
infection oculaire	47
inspection initiale	27
installation	27
installer, système laser	28
interlock reset	41
interrupteur à clé	24
· position sur le système laser	22
L	
la fenêtre de protection	
· position sur le système laser	22
lampe d'avertissement laser	16

laser	
· caractéristiques techniques	18
· principe fondamental du soudage au laser	19
LED	
· position sur le système laser	23
lumière bleue	9
M	
maintenance, consignes importantes	43
message d'erreur	
· restaurer	41
messages	56
messages d'erreur	57
mesures de protection	8
· feu et les brûlures	12
· gaz protecteur	12
· peau	9
· rayonnement laser	9
mesures de sécurité laser	
· de l'exploitant	10
· de l'utilisateur	10
mettre en marche, système laser	30
mise en service	27
mode d'emploi, conventions	5
N	
nettoyer et changer le verre de protection	47
nettoyer le système laser	47
nettoyer, verre de protection	47
niveau de pression acoustique	19
O	
obligations de l'opérateur	14
obligations de l'utilisateur	14
obturateur de sécurité	18
· ouvrir/fermer	39
opérateur	
· mesures de sécurité laser	10
· obligations	14
ouvrir le capot	45
ouvrir le système laser	44
P	
papier photographique	48
paramètres d'impulsion	
· enregistrer et charger un ensemble de paramètres	34
paramètres d'impulsion, voir paramètres laser	33

paramètres laser	
· enregistrer et charger un ensemble de paramètres	34
· régler	32, 34
passages de mains	
· position sur le système laser	22
peau, mesures de protection	9
pédale de commande	26, 30
pièces consommables	61
pièces de rechange	61
plan d'inspection et de maintenance	43
plan de maintenance	43
plaque d'identification	
· position sur le système laser	26
plaques d'avertissement laser	16
plaques, plaques d'avertissement	16
poids	18
point focal	
· position sur le système laser	23
positionner la pièce de travail	30, 49
protection respiratoire	50
Q	
qualification du personnel	14
R	
raccordement	
· air comprimé	29
raccordement au réseau	
· position sur le système laser	26
raccordement au réseau local	28
raccordement de la pédale	
· position sur le système laser	26
raccordement du gaz de protection	
· position sur le système laser	26
raccordements électriques	
· caractéristiques techniques	18
raccordements externes	26
rayon laser	23
rayonnement diffusé	9
rayonnement laser direct	9
rayonnement laser indirect	9
rayonnement laser réfléchi	9
rayonnement laser, mesures de protection	9
rayonnement secondaire	9
rayonnement UV	9
réglages de base	
· afficher et modifier	40

réservoir d'eau de refroidissement	53
réservoir d'eau, voir, réservoir d'eau de refroidissement	53
risque d'infection	13
risques	8
risques pour la santé	9
risques résiduels	8
S	
sécurité	7
sortie du rayon	
· position sur le système laser	23
soudage	31
soudage au laser, principe fondamental	19
stimulateur cardiaque	13
stockage	56
stocker le système laser	56
surface d'implantation	27
surface de travail	27
surfaces de contact-désinfection	13
système laser	
· aperçu	21
· mise en service	30
T	
tache focale	49
tâches de maintenance hebdomadaires	44
tâches de maintenance mensuelles	44
tâches de maintenance quotidiennes	43
température	27
tête laser avec embout du microscope	22
trajet du faisceau	19
transport	27, 56
travaux électriques	11
type de protection, capot	19
U	
utilisateur	
· mesures de sécurité laser	10
· obligations	14
· qualification	14
utilisation conforme aux prescriptions	7
utilisation incorrecte prévisible	8
utiliser	31
utiliser le système de mouvement	30
V	
valeur totale des vibrations	19
variateur	
· position sur le système laser	23

vérifier l'ajustage du laser	48
verre de protection	
· position sur le système laser	23
volet de chargement	
· position sur le système laser	22
volet LCD	16
volet, voir volet de sécurité	18
Y	
yeux, Mesures de protection	9