

ceraMotion® Z Hybrid – Nesting Informationen


Mit dem **ceraMotion® Z Hybrid** können Sie verlässliche und reproduzierbare Ergebnisse bezüglich der Farbe und der mechanischen Eigenschaften erzielen.

Das mehrfarbige und mehrschichtige Zirkonoxid **ceraMotion® Z Hybrid** ist ein echtes Multitalent. Es vereint in einem Blank die Ästhetik eines kubischem Zirkonoxids mit der Festigkeit eines hoch-transluzentem Zirkonoxids.

ceraMotion® Z Hybrid ist pure Ästhetik und für sämtliche Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich geeignet. Durch ein spezielles Hightech Verfahren werden hier zwei verschiedene Zirkonoxidwerkstoffe in einem Blank vereint. Erhältlich ist **ceraMotion® Z Hybrid** in den 8 gängigsten V-Farben und zwei Bleachfarben und bietet eine sichere Farbproduktion.

Produktvorteile:

- Sichere Reproduzierbarkeit für Ästhetik auf höchstem Niveau
- Multiindikativ durch hohe Festigkeit im Dentinbereich
- Natürlich fließende Farbübergänge von zervikal bis inzisal
- Hohe Verzugssicherheit bei großspannigen Brücken
- Verfügbar in den 8 gängigsten V-Farben und zwei Bleachfarben
- Hervorragende Fräsbarkeit
- Empfohlene Sintertemperatur 1480 °C
- Transluzenz 44% - 47% (uneingefärbt, 1,0 mm)
- Wirtschaftliche Finalisierung mit **ceraMotion® One Touch**
- Sicheres Verblenden mit **ceraMotion® Zr**

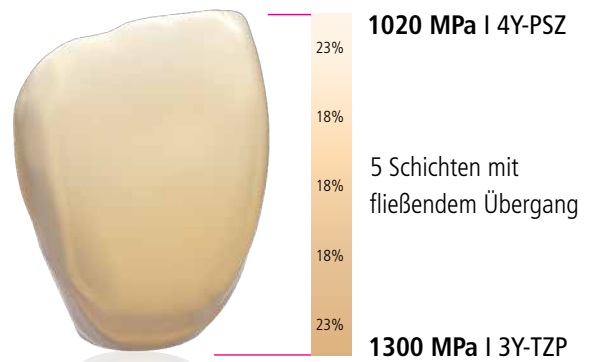



⇒ Hohe Verzugsicherheit

⇒ ceraMotion® Z

⇒ Mitbewerber

Die Wahl der richtigen Blankhöhe!

Die Blankhöhe liegt möglichst nahe an der vergrößert konstruierten Krone im CAD Design.

Wie wähle ich die richtige Blankhöhe aus?

Konstruierte Krone (im CAD Design) bis 10 mm → 14 mm Blankhöhe

Konstruierte Krone (im CAD Design) bis 13,4 mm → 18 mm Blankhöhe

Konstruierte Krone (im CAD Design) bis 16 mm → 22 mm Blankhöhe

Übersicht

Farbe	REF (14 mm)	REF (18 mm)	REF (22 mm)	Menge
A1	272-411-14	272-411-18	272-411-22	1 Stück
A2	272-412-14	272-412-18	272-412-22	1 Stück
A3	272-413-14	272-413-18	272-413-22	1 Stück
A3,5	272-415-14	272-415-18	272-415-22	1 Stück
A4	272-414-14	272-414-18	272-414-22	1 Stück
B1	272-421-14	272-421-18	272-421-22	1 Stück
B2	272-422-14	272-422-18	272-422-22	1 Stück
C2	272-432-14	272-432-18	272-432-22	1 Stück
Bleach 1	272-300-14	272-300-18	272-300-22	1 Stück
Bleach 2	272-400-14	272-400-18	272-400-22	1 Stück

