



Laser Welder SL10

Montagehinweis: Mikroskop

Assembly note: Microscope

Remarque de montage : Microscope

Nota de montaje: Microscopio



Für die Montage des beigelegten Mikroskops wird ein **Inbusschlüssel** (Größe 2,0) benötigt.

For the assembly of the enclosed microscope, a **hex key** (size 2.0) is required.

Pour le montage du microscope fourni, une **clé hexagonale** (taille 2,0) est nécessaire.

Para el montaje del microscopio incluido, se necesita una **llave Allen** (tamaño 2,0).



Das Mikroskop wird in die **vorgesehene Halterung** eingelegt.

The microscope is placed into the **designated holder**.

Le microscope est placé dans le **support prévu** à cet effet.

El microscopio se coloca en el **soporte previsto**.



Anschließend wird das Mikroskop mit den **drei Inbusschrauben** der Halterung sicher befestigt.

The microscope is then securely fastened with the **three hex screws** of the holder.

Ensuite, le microscope est solidement fixé à l'aide des **trois vis hexagonales** du support.

A continuación, el microscopio se fija de forma segura con los **tres tornillos Allen** del soporte.



Es ist darauf zu achten, dass das Mikroskop **gerade ausgerichtet** ist.

Ensure that the microscope is **aligned straight**.

Veillez à ce que le microscope soit **correctement aligné**.

Asegúrese de que el microscopio esté **correctamente alineado**.

Hinweis zum Transport: Für jeden Transport wird empfohlen, das Mikroskop abzunehmen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Transport note: We recommend that the microscope is always removed when transporting in order to avoid damage.

Remarque concernant le transport : Pour tout transport, il est recommandé de retirer le microscope afin d'éviter tout dommage.

Nota sobre el transporte: Para cualquier transporte, se recomienda retirar el microscopio para evitar daños.