

*tiologic*<sup>®</sup>  
TWINFIT

30  
years  
DENTAURUM  
IMPLANTOLOGY

## BASE EN TITANE CAD/CAM VARIO

Des solutions individuelles dès la base

**D**  
DENTAURUM  
1886

# BASE EN TITANE VARIO



Encoches de séparation  
intégrées pour une  
adaptation personnalisée  
aisée de la hauteur



Fenestration en option pour  
canal d'accès à la vis droit  
et angulé jusqu'à 20°




**La complexité, c'est du passé  
— aujourd'hui, c'est VARIO !**

La nouvelle base en titane tioLogic® TWINFIT CAD/CAM VARIO offre 4 longueurs réglables individuellement et un canal d'accès à la vis incliné jusqu'à 20° dans un seul et même produit. Avec chaque base en titane tioLogic® TWINFIT VARIO, le praticien et le patient bénéficient de la liberté de choisir entre une connexion conique et une connexion plateforme !

Conique

Plateforme

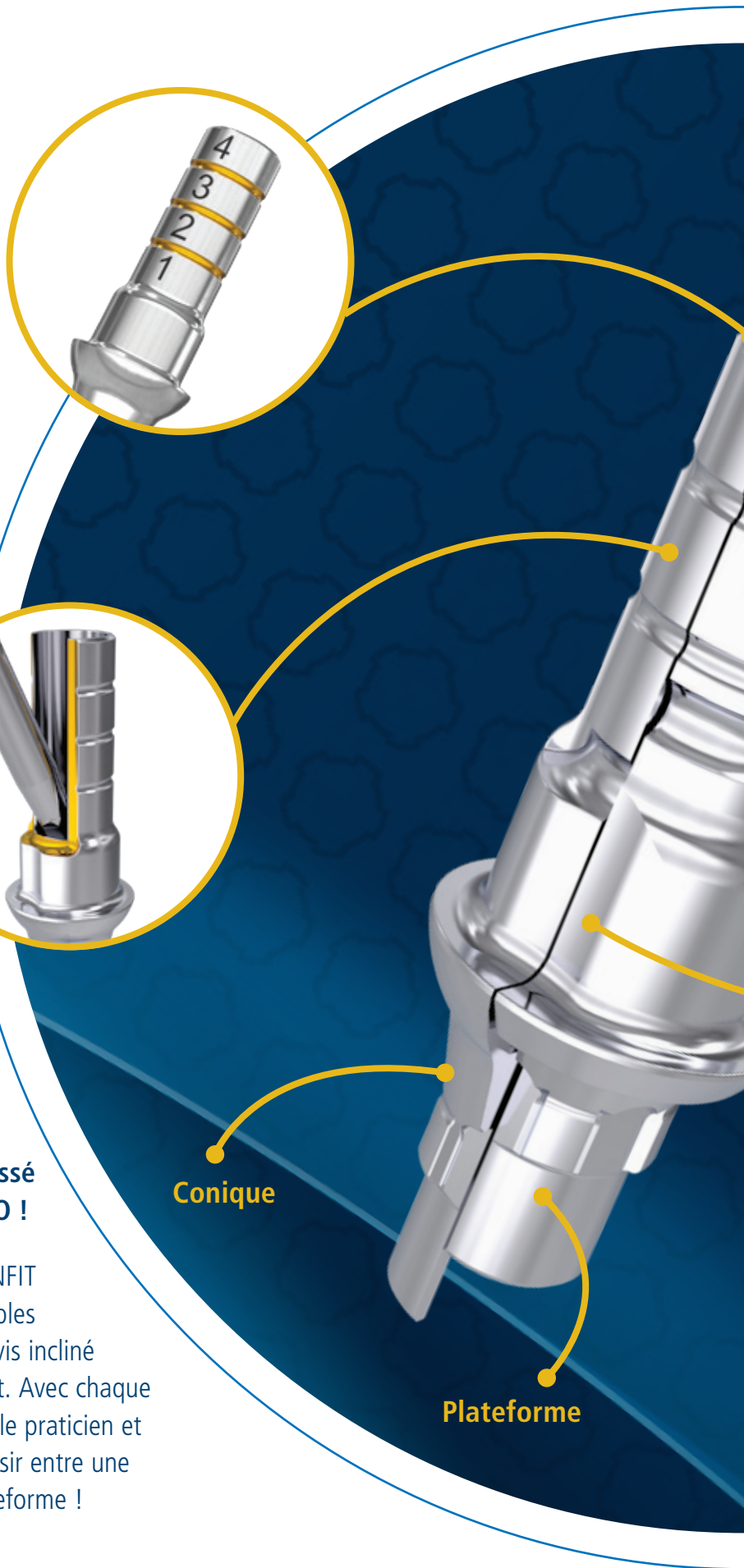

# tiologic®

## TWINFIT



8.5 mm

7.0 mm

5.5 mm

4.0 mm

Cylindre adhésif de  
8.5 mm de haut



Dispositif anti-rotation à  
l'intérieur pour un  
positionnement précis  
avec une épaisseur de  
matériau maximale



Large surface d'appui avec  
courbe de tension  
harmonieuse en vue d'une  
réduction de la fente de  
collage



# BASE EN TITANE VARIO

## LES PROPRIÉTÉS EN DÉTAIL



### **Encoches de séparation intégrées pour une adaptation personnalisée aisée de la hauteur**

- Adaptation aisée à de plus faibles hauteurs de cheminée 4.0 mm / 5.5 mm / 7.0 mm
- Stabilité élevée même en cas de fenestration ouverte pour le canal d'accès à la vis angulé
- Sélection aisée de la hauteur raccourcie dans le jeu de données numériques grâce à la numérotation



### **Fenestration en option pour canal d'accès à la vis droit et angulé jusqu'à 20°**

- Utilisation avec canal d'accès à la vis droit ou angulé
- Angulation maximale de 20° possible
- Déplacement du canal d'accès à la vis dans la zone esthétiquement non visible



### **Large surface d'appui avec courbe de tension harmonieuse en vue d'une réduction de la fente de collage**

- Réduction de la fente de collage grâce à la conception bien adaptée à la structure
- Transition optimisée avec la zone gingivale
- Épaisseur de matériau maximale au niveau de la restauration du fait de la large surface d'appui



### **Cylindre adhésif de 8.5 mm de haut**

- Soutien aux restaurations élevées avec hauteur de cheminée de 8.5 mm
- Accroissement de la surface de collage
- Graduation claire pour une personnalisation facilitée



### **Dispositif anti-rotation à l'intérieur pour un positionnement précis avec une épaisseur de matériau maximale**

- Positionnement facile et dispositif anti-rotation fiable
- Épaisseur de matériau maximale au niveau de la restauration du fait de la large surface d'appui
- Prévention des transitions à paroi fine et des fractures de céramique



### **Abutment Switch : Géométrie de raccordement conique et à plateforme**

- 2 hauteurs gingivales différentes :
  - Cône : 1.6 mm
  - Plateforme : 0.6 mm
- Profil d'émergence fin et optimisé
- Soutien et protection du tissu mou





Pilier à scanner titane M,  
tioLogic® TWINFIT



Base en titane CAD/CAM VARIO,  
tioLogic® TWINFIT, conique

Il est possible d'ouvrir le cylindre adhésif de la base en titane sur une surface préalablement définie ① pour un canal d'accès à la vis angulé. Pour obtenir un alignement correct lors de la planification, la surface de planification ② du pilier à scanner et la sortie souhaitée du canal d'accès à la vis angulé ① doivent se situer sur le même côté. La came de la connexion interne ③ se trouve dans les deux cas sur le côté opposé.



Les enregistrements de données de la base en titane tioLogic® TWINFIT VARIO sont disponibles dans les bibliothèques suivantes :

**exocad**  
**3shape**

# FLUX DE TRAVAIL

## TIOLOGIC® TWINFIT BASE EN TITANE CAD/CAM VARIO




**Scan intra-oral : veiller à l'orientation du scanbody pour le canal d'accès à la vis angulé**




**Sélection de la hauteur du pilier adaptée dans le logiciel de conception**



**Conception basée sur la hauteur de pilier sélectionnée, y compris l'angulation du canal d'accès à la vis**

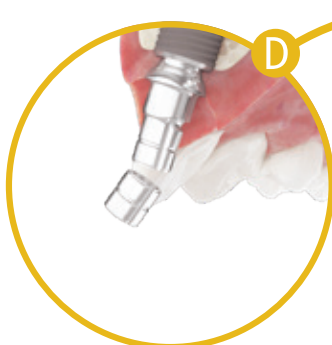

**Personnalisation de la hauteur de cheminée conformément à la conception numérique**

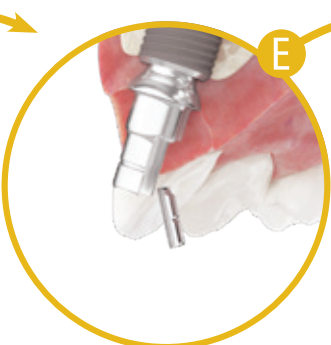

**Ouverture de la fenestration pour le canal d'accès à la vis angulé conformément à la conception numérique**



**Déplacement du canal d'accès à la vis possible jusqu'à 20°**



**Base en titane CAD/CAM VARIO M in situ, avec restauration prothétique**



CONTACT  
**DENTAURUM**

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31  
75228 Ispringen · Allemagne



info@dentaurum.com  
www.dentaurum.com



+49 72 31 / 803 - 0



BOUTIQUE EN LIGNE  
SHOP.DENTAURUM.COM