

tiologic[®]
TWINFIT



30
years
DENTAURUM
IMPLANTOLOGY

BASE DE TITANIO CAD/CAM VARIO

Las soluciones individuales comienzan en la base

D
DENTAURUM
1886

BASE DE TITANIO VARIO



Muestras de corte
integradas para ajustar
fácilmente la altura



Ventana opcional para
canal de tornillo recto y
angulado hasta 20°




**Lo complicado es cosa del
pasado; ¡hoy es VARIO!**

La base de titanio CAD/CAM VARIO tioLogic® TWINFIT ofrece 4 longitudes de ajuste individual y un canal de tornillo angulado hasta 20° en un mismo producto. Tanto el facultativo como el paciente se benefician de la libertad de poder seleccionar entre conexión cónica o de plataforma en cada base de titanio VARIO tioLogic® TWINFIT.

Cónica

Plataforma

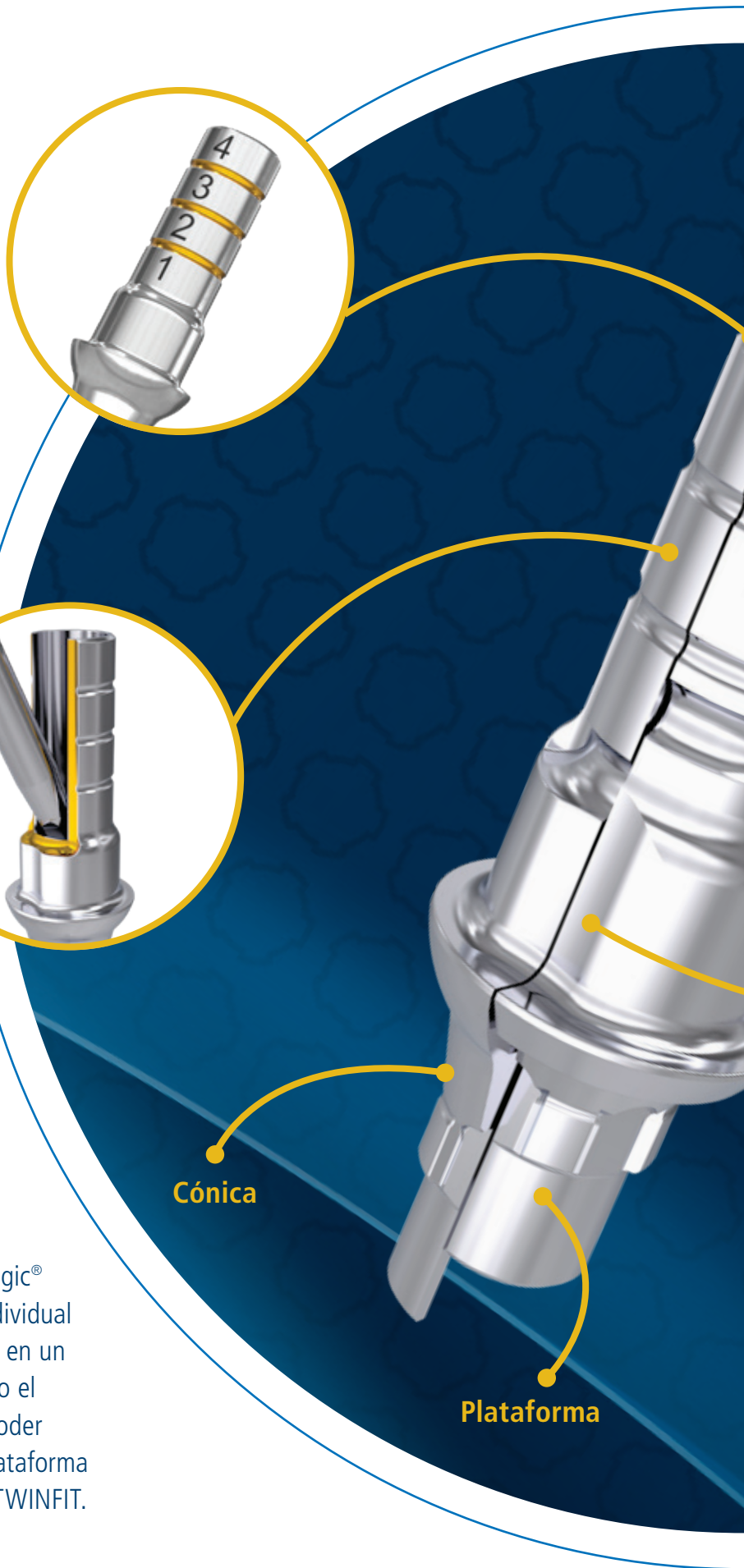

tiologic[®]

TWINFIT



8.5 mm

7.0 mm

5.5 mm

4.0 mm

Cilindro adhesivo
de 8.5 mm



Dispositivo antirrotación
interno para el
posicionamiento preciso
manteniendo al máximo el
grosor del material



Amplia superficie de apoyo
con una distribución
armoniosa de la tensión para
reducir al mínimo el espacio
de adhesión

BASE DE TITANIO VARIO

PROPIEDADES AL DETALLE



Muestras de corte integradas para ajustar fácilmente la altura

- Fácil adaptación a chimeneas de menor altura 4.0 mm / 5.5 mm / 7.0 mm
- Gran estabilidad, incluso con la ventana abierta, para el canal de tornillo angulado
- Fácil selección de la altura reducida en el archivo de datos mediante numeración



Ventana opcional para canal de tornillo recto y angulado hasta 20°

- Utilización con canal de tornillo recto o angulado
- Angulación máxima posible de hasta 20°
- Colocación del canal del tornillo en una zona estéticamente no visible



Amplia superficie de apoyo con una distribución armoniosa de la tensión para reducir al mínimo el espacio de adhesión

- Reducción del espacio de adhesión por su diseño estructuralmente favorable
- Transición óptima a la encía
- Superficie de apoyo que favorece un máximo grosor del material en la restauración



Cilindro adhesivo de 8.5 mm

- Soporte para restauraciones de gran altura con una de chimenea de 8.5 mm
- Aumento de la superficie de adherencia
- Una escala clara que facilita la adaptación a las necesidades específicas



Dispositivo antirrotación interno para el posicionamiento preciso manteniendo al máximo el grosor del material

- Fácil colocación y bloqueo seguro contra giros
- Máximo grosor del material en la restauración gracias a su seguro antirrotación interno
- Evita las transiciones de paredes delgadas y las roturas de la cerámica



Abutment-Switch: geometría de conexión cónica y de plataforma

- 2 alturas de encía diferentes:
 - Cónica: 1.6 mm
 - Plataforma: 0.6 mm
- Perfil de emergencia estilizado y optimizado
- Mantenimiento y protección de los tejidos blandos



Scanbody directo a implante, Titan M, tioLogic® TWINFIT



Base de titanio CAD/CAM VARIO, tioLogic® TWINFIT, cónica

Se puede abrir el cilindro adhesivo de la base de titanio en una superficie preparada previamente ① para un canal de tornillo angulado. Para obtener el ángulo correcto durante la planificación, la superficie de planificación ② del Scanbody directo a implante deberá estar en el mismo lado que la salida deseada del canal de tornillo angulado ①. La leva de la conexión interior ③ está localizada en el lado opuesto en los dos casos.



Los archivos de datos de las bases de titanio VARIO tioLogic® TWINFIT están disponibles en las siguientes bibliotecas:

exocad

3shape

FLUJO DE TRABAJO

TIOLOGIC® TWINFIT BASE DE TITANIO CAD/CAM VARIO




A
Escaneo intraoral - observar la orientación del cuerpo de escaneo para el canal de tornillo angulado




B
Selección de las alturas de pilar adecuadas en el software de diseño




C
Diseño basado en la altura de pilar seleccionada incl. la angulación del canal de tornillo

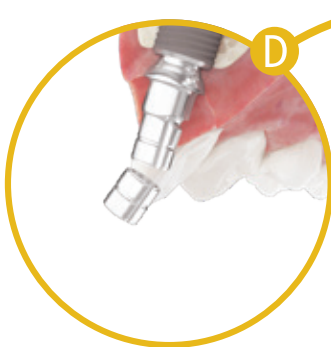

D
Diseño individual de la altura de la chimenea de forma análoga al diseño digital

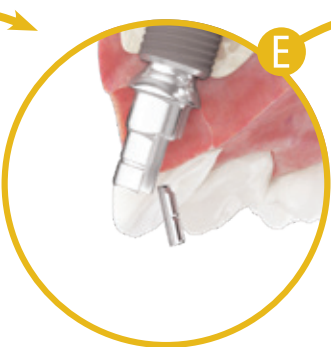

E
Apertura de la ventana para el canal de tornillo angulado de forma análoga al diseño digital

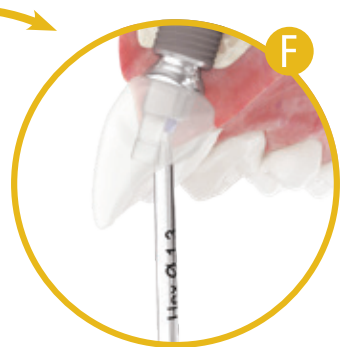

F
Posibilidad de colocar el canal de tornillo en hasta 20°



G
Base de titanio CAD/CAM VARIO
M in situ, incl. rehabilitación protésica



CONTACTO
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen Alemania



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31/803-0



TIENDA ONLINE
SHOP.DENTAURUM.COM