

Gebrauchsanweisung | Instructions for use
 Mode d'emploi | Modo de empleo
 Modalità d'uso

Dublito[®], Dublito[®] micro, Duplikat, Dubliform, Dubliplast[®], DubliGel

Thermoreversibles Agar-Dubliefmaterial
 Thermoreversible duplicating gel
 Gel de duplication thermoréversible
 Gelatina duplicadora termoreversible
 Materiale da duplicazione a base di agar termoreversibile

type 1, DIN EN ISO 14356



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Denta[®] entschieden haben.

Dear Customer

Thank you for having chosen a quality product from Denta[®].

Chère Cliente, cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la qualité Denta[®].








Estimadas/os clientes,

mucho le agradecemos que se haya decidido usted por un producto de calidad de la casa Denta[®].

Egregio Cliente,

La ringraziamo per aver scelto un prodotto Denta[®].

Hotline +49 7231/803-410 | [zahntechnik@denta[®].de](mailto:zahntechnik@denta[®].de) | [www.denta[®].com](http://www.denta[®].com)

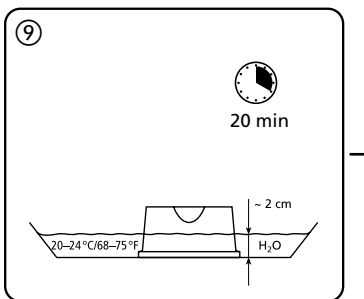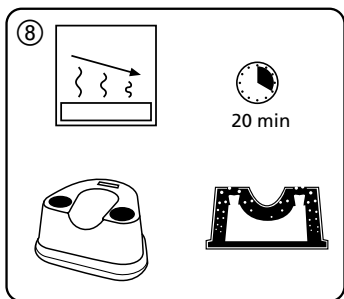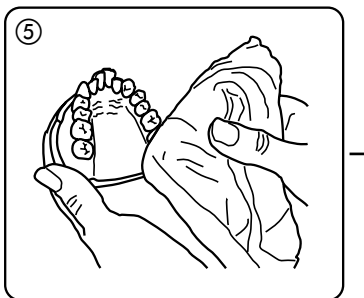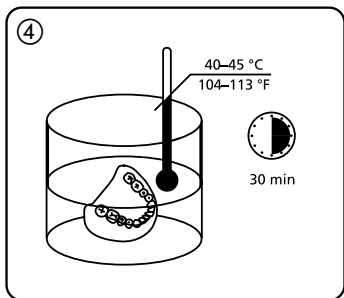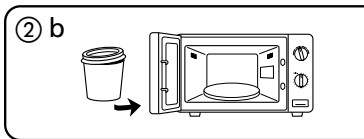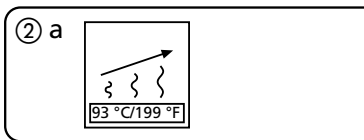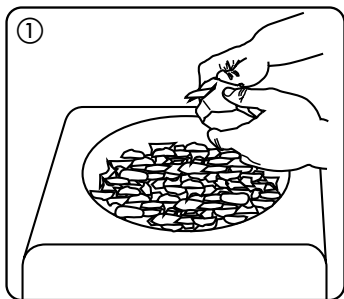





800 W: ~ 2 min




③

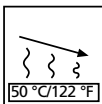


⑥

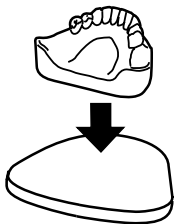

⑦

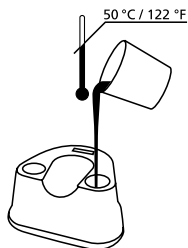




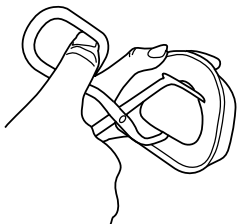





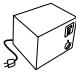


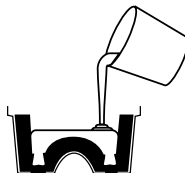⑩




⑪

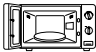20 °C – 24 °C / 68 °F – 75 °F



	Dublitolp® micro	Dublitolp®	Duplikat	Dubliform	Dubliplast®	DubliGel
	•	•	•	•	•*	–
	•	•	•	–	–	–
 acrylic	•	•	•	•	•	–
 plaster	–	–	–	–	•*	•
	•	•	•		•	•
	~30x	~25x	~20x	~15x	~15x	~12x
	108-615-00 (4 x 350 g)	108-610-00 (5 kg)	108-600-00 (6 kg)	108-500-00 (6 kg)	165-500-00 (5 kg)	165-501-00 (5 kg)
		 Dublitherm Compact (094-782-00)				

*do not mix plaster and investment material

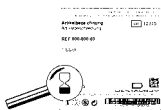

Stand der Information | Date of information | Mise à jour | Fecha de la información | Data dell'informazione: 2024-03

Änderungen vorbehalten | Subject to modifications | Sous réserve de modifications | Reservado el derecho de modificación | Con riserva di apportare modifiche

