

Castorit® all speed – universeller Einsatz in hervorragender Qualität.



Lieferprogramm:

Pulver:

100 x 60 g = 6 kg
40 x 150 g = 6 kg
8 x 2,5 kg = 20 kg

Order-No. 105-740-00
Order-No. 105-741-00
Order-No. 105-742-80

Anmischflüssigkeit:

1000 ml

Order-No. 105-745-00

CASTORIT®
all speed

Technische Daten:

Anmischverhältnis:	100 g : 26 ml
Anmischzeit:	60 Sek.
Verarbeitungszeit:	6-7 Min. (bei 20 °C)
Abbindezeit:	20-40 Min. (Speedbetrieb), mindestens 40 Min. (Nachtbetrieb)
Gesamtexpansion:	max. 3,3%
Druckfestigkeit:	9-11 MPa

Wir beantworten Ihre Fragen – schnell und kompetent:

Zahntechnische Beratung:

Telefon +49 72 31 / 803-410 oder -420
Fax +49 72 31 / 803-409
E-Mail: zahntechnik@dentaurum.de

Verkauf:

Telefon +49 72 31 / 803-206
Gebührenfreie Fax-Nummer 0800 / 4 14 24 34



CASTORIT®
all speed

Die K+B-Speed-Einbettmasse
treffsicher - in Präzision und Handling




Chargenkonstante Spitzenqualität aus den Forschungslabors von Dentaforum

Die **Castorit® all speed** erfüllt alle Anforderungen, die Sie an eine universell einsetzbare Einbettmasse für den gesamten Kronen- und Brückenbereich stellen.



Kompromisslos: Die K+B-Speed-Einbettmasse für alle Legierungen

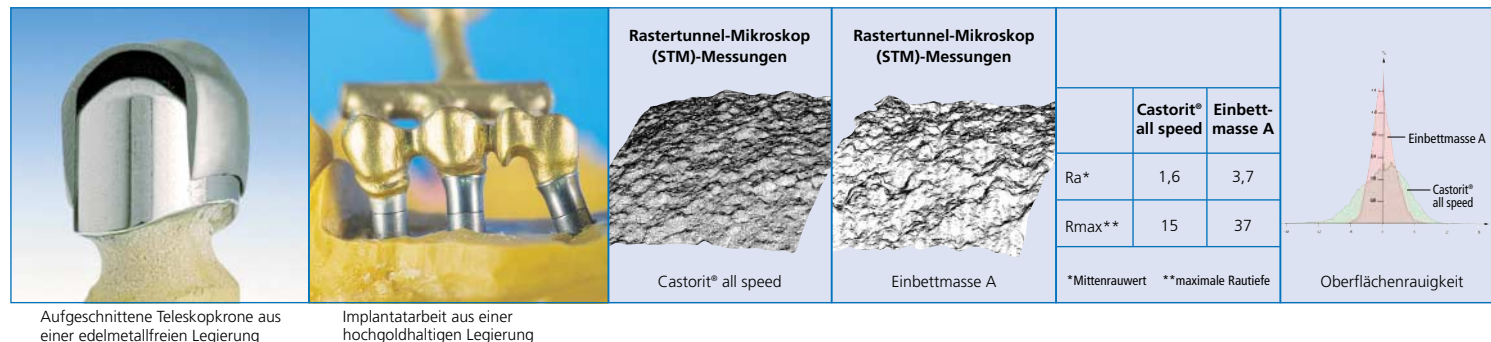

Hohe Gesamtexpansion

Die Passung – ein Muss

Hierfür sorgt eine exakt steuerbare Expansion in allen Anwendungsspektren und für alle Legierungsgruppen, angefangen bei den Edelmetallen bis hin zu den edelmetallfreien Legierungen mit höherem Expansionsbedarf. Die hohe Gesamtexpansion von **Castorit® all speed** gewährleistet eine hervorragende Passgenauigkeit selbst bei Teleskoparbeiten aus edelmetallfreien Legierungen.

Die Speed-Technik – ohne Kompromisse

Der Garant für einen effizienten Arbeitsablauf und eine optimale Betriebsplanung.

Durch den Einsatz im Speed-Betrieb, direkt bis 950 °C Endtemperatur, sparen Sie Kosten, Zeit und Energie. Die konventionelle Vorwärmung ist selbstverständlich möglich, aber nicht mehr nötig.

Die Handhabung – überzeugend einfach

Der Beweis: Lange Verarbeitungszeiten und eine sehr cremige Anmischkonsistenz.

Die **Castorit® all speed** ermöglicht ein Anmischen ohne Zeitdruck und beste Abformgenauigkeit auch feinsten Ränder. Eine Kühlung der Anmischflüssigkeit wird nicht mehr benötigt.

Die Gussflächen – extrem glatt

Gleichbleibende Gussqualität für eine exakte Wiedergabe der Modellation.

Die sehr feinkörnige Pulvermischung und der Einsatz modernster Fertigungs- und Analysemethoden garantieren höchste Qualität – Charge für Charge.