


Sécurité et esthétique
au service du bien-être.



De belles dents.

Facteur de bien-être n° 1

Quelles caractéristiques rendent une personne attractive ?

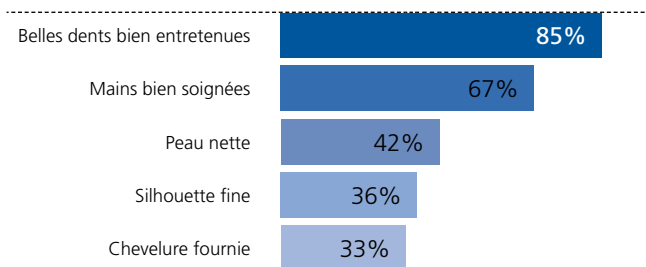

Sondage Emnid 2002 portant sur 1200 personnes en Allemagne, © Colgate



Les dents ont un rôle déterminant lorsqu'il est question de première impression. Avec un sourire éclatant, une personne attire d'emblée de la sympathie.

Mais de belles dents saines n'attirent pas seulement de la sympathie – elles témoignent aussi d'une denture « fonctionnelle ». Cela signifie qu'il n'y a aucun problème pour manger, goûter et parler. De belles dents bien solides symbolisent la santé, l'esthétique et la jeunesse. Elles favorisent le bien-être et renforcent la confiance en soi.

De nombreuses études montrent l'importance des dents dans les relations avec autrui.

De belles dents.

Tout simplement
une plus grande qualité de vie.

Certes, une lacune dans la dentition des tout petits est considérée comme « mignonne », mais plus tard, une telle lacune pose un grand problème. Qu'une dent soit perdue suite à un accident survenu par exemple lors d'une activité sportive, ou suite à une maladie ou encore au vieillissement ne change rien. Non seulement de grandes ou petites lacunes ne sont pas esthétiques mais elles créent un double préjudice pour la qualité de vie.

Bien présenter. Se sentir bien dans sa peau.

D'une part du point de vue de l'esthétique car, avec une telle lacune dans la denture, on ne se sent vraiment pas bien et qu'ainsi la confiance en soit en pâtit.

Des dents saines. Un corps sain.

D'autre part, cela signifie aussi toute une série d'inconvénients sanitaires significatifs. Les aliments peuvent être moins bien



© Yuri Arcurs - Fotolia.com

mastiqués, la musculature masticatoire et les maxillaires peuvent être sollicités de manière non équilibrée.

Cela peut conduire à des atteintes des articulations temporo-mandibulaires allant jusqu'à l'installation de maux de tête. De plus dans la région de la dent manquante, l'os du maxillaire subit une régression à cause du manque de sollicitation, situation qui devrait être évitée en règle générale.

Par conséquent, au vu de ces divers aspects, il est important et judicieux de combler une lacune de la dentition par des mesures appropriées.

Une excellente solution.

Les implants sont parfaitement bien adaptés pour cela. Vous allez découvrir ci-après quels sont les avantages qu'apporte une prothèse placée sur un ou sur des implants et pourquoi vous pourrez alors à nouveau rire aux éclats.

C'est quoi un implant ?

Les implants – la solution naturelle.

Les implants ne sont rien d'autre que des racines dentaires artificielles. Ils sont utilisés à la place d'une dent absente.


Sur cette racine artificielle qui s'intègre solidement dans l'os, un pilier (une superstructure) prend la place de la couronne naturelle. Ensemble, cette unité forme la prothèse implanto-portée.

Par ce moyen, les lacunes dentaires les plus diverses peuvent être comblées de manière esthétique, fonctionnelle, et pour vous, très confortable.

La plupart des implants sont constitués du très biocompatible titane, un métal de haute technicité qui est utilisé déjà depuis de longues années avec un grand succès dans le domaine médical.

Par une collaboration étroite entre le chirurgien-dentiste et le technicien dentaire, un véritable petit chef-d'oeuvre, qu'il n'est pas possible de distinguer des dents naturelles, voit le jour.

Malgré toutes ces bonnes nouvelles il ne faut pas oublier que les implants ne peuvent pas être mis en oeuvre chez toutes les personnes, par exemple lorsque certaines maladies représentent un risque pour la bonne tenue de l'implant. Demandez à votre chirurgien-dentiste si des implants peuvent être utilisés dans votre cas. Le respect d'une hygiène buccale parfaite est une condition incontournable pour que vous puissiez profiter pleinement de votre dent implanto-portée.

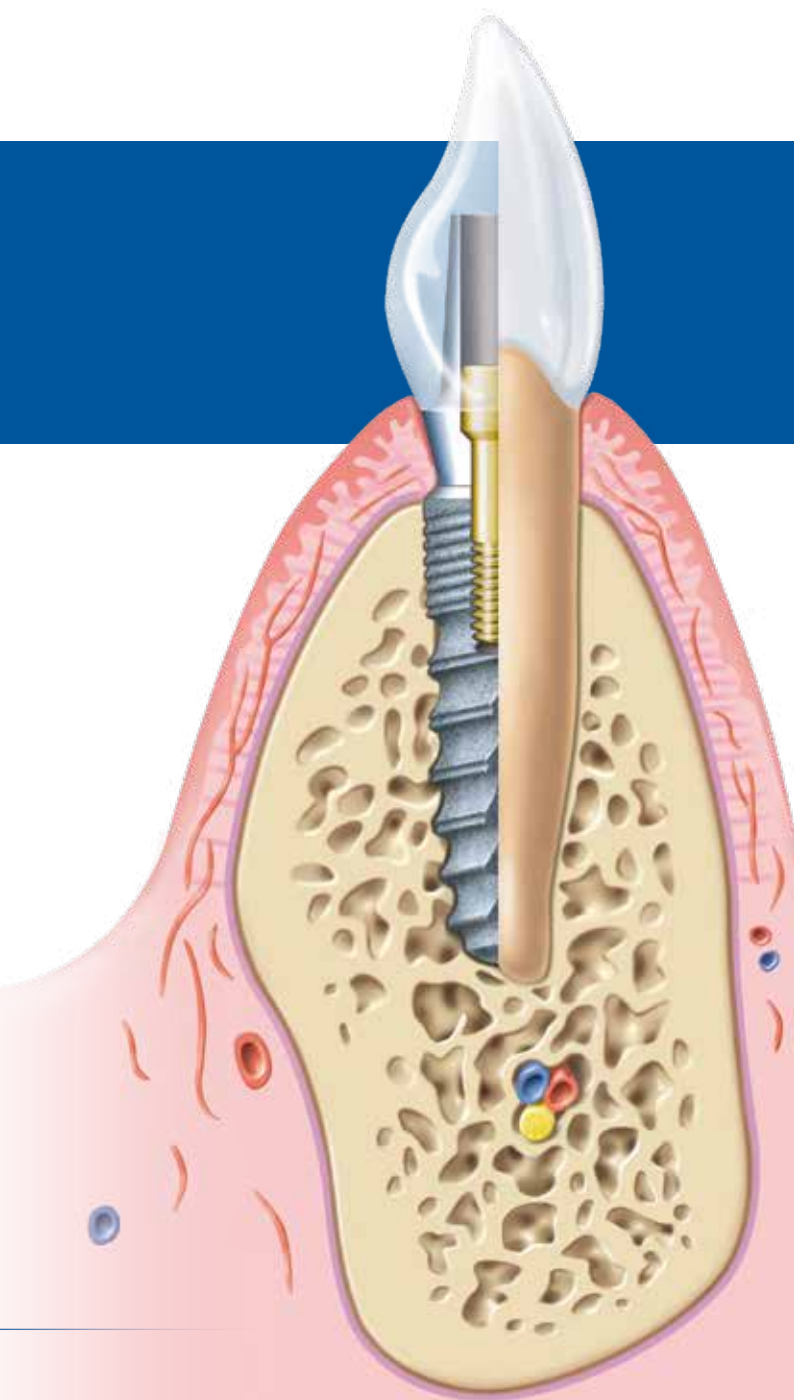

Les avantages en un coup d'oeil.

Au plus près de l'exemple naturel.



Les implants dentaires – l'impression d'avoir des dents naturelles !

Esthétique
parfaite

- Impression naturelle.
- Impression agréable en bouche.
- Pas de problème pour manger et mastiquer.

Plus de confort

- Pas de gêne pour parler ni pour le goût.
- Pas de meulage de dents saines.

Plus de sécurité

- Assise ferme et sûre des dents artificielles.
- De l'os très précieux est conservé sur les maxillaires.

Implants dentaires tioLogic® – éprouvés, sûrs et confortables !

Pour une vie active avec un plus en matière de qualité de vie. Parlez-en avec votre chirurgien-dentiste pour savoir comment les implants tioLogic® peuvent rendre votre vie encore plus agréable.

Utilisation d'implants.

Exemple 1 – L'espace édenté.

Il manque une dent ou plusieurs dents sur l'arcade (fig. 1.1.).

La solution standard : le bridge.

Si une dent manque sur une arcade, la solution classique est le bridge. Pour cela, les dents voisines doivent subir un meulage. Cela signifie que de la substance dentaire doit être enlevée afin que ces dents puissent recevoir, en tant que piliers de support, la construction représentant le bridge. Des dents saines sont couronnées (fig. 1.2.).

Inconvénients de cette solution standard :

- Des dents saines doivent subir un meulage.
- En cas de problème dentaire, les dents piliers ne peuvent être traitées qu'avec de grandes difficultés.

1.1.



1.2.



1.3.



La meilleure solution : l'implant unitaire.

Meilleure est la solution recourant à un implant unitaire. Une couronne à incrustation cosmétique en céramique est mise en place sur la racine dentaire artificielle (fig. 1.3.).

Les avantages de cette solution :

- La dent est aussi bien fixée que l'est une dent naturelle.
- La nouvelle dent s'intègre de manière esthétique dans l'arcade.
- Il n'est pas nécessaire de meuler des dents saines.
- De l'os très précieux est conservé sur les maxillaires.

Utilisation d'implants.

Exemple 2 – les dents postérieures sont absentes.

Il manque plusieurs dents à l'extrémité de l'arcade (situation d'édentation terminale; fig. 2.1).

La solution standard :

La prothèse adjointe squelettée.

Si une ou plusieurs dents manquent à l'extrémité d'une arcade, la solution classique est ce qu'on désigne par « prothèse adjointe squelettée ». Les crochets de cette prothèse enserrent les dents encore présentes afin de retenir la prothèse. Pour que ce maintien soit suffisant et pour que la force masticatoire soit mieux répartie, cette prothèse est également fixées contre les dents du côté opposé grâce à une entretoise métallique (fig. 2.2.).

Inconvénients de cette solution standard :

- Les crochets de maintien sont le plus souvent nettement visibles, ce qui est très inesthétique.
- Hygiène moins bonne car des résidus alimentaires peuvent rester retenus par les crochets.
- L'entretoise métallique gêne.
- L'assise n'est pas assez ferme.

2.1.



2.2.



2.3.



La meilleure solution :

Le bridge implanto-porté.

Bien meilleure est la solution recourant à un bridge implanto-porté. Sur les racines dentaires artificielles est fixée une construction de bridge parfaitement incrustée de céramique cosmétique (fig. 2.3.).

Les avantages de cette solution :

- Le bridge est bien fixé.
- Les nouvelles dents sont très esthétiques. Pas d'entretoise gênante.
- Hygiène simplifiée.
- De l'os très précieux est conservé sur les maxillaires.

Utilisation d'implants.

Exemple 3 – le maxillaire édenté.

Toutes les dents d'un maxillaire sont manquantes (fig. 3.1).

La solution standard :

La prothèse complète.


Si toutes les dents d'une arcade sont manquantes, la solution classique est la prothèse complète. Au maxillaire inférieur, cette prothèse n'est retenue sur la crête que par un effet de succion.

C'est pour cette raison qu'au maxillaire supérieur toute l'étendue du palais est recouverte pour améliorer cet effet de succion (fig. 3.2.).

Inconvénients de cette solution standard :

- Assise imparfaite, peu confortable.
- Au maxillaire supérieur, tout le palais est recouvert. Le sens gustatif est ainsi fortement perturbé.

3.1.

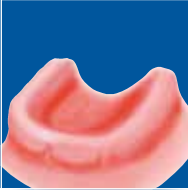

3.2.



3.3.



La meilleure solution :

La prothèse implanto-portée.

Bien meilleure est la solution recourant à une prothèse implanto-portée. Sur les racines dentaires artificielles est placée une construction qui garantit un ancrage sûr de la prothèse. Ainsi, une fonction optimale est obtenue et au maxillaire supérieur, le palais peut rester libre. Le sens gustatif n'est pas perturbé (fig. 3.3.).

Les avantages de cette solution:

- Cette prothèse a une bien meilleure assise.
- Pas de recouvrement gênant du palais.
- De l'os très précieux est conservé sur les maxillaires.

Toujours pas convaincus ?

Les implants – une solution efficace.





Les pages précédentes vous ont permis d'avoir un rapide premier aperçu à propos des circonstances dans lesquelles les implants peuvent être utilisés. Vous voyez : En cas de dents manquantes, les implants représentent une bonne solution à condition que dans votre cas spécifique n'interviennent pas de doutes ou de signes de contre-indication.

La mise en oeuvre réussie et parfaite d'implants dentaire exige beaucoup d'expérience de la part du chirurgien-dentiste et aussi du technicien dentaire. Le traitement et l'intervention chirurgicale sont, en règle générale, très sûrs mais d'exécution complexe. C'est pourquoi il est évident que cette solution mise au service de votre sourire est plus coûteuse que le sont les solutions de type standard. Mais cela ne devrait absolument pas vous en détourner – bien au contraire. De plus, il existe aujourd'hui de nombreuses possibilités de financement de tels soins prothétiques plus élaborés et cela à des conditions intéressantes.

Parlez-en à votre chirurgien-dentiste ou à votre assureur.

Parlez-en aussi à vos amis qui ont déjà bénéficié de soins implantaires et laissez-les vous relater à quel point ils sont satisfaits.

Vous trouverez dans les pages suivantes plus d'informations concernant le traitement à l'aide d'implants.

Déroulement du traitement.

De l'examen initial à la documentation.

Étape 1 – l'examen initial.

Tout au début, votre chirurgien-dentiste procédera à un examen bucco-dentaire approfondi pour voir si vous ne présentez pas de caries ni d'une inflammation du parodonte. Il est également possible qu'une nouvelle radiographie soit nécessaire afin de vérifier le volume osseux disponible au maxillaire concerné. Si une affection de l'état général existe, un avis de votre médecin traitant peut s'avérer nécessaire. Sur la base du diagnostic et des constatations, un entretien détaillé vous sera proposé et un devis établi.

Étape 2 – l'intervention.

Dans la mesure où vous êtes en bonne santé et que votre bouche est exempte de tous signes d'inflammation, l'intervention pour la mise en place des implants peut être entreprise. Comme c'est le cas par exemple pour une extraction dentaire, vous recevrez une anesthésie locale. Ensuite, l'os du maxillaire est dégagé, le lit implantaire préparé et l'implant sera inséré. Ensuite, la gencive sera refermée et suturée.

Étape 3 – la phase de cicatrisation.

Après l'insertion de l'implant, un délai de 3 à 6 mois sera nécessaire jusqu'à ce que celui-ci soit fermement intégré.



Selon la qualité osseuse qui vous est propre et selon le mode opératoire choisi, cette phase peut être plus brève ou plus longue. Au cours de ce temps, l'implant restera protégé par la gencive qui le recouvre.

Étape 4 – l'insertion de la superstructure.

Avant de pouvoir fixer la superstructure, donc la partie visible de votre nouvelle prothèse, sur l'implant, il faut, sous anesthésie locale brève, écarter très légèrement la gencive qui le recouvre. Ensuite, la superstructure peut être solidement fixée sur l'implant.

Étape 5 – les examens de contrôle.

Dès la fin du traitement prothétique implantaire, il est important de venir régulièrement pour subir de brefs examens de contrôle comme convenu préalablement avec le praticien afin de pouvoir profiter pleinement durant de longues années de ce plus en qualité de vie qu'offre ce traitement.

Étape 6 – la documentation.

Après l'intervention, votre praticien vous remettra un passeport personnel dans lequel toutes les données essentielles seront notées. Ainsi, vous disposerez toujours de toutes les informations nécessaires et cela même en vacances.

L'importance d'être bien conseillé.

La personne de confiance.

Votre chirurgien-dentiste.

Pour la plupart des gens, la décision d'opter pour des implants n'est pas simple malgré les nombreux avantages qu'offre cet type de traitement dentaire moderne et esthétique très élaboré.

Tenez compte du fait que votre implantologue possède une solide expérience dans ce domaine. Il vous donnera volontiers toutes les informations utiles. Il peut vous montrer au moyen de modèles ou d'images des exemples très concrets de tout ce qu'il est possible de faire actuellement.



Au cours de l'entretien avec votre chirurgien-dentiste, il serait judicieux de lui poser toutes les questions qui vous semblent importantes comme par exemple celle concernant le déroulement effectif de l'intervention, les risques encourus, la période qui suit directement l'intervention ou celles relatives à l'hygiène buccale.

Une décision importante et exigeante pour plus de confort et plus de qualité de vie.

Le groupe Dentaaurum.

Plus de 125 ans de compétence dentaire.

Etablissement de normes pour la technologie dentaire.

Le groupe Dentaaurum développe, produit et distribue dans le monde entier des produits pour les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires. Le grand nombre de produits disponibles pour la prothèse dentaire, l'orthodontie, et l'implantologie est unique au monde. Dentaaurum Implants, fabricant d'implants, est une filiale de Dentaaurum.

La qualité engendre la confiance.

Grâce à nos produits dentaires de grande qualité, nous avons acquis une expérience mondiale en tant que plus ancien fournisseur dentaire indépendant au monde. Nous devons notre succès commercial à la prise en compte des exigences de nos clients et de celles du marché. Ainsi, nous nous faisons un devoir de développer en permanence notre entreprise et de toujours améliorer la qualité de nos procédés et de nos produits.



Le service comme valeur ajoutée.

Il existe de nombreuses raisons d'utiliser les produits du groupe Dentaurem au cabinet dentaire et au laboratoire. La qualité est ici décisive. La philosophie de notre firme est d'étendre cette dernière à nos produits grâce à des performances et à des services supplémentaires. Nous proposons également un vaste programme de formation pour les débutants et les personnes plus confirmées avec une équipe internationale d'enseignants expérimentés. N'hésitez pas à vous renseigner.





www.dentaurum-implants.de

Votre équipe soignante

Ces Dispositifs Médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation le Marquage CE 0483. Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation. Consulter votre praticien.